

# Maxi Move

De la silla



**1**

Coloque el arnés alrededor del paciente.  
Coloque la correa para las piernas en la parte interna de los muslos.

**2**

Coloque el asidero de posicionamiento alejado del paciente.  
El bastidor debe quedar al nivel de los hombros.

**3**

NO active el freno

**4**

Enganche bien los clips de las correas en el bastidor.

**5**

Presione el asidero de posicionamiento hacia abajo y enganche bien los clips de las correas en el bastidor.

**6**

Enganche los clips para las piernas rectos (A). Nota: Para los pacientes propensos a dar patadas, enganche los clips cruzados (B).

**7**

Utilice el mando de control para elevar y ajustar el paciente.

**8**

Aparte la grúa de la silla.  
Transfiera al paciente.



**1**

Compruebe que hay suficiente espacio debajo de la cama para las patas del chasis.

**2**

Coloque el arnés debajo del paciente.

**3**

Coloque la zona de apoyo para la cabeza del arnés debajo del cuello del paciente.

**4**

Acérquese a la cama con el lado abierto del bastidor orientado hacia la cabeza del paciente. Ajuste la anchura de las patas del chasis si es necesario.

**5**

Coloque el bastidor centrado sobre el paciente.

**6**

Utilice el asidero de posicionamiento para inclinar el bastidor. Enganche bien los clips de las correas en el bastidor.

**7**

Presione el asidero de posicionamiento hacia abajo y enganche bien los clips de las correas situadas debajo de los muslos en el bastidor.

**8**

Eleve y traslade al paciente.