

# Maxi Move

Z krzesła



**1**

Założyć nosidło wokół pacjenta.  
Ułożyć pasy nożne po wewnętrznej stronie ud.

**2**

Uchwyt do regulacji pozycji skierowany od pacjenta.  
Rama na wysokości ramion.

**3**

NIE używać hamulca

**4**

Odpowiednio zaczepić zaciski pasa barkowego na ramie.

**5**

Nacisnąć uchwyt do regulacji pozycji i odpowiednio zaczepić zaciski pasów nożnych na ramie.

**6**

A

B

Zaczepić zaciski nożne prosto (A).  
Uwaga! Pacjent wykonujący energiczne ruchy nogami powinien mieć skrzyżowane zaciski nożne (B).

**7**

Pilotem można podnosić i regulować ustawienie pacjenta.

**8**

Odsunąć podnośnik od krzesła.  
Przewieźć pacjenta.



**1**

Sprawdzić, czy pod łóżkiem jest miejsce na nogi podstawy.

**2**

Założyć nosidło pod pacjentem.

**3**

Głowa pacjenta powinna spoczywać na części nosidła przeznaczonej do podparcia głowy.

**4**

Przysunąć się do łóżka, umieszczając otwartą stronę ramy od strony głowy pacjenta. W razie potrzeby wyregulować szerokość nóg podstawy.

**5**

Ustawić ramę nad pacjentem, po środku.

**6**

Uchwytem do regulacji pozycji przechylić ramę. Odpowiednio zacześć zaciski pasa barkowego na ramie.

**7**

Nacisnąć uchwyt do regulacji pozycji i odpowiednio zacześć zaciski pasów nożnych pod udami na ramie.

**8**

Teraz pacjenta można podnieść i przenieść.