
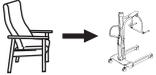


Maxi Move


Со стула 

1

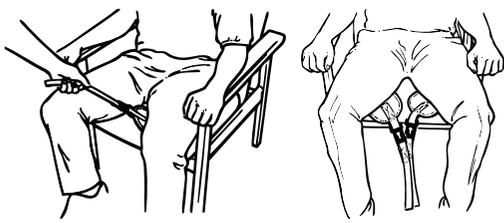

Разместите стропу вокруг пациента.
Разместите ножные ремни между бедер.

2

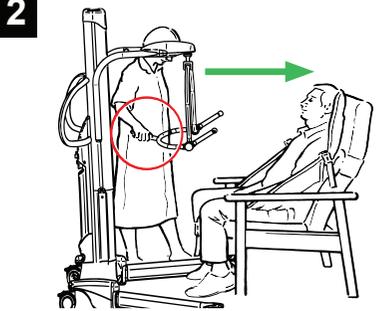


Ручьятка для перемещения
обращена от пациента.
Крановая балка находится
на уровне плеч пациента.

3




НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
тормоз

4

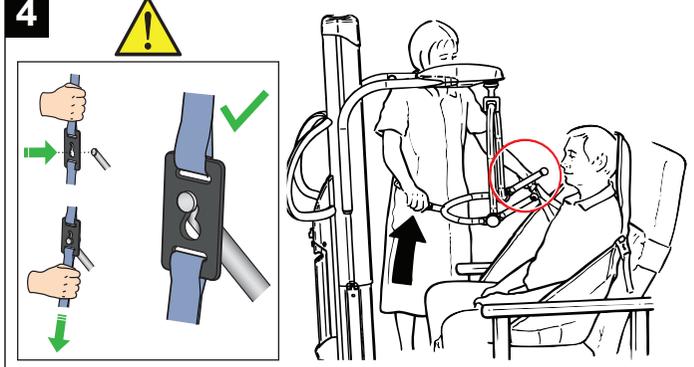


Правильно прикрепите зажимы плечевых ремней
к крановой балке.

5

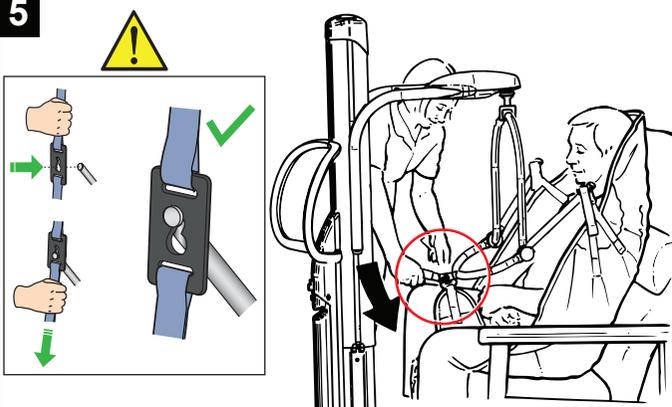


Нажмите вниз ручьятку для перемещения и правильно
прикрепите зажимы ножных ремней к крановой балке.

6

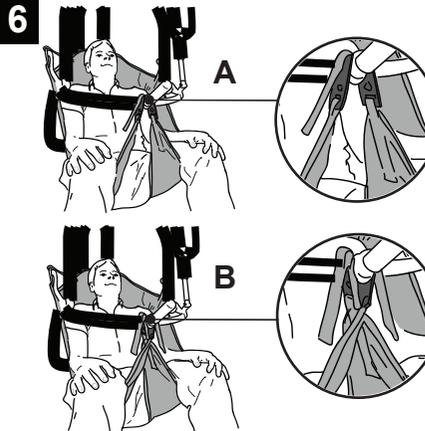

Прикрепите ножные зажимы нормальным
образом (А). Внимание! Если пациент
склонен дергать ногами, закрепите
ножные зажимы перекрестно (В).

7

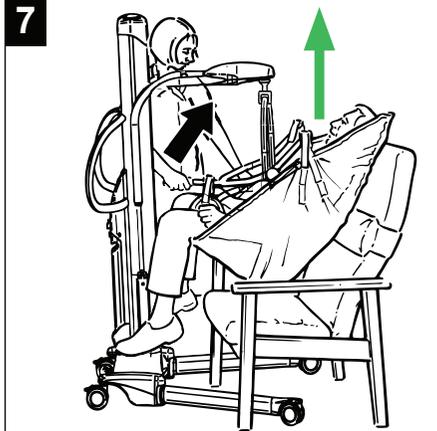

Используйте пульт управления, чтобы
поднять пациента и отрегулировать
его положение.

8



Откатите подъемник от кресла.
Переместите пациента.



1

Проверьте, имеется ли достаточно места для ножек шасси под кроватью.

2

Разместите стропу под пациентом.

3

Область стропы для поддержки головы под шейей пациента.

4

Подкатите подъемник к кровати таким образом, чтобы открытая сторона крановой балки была обращена к голове пациента. При необходимости отрегулируйте ширину ножек шасси.

5

Расположите крановую балку по центру над пациентом.

6

Используйте рукоятку для перемещения, чтобы наклонить крановую балку. Правильно прикрепите зажимы плечевых ремней к крановой балке.

7

Нажмите вниз рукоятку для перемещения и правильно прикрепите зажимы ножных ремней, проходящих под бедрами, к крановой балке.

8

Подъем и перемещение пациента.