

Maxi 500



Anheben aus der Sitzposition


1



Legen Sie den Gurt so um den Pflegebedürftigen, dass die Unterkante des Gurts etwas unterhalb des Steißbeins liegt.

Ziehen Sie bei Gurten mit Kopfstütze diese so weit nach oben, dass sie bis über den Kopf des Pflegebedürftigen reicht.

2

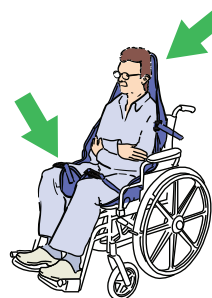

Ziehen Sie jedes Bein-Befestigungsband unter den Oberschenkel, so dass es sich an der Innenseite des Oberschenkels hervorziehen lässt. Legen Sie den Gurt flach am Bein des Patienten/Bewohners an und achten Sie darauf, dass er nicht verdreht oder überlagert ist.

Bringen Sie den Lifter an den Pflegebedürftigen heran.

Bringen Sie die Aufhängung in die Sitzposition.


Bringen Sie die Aufhängung auf oder unmittelbar unter der Schulterhöhe des Bewohners/Patienten an.

Positionieren Sie die Aufhängung nahe genug, um die Schulter-Befestigungsbänder daran einhängen zu können.

3




Netz-Clipgurt

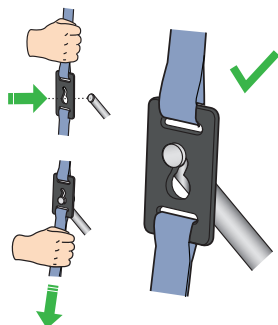

Den Clip an der Öse anbringen und sichern, bevor der Patient/Bewohner gehoben wird.




Schlaufengurt

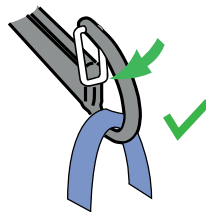

Haken Sie die Befestigungsschleife in den Aufnahmehaken ein. Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsverriegelungen geschlossen sind und das Gurt-Befestigungsband sich vollständig im Haken befindet.

4

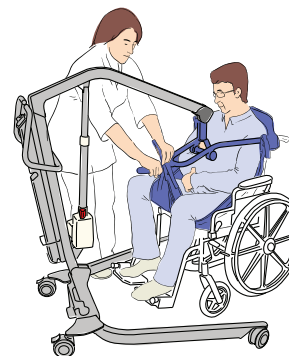

Bringen Sie die Gurtschlaufen an der Aufhängung an. Befestigen Sie die Befestigungsbänder: erst für die Schulter, dann für die Beine.

Neigen Sie bei der DPS-Aufhängung und dem Netz-Clipgurt die Aufhängung zum Anbringen der Beinclips.

Heben Sie den Patienten/Bewohner an und bringen Sie ihn in eine halb zurückgelehnte Position für den Transfer. Beginnen Sie den Transfer.

Senken Sie ihn auf den gewünschten Zielort ab. Wenn das gesamte Körpergewicht aufliegt, hängen Sie die Befestigungsschlaufen bzw. -clips aus.

Anheben von einem Bett

1



Drehen Sie den Pflegebedürftigen auf die Seite. Falten Sie den Gurt in der Mitte und legen Sie ihn am Rücken des Patienten entlang auf das Bett.

Ziehen Sie bei Gurten mit Kopfstütze diese so weit nach oben, dass sie bis über den Kopf des Pflegebedürftigen reicht.

2




Wenn Sie den Pflegebedürftigen auf den Gurt zurückdrehen, rollen Sie ihn über den Gurt hinaus in die andere Richtung, sodass der umgeschlagene Teil des Gurts ausgebreitet werden kann.


Bringen Sie den Lifter an den Pflegebedürftigen heran.

Bringen Sie die Aufhängung in die zurückgelehnte Position.


Positionieren Sie die Aufhängung nahe genug, um die Schulter-Befestigungsbänder daran einhängen zu können.


3

 Netz-Clipgurt

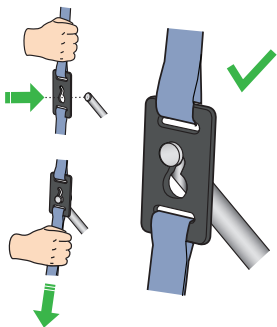

Den Clip an der Öse anbringen und sichern, bevor der Patient/Bewohner gehoben wird.

 Schlaufengurt

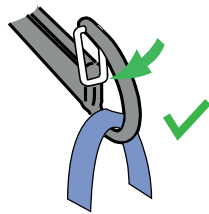

Haken Sie die Befestigungsschleife in den Aufnahmehaken ein. Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsverriegelungen geschlossen sind und das Gurt-Befestigungsband sich vollständig im Haken befindet.

4



Bringen Sie die Gurtschleifen an der Aufhängung an. Befestigen Sie die Befestigungsbänder: erst für die Schulter, dann für die Beine.

Heben Sie den Patienten/Bewohner in eine halb zurückgelehnte Position für den Transfer. Beginnen Sie den Transfer.

Senken Sie ihn auf den gewünschten Zielort ab. Wenn das gesamte Körpergewicht aufliegt, hängen Sie die Befestigungsschleifen bzw. -clips aus.

Anheben vom Fußboden

1



Drehen Sie den Pflegebedürftigen auf die Seite. Falten Sie den Gurt in der Mitte und legen Sie ihn am Rücken des Patienten/Bewohners entlang auf den Boden.

Ziehen Sie bei Gurten mit Kopfstütze diese so weit nach oben, dass sie bis über den Kopf des Pflegebedürftigen reicht.

2



Wenn Sie den Pflegebedürftigen auf den Gurt zurückdrehen, rollen Sie ihn über den Gurt hinaus in die andere Richtung, sodass der umgeschlagene Teil des Gurts ausgebreitet werden kann.


Schieben Sie den Lifter mit dem geöffneten Fahrgestellteil an den Patienten/Bewohner heran.

Positionieren Sie die Aufhängung nahe genug, um die Schulter-Befestigungsbänder daran einhängen zu können.

3




Netz-Clipgurt

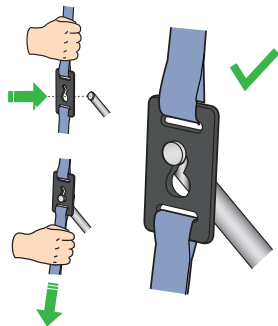

Den Clip an der Öse anbringen und sichern, bevor der Patient/Bewohner gehoben wird.




Schlaufengurt

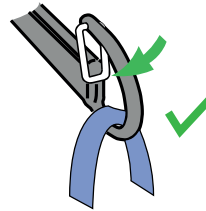

Haken Sie die Befestigungsschleife in den Aufnahmehaken ein. Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsverriegelungen geschlossen sind und das Gurt-Befestigungsband sich vollständig im Haken befindet.

4

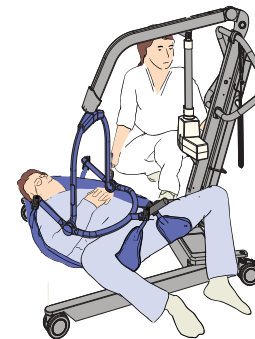

Bringen Sie die Gurtschlaufen an der Aufhängung an. Befestigen Sie zuerst die Schulter-Befestigungsbänder mit dem offenen Gurtteil und danach die Clips oder Schlaufen des Bein-Befestigungsbands, wobei die Aufhängung nach unten und den Schultern des Patienten/Bewohners zugewendet ist.

Heben Sie den Patienten/Bewohner in eine halb zurückgelehnte Position für den Transfer. Beginnen Sie den Transfer.

Senken Sie ihn auf den gewünschten Zielort ab. Wenn das gesamte Körpergewicht aufliegt, hängen Sie die Befestigungsschlaufen bzw. -clips aus.

