

Maxi 500



Levantar desde la posición sentada


1



Coloque el arnés alrededor del paciente de tal forma que la base del arnés se asiente ligeramente por debajo del coxis.

Si el arnés tiene soporte para la cabeza, extiéndalo hasta la parte superior de la cabeza del paciente.

2

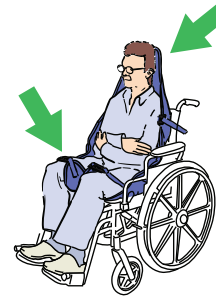

Tire de las correas de las piernas para que pasen por debajo, de modo que salgan al otro lado por la parte interior de los muslos. Coloque el arnés plano contra las piernas del paciente, sin retorcerlo o plegarlo.


Acerque al paciente con la grúa.

Coloque el bastidor en la posición sentada.


Coloque el bastidor a nivel del hombro o justo por debajo de este.

Coloque el bastidor lo suficientemente cerca para poder conectar las correas de los hombros.

3

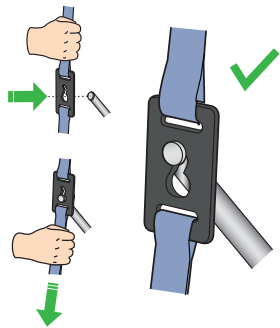


Acople y fije el clip en la orejeta antes de levantar al paciente.

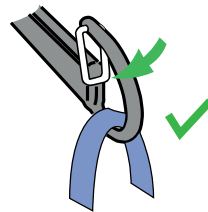

Inserte el bucle de sujeción en el gancho. Asegúrese de que los cierres de seguridad y la correa del arnés estén completamente dentro del gancho.

4

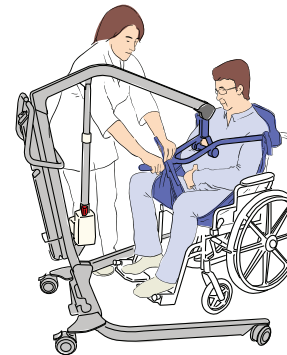

Fije los clips o los bucles del arnés al bastidor. Cierre las correas de los hombros, y después las de las piernas.

Para el bastidor DPS con arnés de clips, incline el bastidor para enganchar los clips de las piernas.

Levante al paciente y colóquelo en posición semirreclinada para realizar el traslado. Proceda con el traslado.

Baje al paciente hasta su nueva posición. Cuando el peso del cuerpo esté totalmente apoyado, retire los bucles o clips.

Levantar desde la cama

1



Vuelva al paciente sobre su costado. Doble el arnés por la mitad y póngalo sobre la cama, a lo largo de la espalda del paciente.

Si el arnés tiene soporte para la cabeza, extiéndalo hasta la parte superior de la cabeza del paciente.

2



Vuelva el paciente de nuevo sobre el arnés, y luego en la dirección opuesta, de modo que pueda estirarse la parte plegada del arnés.

Acerque al paciente con la grúa.


Coloque el bastidor en posición reclinada.

Coloque el bastidor lo suficientemente cerca para poder conectar las correas de los hombros.

3




Arnés de clips

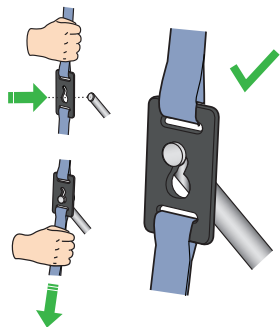

Acople y fije el clip en la orejeta antes de levantar al paciente.



Arnés de bucles

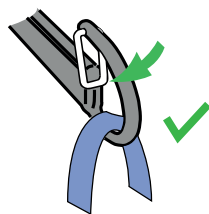

Inserte el bucle de sujeción en el gancho. Asegúrese de que los cierres de seguridad y la correa del arnés estén completamente dentro del gancho.

4



Conecte los clips o bucles del arnés al bastidor. Cierre las correas de los hombros, y después las de las piernas.

Levante al paciente y colóquelo en posición semirreclinada para realizar el traslado. Proceda con el traslado.

Baje al paciente hasta su nueva posición. Cuando el peso del cuerpo esté totalmente apoyado, retire los bucles o clips.

Levantar desde el suelo

1



Vuelva al paciente sobre su costado. Doble el arnés por la mitad y póngalo en el suelo, a lo largo de la espalda del paciente.

Si el arnés tiene soporte para la cabeza, extiéndalo hasta la parte superior de la cabeza del paciente.

2



Vuelva el paciente de nuevo sobre el arnés, y luego en la dirección opuesta, de modo que pueda estirarse la parte plegada del arnés.


Acérquese al paciente con la grúa, con la parte abierta del chasis.

Coloque el bastidor lo suficientemente cerca para poder conectar las correas de los hombros.

3




Arnés de clips

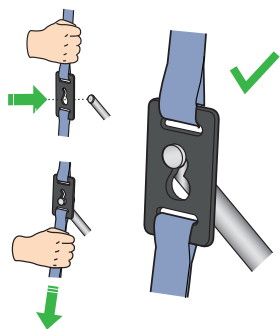

Acople y fije el clip en la orejeta antes de levantar al paciente.




Arnés de bucles

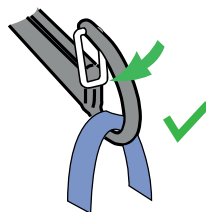

Inserte el bucle de sujeción en el gancho. Asegúrese de que los cierres de seguridad y la correa del arnés estén completamente dentro del gancho.

4

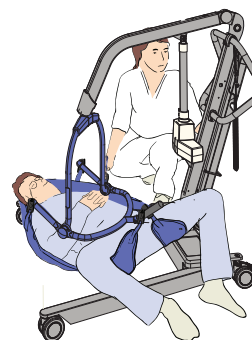

Conecte los clips o bucles del arnés al bastidor. Sujete las correa de los hombros y, con la parte abierta del bastidor de soporte del arnés orientado abajo hacia los hombros, conecte los clips o bucles de la correa de las piernas.

Levante al paciente y colóquelo en posición semirreclinada para realizar el traslado. Proceda con el traslado.

Baje al paciente hasta su nueva posición. Cuando el peso del cuerpo esté totalmente apoyado, retire los bucles o clips.

