

# Maxi Sky 1000

## Anheben aus der Sitzposition




1



Legen Sie den Gurt um den Pflegebedürftigen, wobei sich die Unterkante des Gurts etwas unterhalb des Steißbeins befindet.

Ziehen Sie bei Gurten mit Kopfstütze diese so weit nach oben, dass sie bis über den Kopf des Pflegebedürftigen reicht.

2

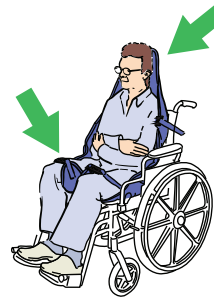

Ziehen Sie jedes Bein-Befestigungsband unter den Oberschenkel, so dass es sich an der Innenseite des Oberschenkels hervorziehen lässt.



Bringen Sie den Lifter an den Pflegebedürftigen heran.

Bringen Sie die Aufhängung in die Sitzposition.

Bringen Sie die Aufhängung auf oder unmittelbar unter der Schulterhöhe des Pflegebedürftigen an.

Positionieren Sie die Aufhängung nahe genug, um die Schulter-Befestigungsbänder daran einhängen zu können.


3

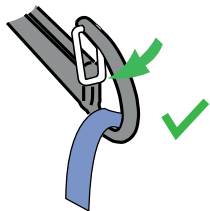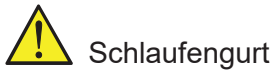

Haken Sie die Befestigungsschleufe in den Aufnahmehaken ein.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsverriegelungen geschlossen sind und das Gurt-Befestigungsband sich vollständig im Haken befindet.

4

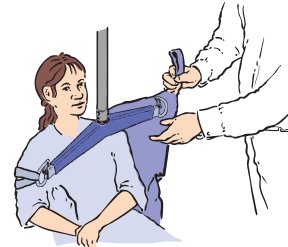

Bringen Sie die Gurtschleifen an der Aufhängung an. Befestigen Sie die Befestigungsbänder: erst für die Schulter, dann für die Beine.

Heben Sie den Pflegebedürftigen und beginnen Sie mit dem Transfer.

Senken Sie ihn auf den gewünschten Zielort ab. Wenn das gesamte Körpergewicht aufliegt, hängen Sie die Befestigungsschleifen aus.

## Transfer aus der Rückenlage

1



Drehen Sie den Pflegebedürftigen auf die Seite. Falten Sie den Gurt in der Mitte und legen Sie ihn am Rücken des Pflegebedürftigen entlang auf das Bett.

Ziehen Sie bei Gurten mit Kopfstütze diese so weit nach oben, dass sie bis über den Kopf des Pflegebedürftigen reicht.

2

Wenn Sie den Pflegebedürftigen auf den Gurt zurückdrehen, rollen Sie ihn über den Gurt hinaus in die andere Richtung, sodass der umgeschlagene Teil des Gurts ausgebreitet werden kann.


Bringen Sie den Lifter an den Pflegebedürftigen heran.

Positionieren Sie die Aufhängung nahe genug, um die Schulter-Befestigungsbänder daran einhängen zu können.

3



Schlaufengurt

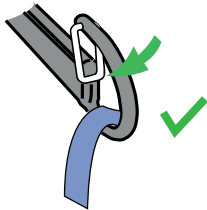

Haken Sie die Befestigungsschleife in den Aufnahmehaken ein.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsverriegelungen geschlossen sind und das Gurt-Befestigungsband sich vollständig im Haken befindet.

4


Befestigen Sie die Gurtschlaufen an der Aufhängung. Befestigen Sie die Befestigungsbänder: erst für die Schulter, dann für die Beine.

Heben Sie den Pflegebedürftigen und beginnen Sie mit dem Transfer.

Senken Sie ihn auf den gewünschten Zielort ab. Wenn das gesamte Körpergewicht aufliegt, hängen Sie die Befestigungsschlaufen aus.

## Anheben aus der Sitzposition – Gebrauch der bariatrischen Gurte

1

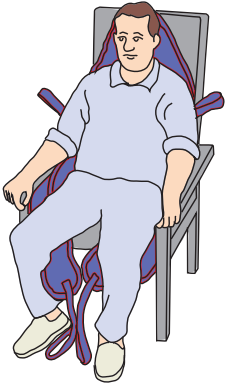

Legen Sie den Gurt um den Pflegebedürftigen, wobei sich die Unterkante des Gurts etwas unterhalb des Steißbeins befindet.


Ziehen Sie bei Gurten mit Kopfstütze diese so weit nach oben, dass sie bis über den Kopf des Pflegebedürftigen reicht.

Ziehen Sie jedes Bein-Befestigungsband unter den Oberschenkel, so dass es sich an der Innenseite des Oberschenkels hervorziehen lässt.

2




Schlaufengurt

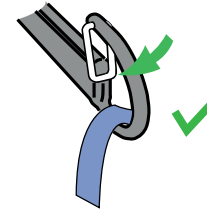

Haken Sie die Befestigungsschleife in den Aufnahmehaken ein.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsverriegelungen geschlossen sind und das Gurt-Befestigungsband sich vollständig im Haken befindet.

3

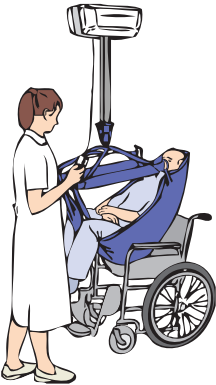

Bringen Sie die Gurtschlaufen an der Aufhängung an.

Heben Sie den Pflegebedürftigen in eine halb zurückgelehnte Position für den Transfer.

Beginnen Sie den Transfer.

4



Senken Sie ihn auf den gewünschten Zielort ab. Wenn das gesamte Körpergewicht aufliegt, hängen Sie die Befestigungsschlaufen aus.

## Transfer aus der Rückenlage – Gebrauch der bariatrischen Gurte

1



Drehen Sie den Pflegebedürftigen auf die Seite. Falten Sie den Gurt in der Mitte und legen Sie ihn am Rücken des Pflegebedürftigen entlang auf das Bett.

Ziehen Sie bei Gurten mit Kopfstütze diese so weit nach oben, dass sie bis über den Kopf des Pflegebedürftigen reicht.

2



Wenn Sie den Pflegebedürftigen auf den Gurt zurückdrehen, rollen Sie ihn über den Gurt hinaus in die andere Richtung, sodass der umgeschlagene Teil des Gurts ausgebreitet werden kann.


Bringen Sie den Lifter an den Pflegebedürftigen heran.

Positionieren Sie die Aufhängung nahe genug, um die Schulter-Befestigungsbänder daran einhängen zu können.

3



Schlaufengurt

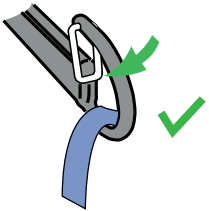

Haken Sie die Befestigungsschleife in den Aufnahmehaken ein.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsverriegelungen geschlossen sind und das Gurt-Befestigungsband sich vollständig im Haken befindet.

4

Befestigen Sie die Gurtschlaufen an der Aufhängung.

Die Befestigungsbänder müssen unter die Oberschenkel des Pflegebedürftigen gebracht werden. Hierzu kann es erforderlich sein, die Beine einzeln anzuheben und die Aufhängung noch etwas weiter zu senken.

Heben Sie den Pflegebedürftigen in eine halb zurückgelehnte Position für den Transfer.

Senken Sie ihn auf den gewünschten Zielort ab. Wenn das gesamte Körpergewicht aufliegt, hängen Sie die Befestigungsschlaufen aus.