

# Maxi Sky 1000

## Lyft från sittposition




1



Placera selen runt patienten med selens nedre del alldeles under svansbenet.

Sele med huvudstöd ska nå till patientens hjässa.

2

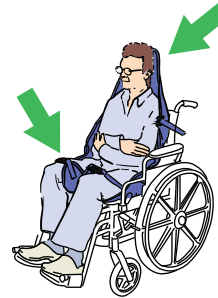

Dra respektive benrem under patientens lår så att de syns på insidan av låret.

Närma dig patienten med taklyften.

Placera lyftbygel i sittposition.


Placera lyftbygel i axelhöjd eller strax nedanför.

Placera lyftbygel så nära att det går att sätta fast axelremmarna.

3




Sele med öglor

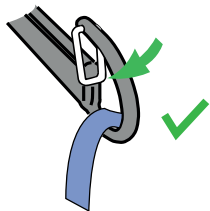

Placera fästöglan på kroken.

Kontrollera att säkerhetsspärrarna är stängda och att selens rem är införd hela vägen i kroken.

4

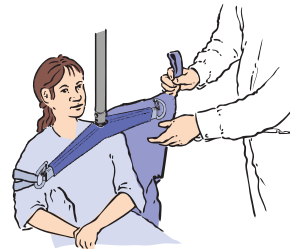

Fäst selens öglor vid lyftbygel. Fäst axelremmarna och sedan benremmarna.

Lyft upp patienten och fortsätt förflyttningen.

Sänk ned på den nya platsen. Lossa öglorna när hela kroppsvikten bärs upp av underlaget.

## Flytta från liggande ställning

1



Rulla över patienten på sidan. Vik selen på mitten och placera den på sängen längs patientens rygg.

Sele med huvudstöd ska nå till patientens hjässa.

2


Vänd tillbaka patienten på selen och vänd sedan tillbaka patienten i motsatt riktning så att den vikta delen av selen kan rätas ut.

Närma dig patienten med taklyften.

Placera lyftbygeln så nära att det går att sätta fast axelremmarna.

3

 Sele med öglor

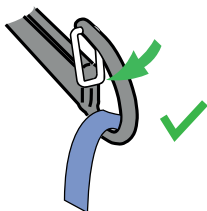

Placera fästöglan på kroken.

Kontrollera att säkerhetspärrarna är stängda och att selens rem är införd hela vägen i kroken.

4


Fäst selens öglor vid lyftbygeln.  
Fäst axelremmarna och sedan benremmarna.

Lyft upp patienten och fortsätt förflyttningen.

Sänk ned på den nya platsen. Lossa öglorna när hela kroppsvikten bärs upp av underlaget.

## Lyft från sittposition – användning av bariatrisk sele

1

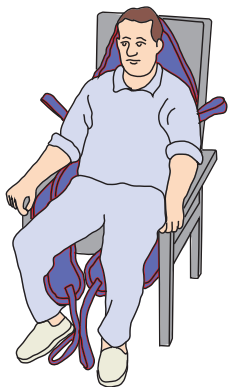

Placera selen runt patienten med selens nedre del alldeles under svansbenet.


Sele med huvudstöd ska nå till patientens hjässa.

Dra respektive benrem under patientens lår så att de syns på insidan av låret.

2




Sele med öglor

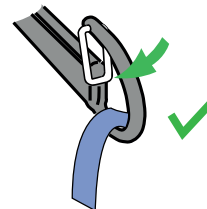

Placera fästöglan på kroken.

Kontrollera att säkerhetspärrarna är stängda och att selens rem är införd hela vägen i kroken.

3

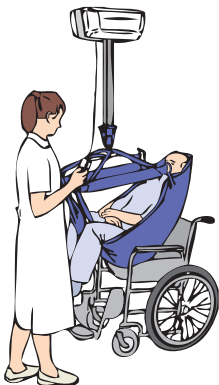

Fäst selens öglor vid lyftbygeln.

Höj upp patienten i halvsittande ställning inför förflyttningen.

Fortsätt med förflyttningen.

4



Sänk ned på den nya platsen.  
Lossa öglorna när hela kroppsvikten bärs upp av underlaget.

## Förflyttning från liggande ställning – användning av bariatrisk sele

1



Rulla över patienten på sidan. Vik selen på mitten och placera den på sängen längs patientens rygg.

Sele med huvudstöd ska nå till patientens hjässa.

2




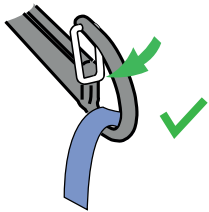
Vänd tillbaka patienten på selen och vänd sedan tillbaka patienten i motsatt riktning så att den vikta delen av selen kan rätas ut.

Närma dig patienten med taklyften.

Placera lyftbygeln så nära att det går att sätta fast axelremmarna.

3

 Sele med öglor



Placera fästöglan på kroken.

Kontrollera att säkerhetsspärrarna är stängda och att selens rem är införd hela vägen i kroken.

4

Fäst selens öglor vid lyftbygeln.

Remmarna måste dras in under låren. Därför kan man behöva lyfta ett ben åt gången, och lyftbygeln kan behöva sänkas ned ett litet stycke till.

Höj upp patienten i halvsittande ställning inför förflyttningen.

Sänk ned på den nya platsen. Lossa öglorna när hela kroppsvikten bärs upp av underlaget.