

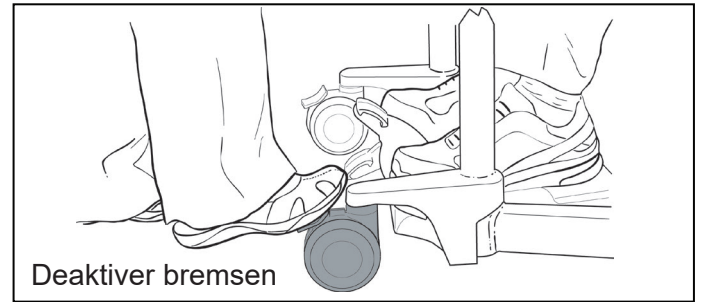
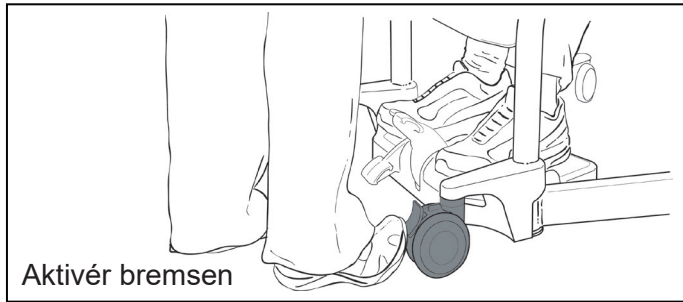




Aktivering og deaktivering af bremse

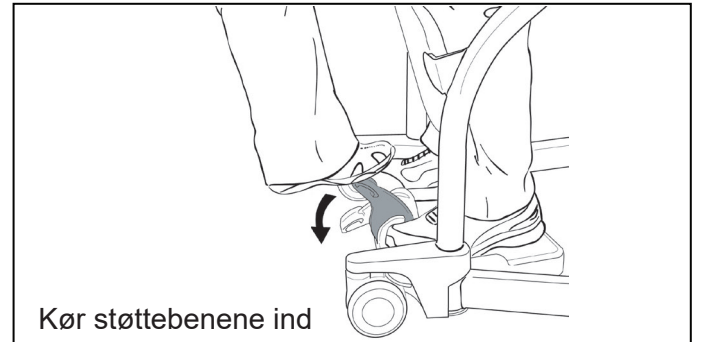



Ud- og indkøring af støtteben

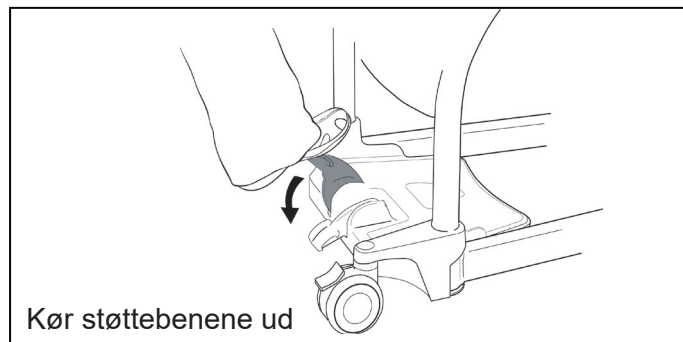

Drejning af puderne

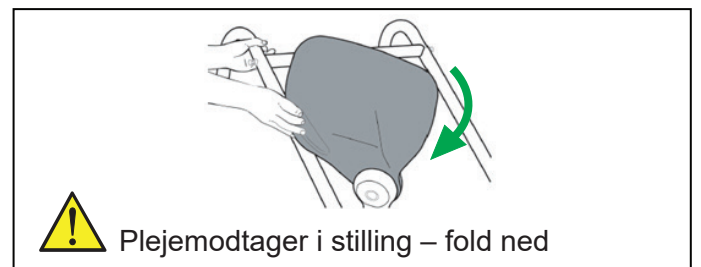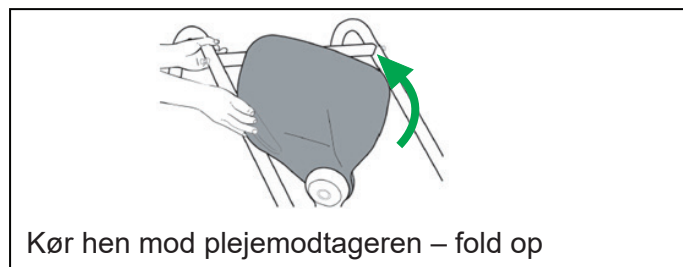

Fastgørelsespunkter til sejlet

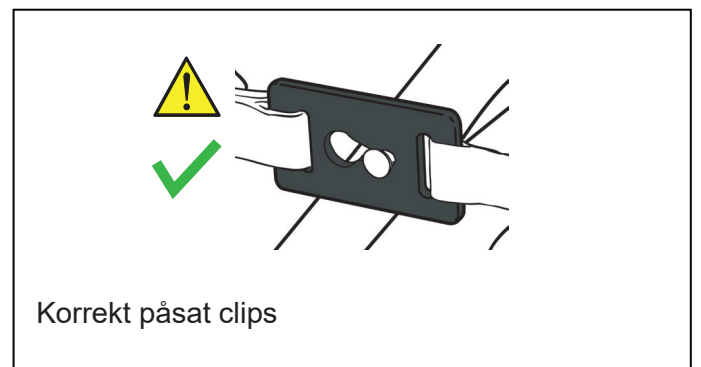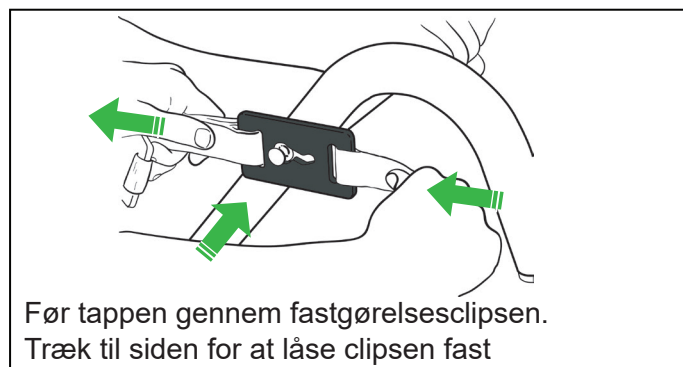

Rengøring og desinfektion

Aftør med en klud fugtet med varmt vand og et desinficerende rengøringsmiddel.

Der kan også benyttes desinficerende servietter, der er imprægneret med en 70 % v/v-opløsning af isopropylalkohol. Hvis der bruges servietter, skal liften aftørres grundigt.

Der må ikke bruges fenol, klor eller andre typer opløsningsmidler, som kan beskadige overfladebehandlingen.