

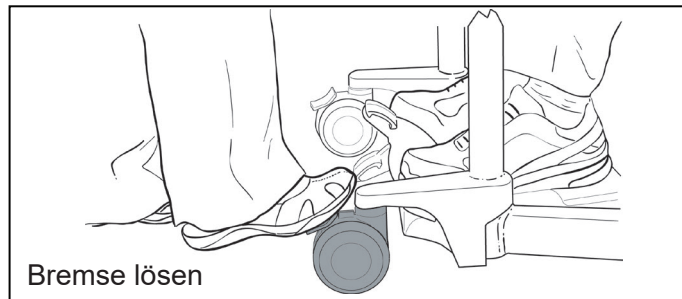
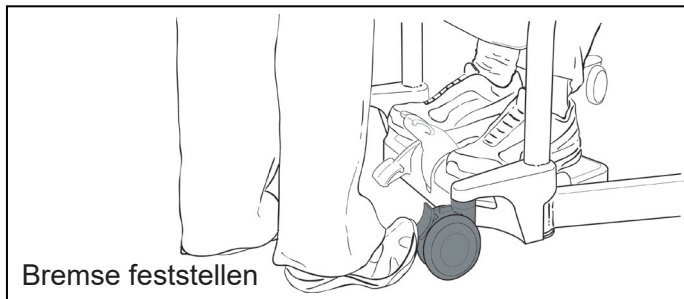




Bremse feststellen und lösen

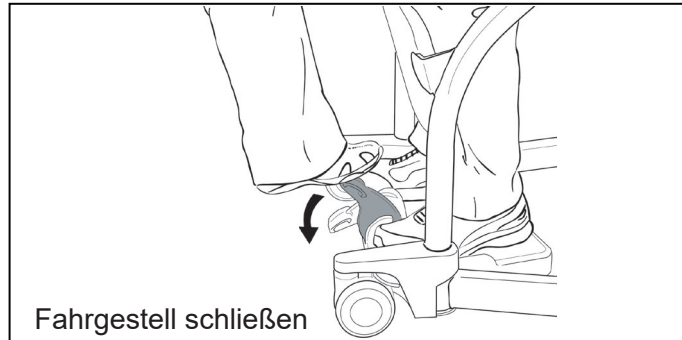



Fahrgestell öffnen und schließen

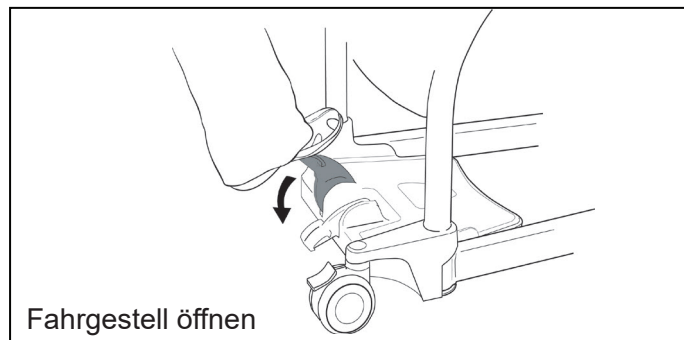

Schwenkbare Polster

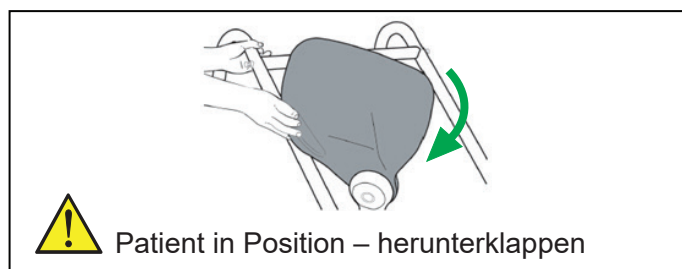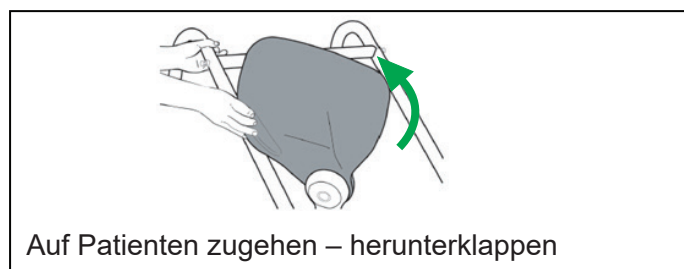

Gurtbefestigungspins

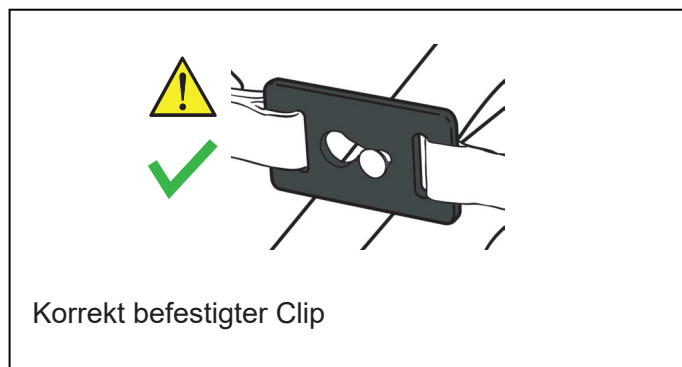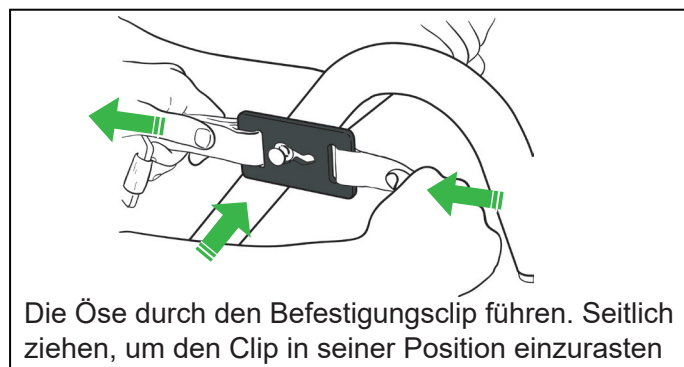

Reinigung und Desinfektion

Mit einem feuchten Tuch mit warmem Wasser und einem Desinfektionsreiniger abwischen.

Es können auch Desinfektionstücher, die mit einer 70-prozentigen Isopropylalkohollösung getränkt sind, benutzt werden. Bei der Verwendung von Desinfektionstüchern kräftig reiben.

Benutzen Sie kein Phenol, Chlor oder andere Arten von Lösungsmitteln, weil dadurch die Oberfläche des Produkts angegriffen werden könnte.