


Maxi Air



Användning och kontroller

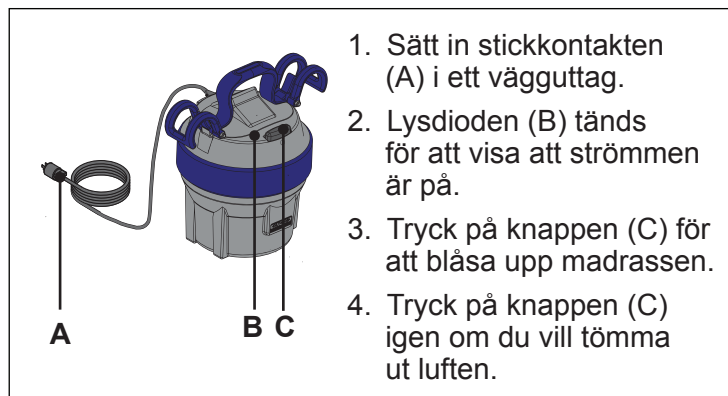


1. Sätt in stickkontakten (A) i ett vägguttag.
2. Lysdioden (B) tänds för att visa att strömmen är på.
3. Tryck på knappen (C) för att blåsa upp madrassen.
4. Tryck på knappen (C) igen om du vill tömma ut luften.

Stickkontakt

Om inget händer när du trycker på knappen på luftförsörjningsenheten ska du avbryta uppblåsningen genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Kontakta behörig personal om ett fel uppstår.

Placering av luftförsörjningen

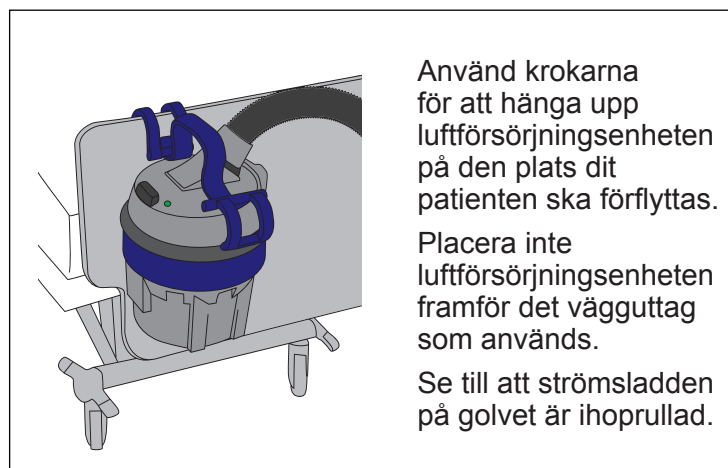


Använd krokarna för att hänga upp luftförsörjningsenheten på den plats dit patienten ska förflyttas.

Placera inte luftförsörjningsenheten framför det vägguttag som används.

Se till att strömsladden på golvet är ihoprullad.

Placering av luftförsörjningsenheten med tillvalet förlängd slang

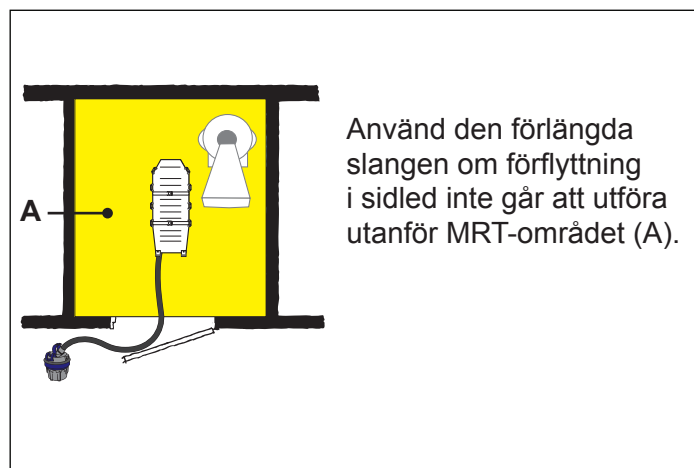

Använd den förlängda slangen om förflyttning i sidled inte går att utföra utanför MRT-området (A).


Ansluta luftförsörjningen och madrassen



1
Anslut luftslangen från luftförsörjningsenheten till madrassens anslutningspunkt (vänster eller höger).



2
Koppla ihop luftslangens snäpplås med madrassens snäpplås.

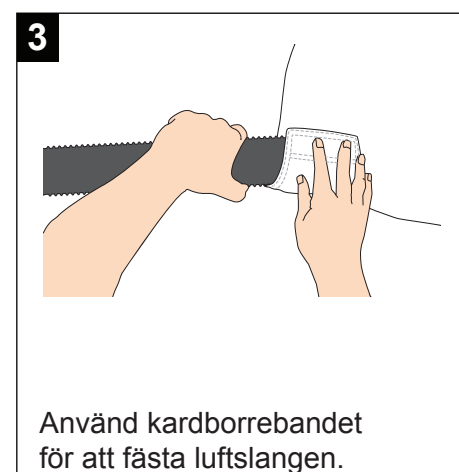

3
Använd kardborrebandet för att fästa luftslangen.

Rengöring och desinficering

Ta bort synliga rester

1. Koppla loss luftförsörjningsenheten från strömförsörjningen och luftslangen från madrassen.
2. Lossa luftslangen från luftförsörjningsenheten.
3. Täpp till utloppet på luftförsörjningsenheten med en trasa eller engångsduk för att förhindra att fukt, vatten eller rengöringsvätska tränger in.
4. Rengör luftförsörjningsenheten och slangen från synliga rester med en trasa eller en mjuk borste och vatten, eller spreja med vatten och torka av med en ren trasa. Rengör enheten uppifrån och ned.

Rengör

5. Spraya rengöringsvätska på luftförsörjningsenheten. Använd en borste eller en trasa för att ta bort eventuella avlagringar.
6. Använd en ny våt trasa för att torka bort alla spår av rengöringsvätska, eller spreja med vatten och torka av med en ren trasa. Trasan ska regelbundet sköljas under rinnande vatten.
7. Rulla ihop luftslangen och sänk ned den i rengöringsvätska. Skrubba slangen med en borste. Skölj luftslangen med vatten (ca 25 °C eller 77 °F) för att avlägsna rengöringsvätskan.

Desinficering

8. Spraya desinficeringsmedel på luftförsörjningsenheten. Låt desinficeringsmedlet verka så länge som anges i instruktionerna på flaskan med desinficeringsmedlet.
9. Rulla ihop luftslangen och sänk ned den i ny rengöringsvätska. Låt desinficeringsmedlet verka så länge som anges i instruktionerna på flaskan med desinficeringsmedlet.
10. Använd en ny våt trasa för att torka bort alla spår av rengöringsvätska från luftförsörjningsenheten, eller spreja med vatten och torka av med en ren trasa. Trasan ska regelbundet sköljas under rinnande vatten.
11. Skölj luftslangen med vatten (ca 25 °C eller 77 °F) för att avlägsna rengöringsvätskan.
12. Häng upp luftslangen för att tömma den på vatten och låt både luftslangen och luftförsörjningen lufttorka.