

Maxi Air



Forflytning

1

Aktivér bremserne (A) på sengen.

2

Der skal være plejepersonale på hver side af plejemodtageren. Anbring Maxi Air-madrassen under plejemodtageren (mærkater skal vende opad).

3

Placer plejemodtageren (A) midt på madrassen.
Anbring plejemodtagerens hoved 150 mm (6") (B) fra toppen.
Sørg for, at plejemodtageren ikke rager ud over afgrænsningerne (C).

4

Fastgør sikkerhedsseleer løst.

5

Justér destinationsoverfladen til en ergonomisk højde. Aktivér bremserne på begge senge.

6

Løft og lås sengehesten (A) på destinationsoverfladen. Juster udgangsoverfladens højde, så den er en smule højere end destinationsoverfladen.

7

Hæng luftforsyningen på destinations-sengen, og sæt ledningen i stikkontakten. Forbind luftslangen med madrassen.

8

Plejepersonale på udgangsside: Hold godt fast i forflytningshåndtagene under oppumpningen af madrassen.

Plejepersonale på destinationside: Tænd for luftforsyningen, og pump madrassen op.


Fortsæt med trinnene på næste side

9



Sørg for, at plejemodtageren ikke kan mærkes af plejepersonalet, når der skubbes under madrassen.


10

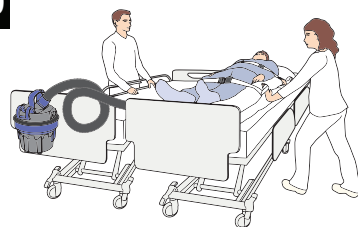

Plejepersonale på udgangsside:

Stram sikkerhedsselerne, og skub madrassen fast imod destinationsoverfladen.


11

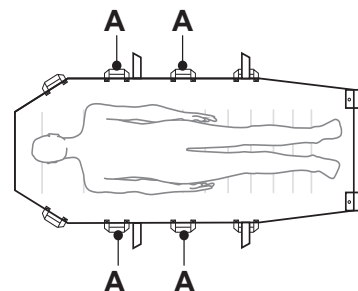

BEMÆRK


Anvend de håndtag (A), der er tættest på den bredeste del af plejemodtageren.

12

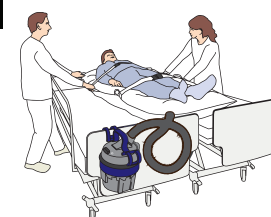

Plejepersonale på destinationsside: Tilpas placeringen af madrassen, når den er halvvejs inde over destinationsoverfladen. Sørg for, at madrassen er centreret.


13

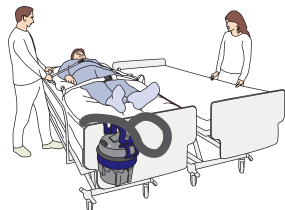

Plejepersonale på udgangsside: Sluk for luftforsyningen, og kobl slangen fra madrassen.

Plejepersonale på destinationsside: Hold godt fast i håndtagene, indtil madrassen er tømt fuldstændigt for luft.

14

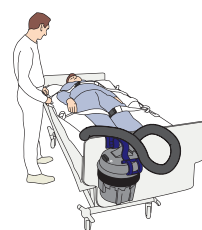

Når forflytningen er gennemført:

- spænd sikkerhedsselerne op
- lås sengehestene (hvis det er muligt)
- fjern og desinficér luftforsyningen.

