

# Maxi Air



## Förflyttning

**1**




Lås bromsarna (A) på sängen.

**2**




En vårdpersonal ska stå på var sida om patienten. Placera Maxi Air-madrassen under patienten (etiketterna uppåt).

**3**

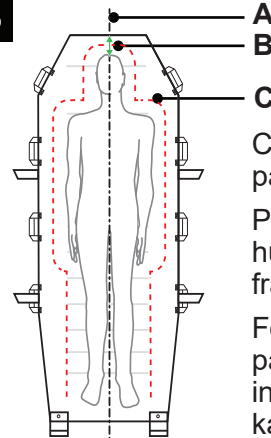

Centrera patienten (A) på madrassen.  
Placera patientens huvud 150 mm (6") från huvudändan.  
Försäkra dig om att patientens kropp inte sticker ut utanför kanterna (C).

**4**

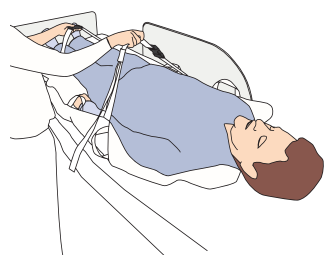


Spänn fast säkerhetsbältena löst.

**5**



Se till att den nya platsen (t.ex. en säng) befinner sig i ergonomisk arbetshöjd. Lås bromsarna på båda sängar.

**6**

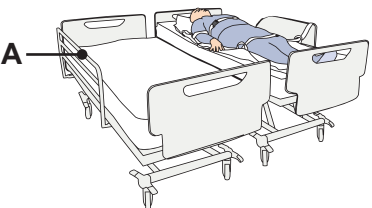

Fäll upp och lås sänggrindarna (A) på den säng dit patienten förflyttas. Se till att nuvarande plats hamnar på något högre nivå än den nya.

**7**



Häng upp luftförsörjningsenheten på den nya sängen och anslut strömkabeln. Anslut luftslangen till madrassen.


**8**

**Vårdpersonal - förflyttning:**  
håll ordentligt i transporthandtagen medan madrassen blåses upp.

**Vårdpersonal - mottagning:**  
sätt på luftförsörjningen och blås upp madrassen.


Fortsätt med stegen på nästa sida

9

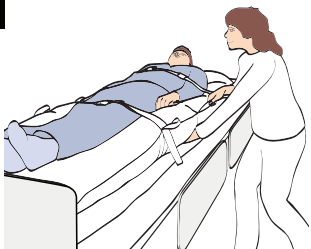


Se till att vårdpersonalen inte kan känna patientens kropp genom madrassen.

10

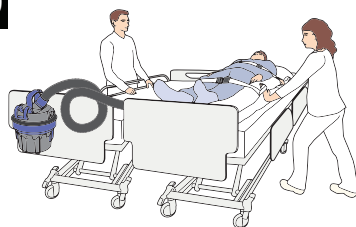

**Vårdpersonal - förflyttning:** dra åt säkerhetsbältena och skjut bestämt madrassen mot den nya platsen.


11

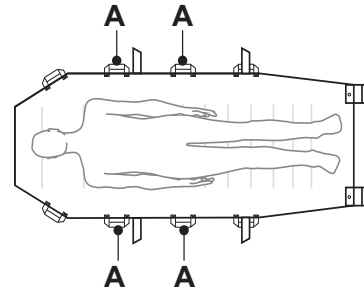

**OBS!**


Använd handtagen (A) som befinner sig närmast de bredaste delarna av patienten.

12

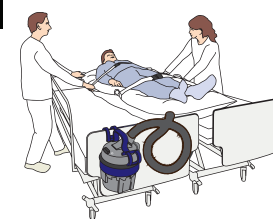

**Vårdpersonal - mottagning:** ta emot madrassen när den kommit halvvägs över till den nya platsen. Se till att madrassen är centrerad.


13

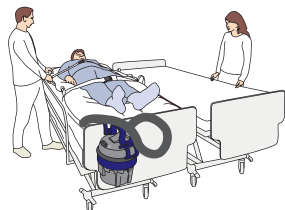

**Vårdpersonal - förflyttning:** stäng av luftförsörjningen och koppla loss luftslangen från madrassen.

**Vårdpersonal - mottagning:** behåll ett fast grepp om handtagen tills dess att madrassen är helt tömd på luft.

14

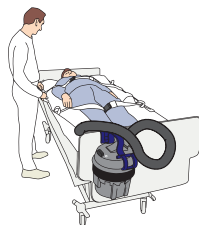

Efter förflyttningen:

- lossa säkerhetsbältena
- lås sidogrindarna (om möjligt)
- ta bort och desinficera lufttillförseln.

