

Maxi Sky 1000



WARNUNG



Immer eine Schutzbrille und Handschuhe tragen, um Augen- und Hautschäden zu vermeiden. Bei Berührung mit viel Wasser abspülen. Wenn Augen oder Haut gereizt sind, an einen Arzt wenden. Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung sowie das Sicherheitsdatenblatt des Desinfektionsmittels durch.

Vor jedem neuen Patienten reinigen und desinfizieren.

Notwendiges Zubehör:

- Schutzbrille und Schutzhandschuhe
- Einweglappen

1. Verwenden Sie ein mit Wasser getränktes Tuch, um sichtbare Rückstände vom Lifter und von dessen Zubehör, von oben nach unten, zu entfernen.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch (warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel) von oben nach unten ab, um alle sichtbaren Rückstände zu entfernen.
3. Spülen Sie sämtliche Rückstände des Reinigungsmittels mit sauberem Wasser ab.
4. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

In den nachstehenden Bereichen ist die höchste Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein von Schmutz und Mikroben gegeben. Besonders zu beachten sind:

- Seitenkante der Handbedienung
- Rückseite der Handbedienung mit Griff
- Gelenk zwischen Aufhängung und Befestigungsband
- Rahmen und Polsterung der Aufhängung
- Verriegelung

Reinigen Sie die Innenseite der Schiene alle vier Monate, um die Lauffähigkeit der Rollen der Transportliege zu erhöhen. Setzen Sie hierfür ein feuchtes Tuch in die Schienenöffnung ein, und ziehen Sie es von einem Ende der Schiene zum anderen.

