

# Maxi Sky 1000



## VARNING



Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar för att undvika ögon- och hudskador. Vid kontakt, skölj med rikligt med vatten. Vid irriterade ögon eller irriterad hud, kontakta läkare. Läs alltid igenom bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet för desinficeringsmedlet.

Rengör och desinficera före ny patient.

Tillbehör som behövs:

- Skyddshandskar och skyddsglasögon
- Engångsduk

1. Använd en vattendränkt trasa för att ta bort synliga avlagringar från taklyften och dess tillbehör, uppifrån och ned.
2. Använd en fuktig trasa (varmvatten blandat med ett mildt rengöringsmedel) för att torka utrustningen uppifrån och ned och avlägsna alla synliga avlagringar.
3. Skölj bort allt kvarvarande rengöringsmedel med rent vatten.
4. Torka rent med en torr trasa.

Var särskilt uppmärksam på följande områden eftersom det är mest sannolikt att smuts och mikrober har ansamlats där:

- Handkontrollens kant
- Handkontrollens baksida och handtag
- Fogen mellan lyftbygel och rem
- Ram och stoppning – lyftbygel
- Spärrhake

För att vagnens hjul ska rulla så lätt som möjligt ska insidan av skenan rengöras var fjärde månad.

Detta görs genom att föra in en fuktig trasa i öppningen och skjuta den från ena sidan av skenan till den andra.

