

Maxi Sky 2



Transferencia desde posición sentada

1




Coloque el arnés alrededor del paciente. Si el arnés tiene soporte para la cabeza, extiéndalo hasta la parte superior de la cabeza del paciente.

2



Acerque la grúa. Ponga el bastidor a la altura de los hombros, lo suficientemente cerca para enganchar las correas de los hombros.

3

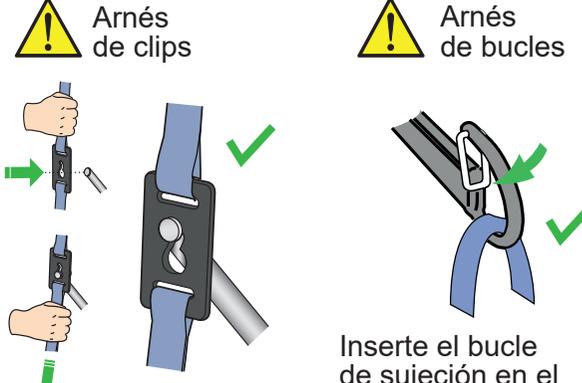

Arnés de clips
Acople y fije el clip en la orejeta antes de levantar al paciente.

Arnés de bucles
Inserte el bucle de sujeción en el gancho. Asegúrese de que el pestillo de seguridad esté cerrado.

4




Fije los clips o los bucles del arnés al bastidor.

5



Para el bastidor DPS con arnés de clips, incline el bastidor para enganchar los clips de las piernas.

6

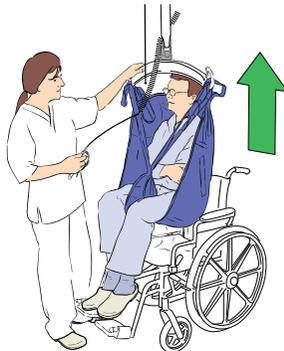

Levante al paciente.

7



Desplace al paciente.

8



Baje al paciente hasta que no haya tensión. Desenganche los bucles o los clips.

Transferencia desde posición supina

1




Coloque el arnés bajo el paciente y céntralo. Si el arnés tiene soporte para la cabeza, extiéndalo hasta la parte superior de la cabeza del paciente.

2




Coloque la grúa por encima del paciente.

3

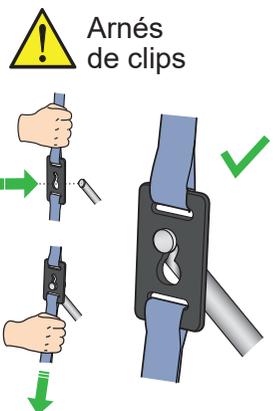

Acople y fije el clip en la orejeta antes de levantar al paciente.

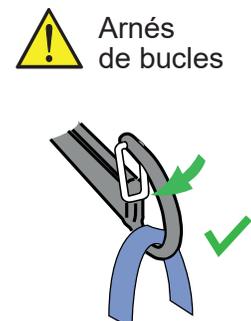


Inserte el bucle de sujeción en el gancho. Asegúrese de que el pestillo de seguridad esté cerrado.

4



Fije los clips o los bucles del arnés al bastidor. Cierre las correas de los hombros, y después las de las piernas.

5

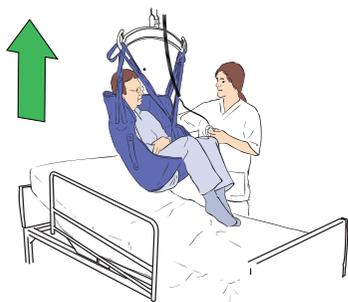


Levante al paciente.

6




Desplace al paciente.

7

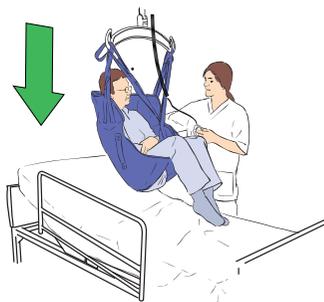

Baje al paciente hasta su nueva posición.

8

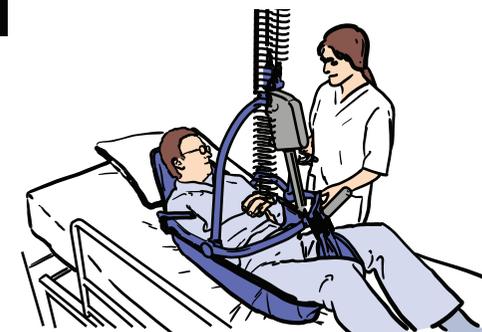

Cuando el peso del paciente esté totalmente apoyado, retire los bucles o los clips.

Recolocación: mover hacia el cabecero de la cama




Recolocación: girar en la cama




Transferencia del paciente en posición supina




Coloque el arnés bajo el paciente. Asegúrese de identificar correctamente el extremo de la cabeza del arnés.

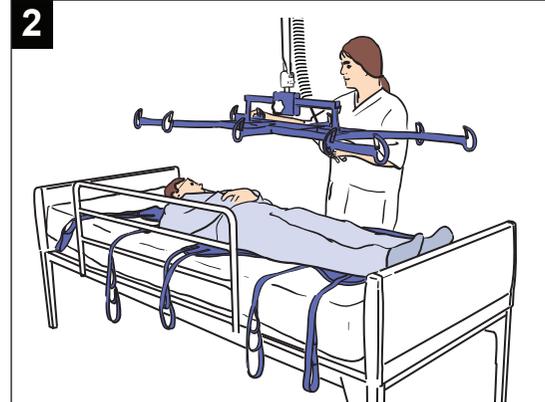


Coloque la grúa por encima del paciente.

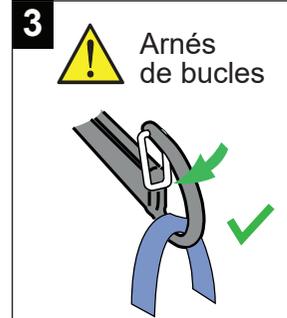


Inserte el bucle de sujeción en el gancho. Asegúrese de que el pestillo de seguridad esté cerrado.

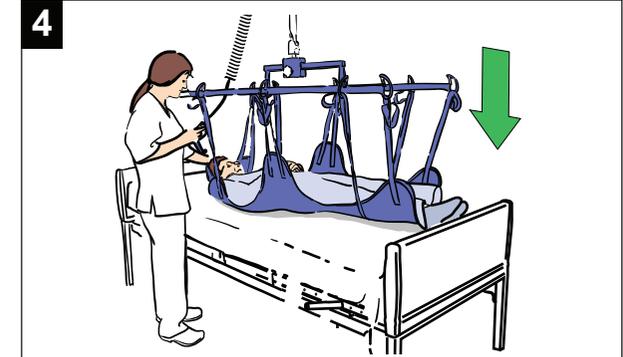


Baje con cuidado el bastidor de la camilla y alinee su centro con el ombligo del paciente. Enganche todos los bucles del arnés.

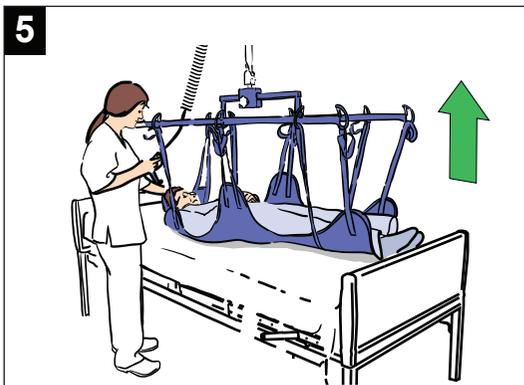


Levante y retire el paciente de la cama.

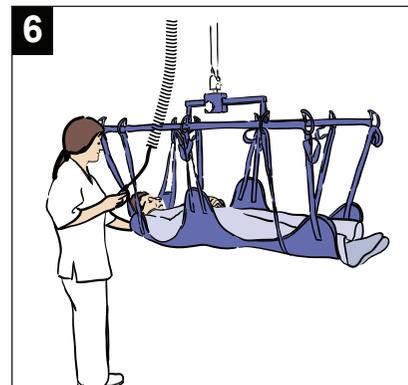

Transfiera al paciente.

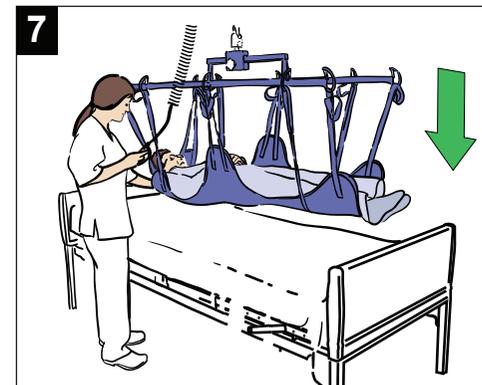

Baje al paciente hasta su nueva posición y desenganche todos los bucles.

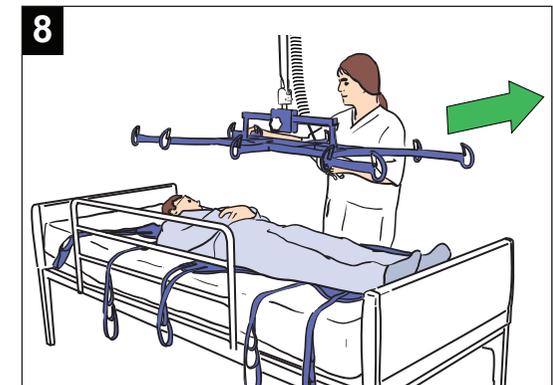

Aleje la estructura del paciente.