







# Maxi Sky 2




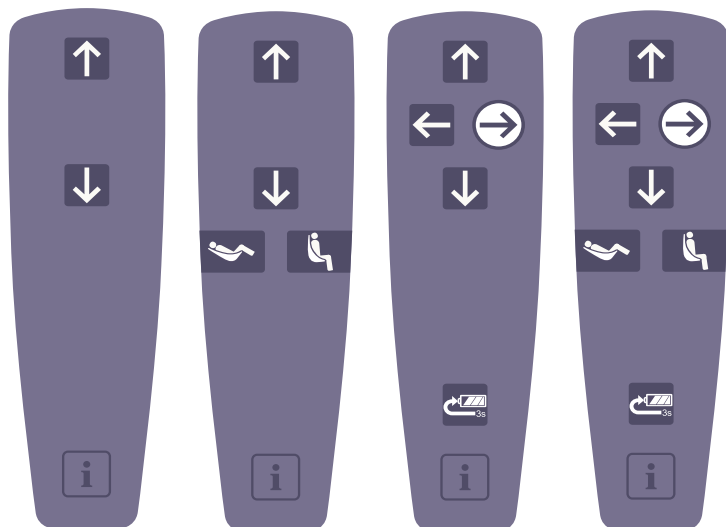



## Handbedienung

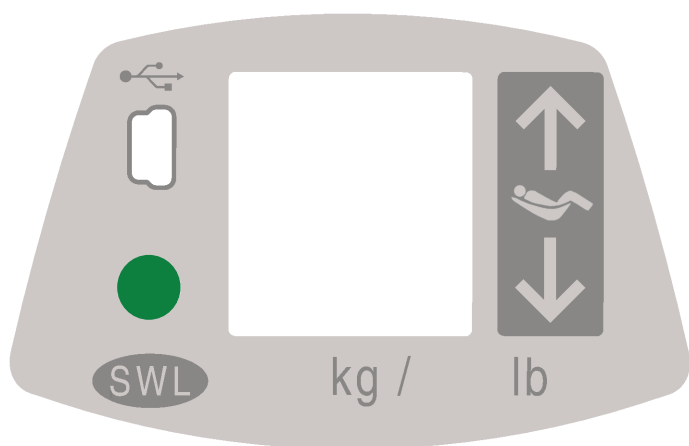

-  **Nach-oben-Taste**
-  **Nach-unten-Taste**
-  **Nach-rechts-Taste**
-  **Nach-links-Taste**
-  **Zurücklehnen-Taste**  
(nur elektrisch angetriebene DPS)
-  **Aufrichten-Taste**  
(nur elektrisch angetriebene DPS)
-  **RTC, Return To Charge**  
(Rückkehr zum Laden)
-  **RTH, Return to Home**  
(Rückkehr zur Grundposition)
-  **Programmierungs-/Informationstaste**

## Bedienfeld



-  **Nach-oben-/unten-Hilfstaste**  
Die Tasten Nach oben und Nach unten werden verwendet, um einen Transfer abzuschließen, falls beim Betrieb mit der Handbedienung ein Problem aufgetreten ist.
-  **Status-LED**  
Die LED dient der Ergänzung des Displays und macht darauf aufmerksam, dass auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt wird.
-  **SWL**  
Das Symbol bezieht sich auf die maximale Hubkapazität des Lifters.
-  **USB-Anschluss**  
Der USB-Anschluss ist ausschließlich für MAXISMART-Anwender vorgesehen.

## Display-Symbole



### Akkuladezustand



100%



75%

Normaler Betriebsbereich



50%



25% Niedrig

Dabei ertönt ein kurzer Signalton, wenn eine Taste gedrückt wird



< 5%

Kritisch

Symbole oszillieren, wobei alle zehn Sekunden zwei kurze Signaltöne zu hören sind



### Kontinuierliche Stromversorgung (ECS; Enhanced Charging System)

Wird beim Aufladen des Produkts mittels ECS angezeigt.



### Rückkehr zur Ladestation (RTC, Return To Charge)

Zeigt an, dass die RTC-Funktion per Handbedienung aktiviert wurde.



### Rückkehr zur Grundposition (RTH, Return to Home)

Zeigt an, dass die RTH-Funktion per Handbedienung aktiviert wurde.

PPP

### Vorprogrammierte Position (PPP)



Zeigt an, dass die PPP-Funktion per Handbedienung aktiviert wurde.



### Einschaltdauer überschritten („Over Duty Cycle“)

Blinkt, wenn der Lifter für einen langen Zeitraum im Einsatz war, ohne dass er zwischendurch abkühlen konnte.

Der Überhitzungsschutz wird aktiviert, wenn eine Funktion, bei der die Einschaltdauer überschritten wurde, deaktiviert wurde. Alle anderen Funktionen bleiben hingegen in Betrieb.

Das rote Lämpchen leuchtet während der Abkühlphase weiterhin, und ein einmaliger Signalton ertönt. Das Symbol verschwindet, sobald die Funktion sich abgekühlt hat und wieder einsatzbereit ist.



### Allgemeine Störung (Warnsymbol mit nachgestellter Ziffer)

Blinkt, wenn es beim Lifter zu einer Störung kommt.

Der Lifter muss von einem Servicetechniker inspiziert oder repariert werden.

Das rote Lämpchen leuchtet weiterhin, und ein einmaliger Signalton ertönt.



ABC

### Wartungsleistung erforderlich (Zangensymbol mit nachgestelltem Buchstaben)

Wird sieben Sekunden lang angezeigt (wobei zwei Signaltöne ausgegeben werden), wenn der Lifter aus dem Ruhemodus hochfährt, und blinkt alle fünf Sekunden auf, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu erregen.

Das Gerät kann benutzt werden. Die entsprechende Wartungsleistung sollte jedoch so bald wie möglich durch einen Arjo-Techniker erfolgen.




### Übergewichtig

Blinkt, wenn der Transfer einer Last versucht wird, die die Hubkapazität des Lifters übersteigt.


Das rote Lämpchen leuchtet weiterhin (begleitet von vier schnell aufeinander folgenden Signaltönen), bis der Patient/Bewohner abgesenkt wurde.

Die Funktion wird deaktiviert, alle anderen Funktionen hingegen bleiben in Betrieb.

## Anbringen der Aufhängung und Waage

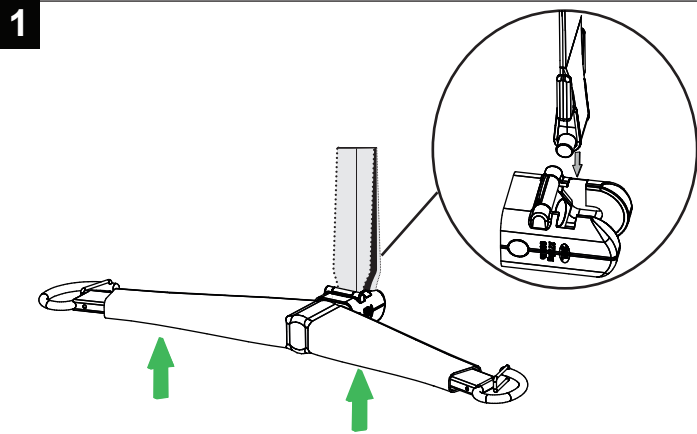


Quick-Connect-Verriegelung der Aufhängung im 90-Grad-Winkel am Haken ausrichten. Den Haken in Quick-Connect einhängen.

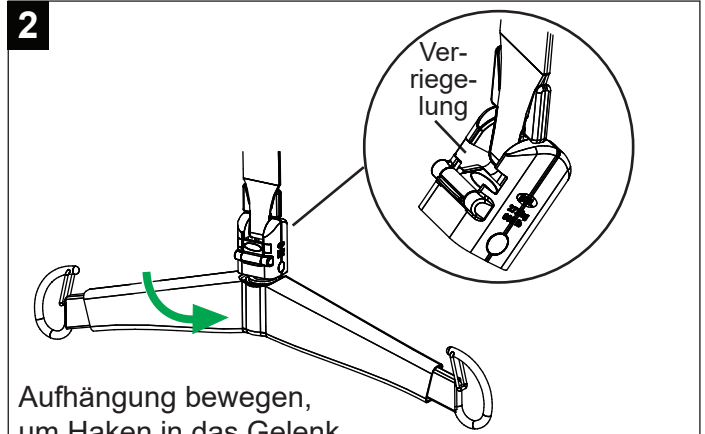


Aufhängung bewegen, um Haken in das Gelenk einzuhängen. Die Aufhängung auf seine Position drehen. Vergewissern Sie sich, dass die Quick-Connect-Verriegelung verschlossen ist.


## Abnehmen der Aufhängung und Waage

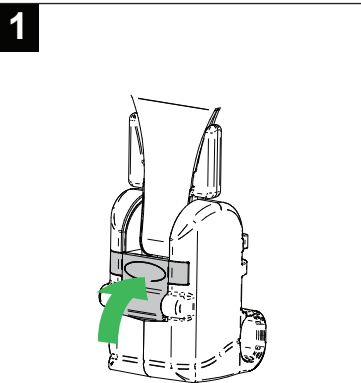

Die Verriegelung, mit der der Gurt auf dem Platz gehalten wird, durch Hineindrücken öffnen.

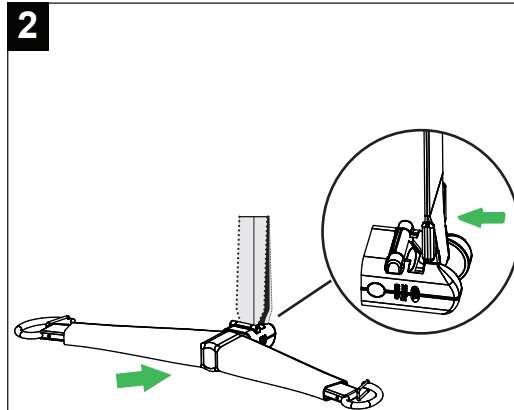


Die Aufhängung im 90-Grad-Winkel bewegen, um den Haken aus dem Gelenk zu lösen.

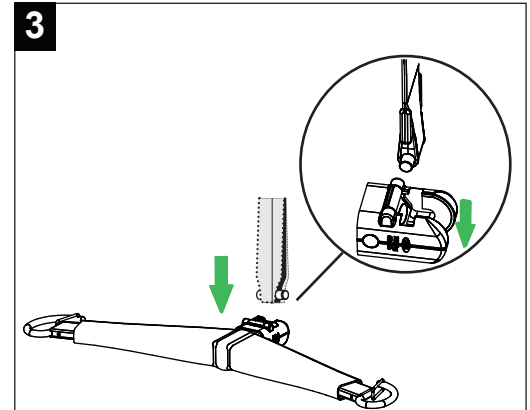


Die Aufhängung im 90-Grad-Winkel aus dem Quick-Connect nach unten herausziehen.

## Anbringen/Abnehmen der Aufhängung und Waage (nur für das Modell Basic Deckenlifter)

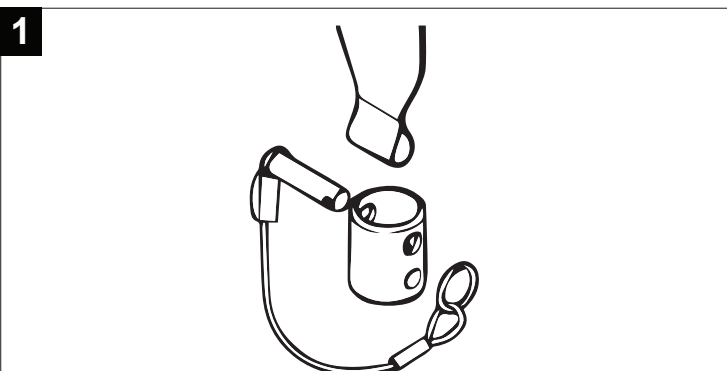

Führen Sie das Ende des Befestigungsbandes in das Befestigungselement an der Aufhängung. Führen Sie nun den Lastösenbolzen durch die Hülse und die Schlaufe am Befestigungsbandende.

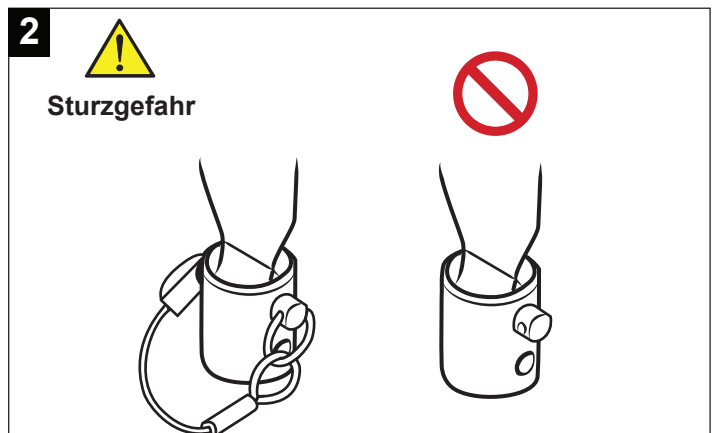

Sichern Sie den Bolzen mit dem Ringsplint.