


# Maxi Sky 2




## Pulsantiera di controllo

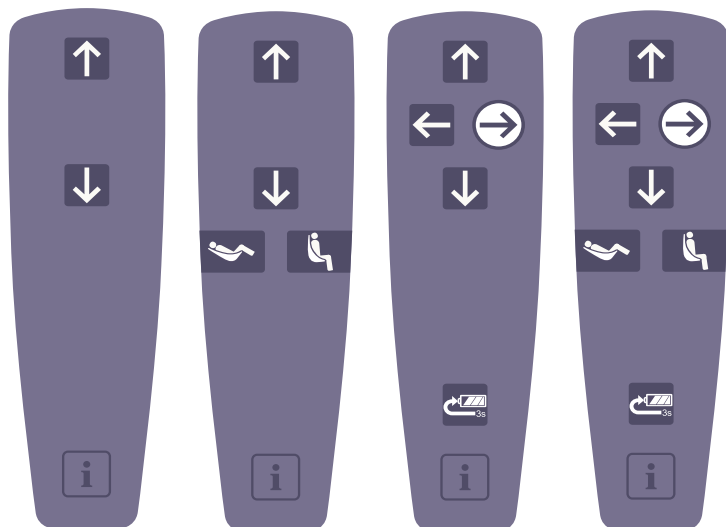

-  **Pulsante Su**
-  **Pulsante Giù**
-  **Pulsante Destra**
-  **Pulsante Sinistra**
-  **Pulsante posizione reclinata**  
(solo per Sistema di Posizionamento Dinamico elettrico - PDPS)
-  **Pulsante posizione seduta**  
(solo per Sistema di Posizionamento Dinamico elettrico - PDPS)
-  Ritorno alla posizione di ricarica (**RTC**)  
Ritorno alla posizione di riposo (**RTH**)
-  **Pulsante programmazione/informazioni**

## Pannello di controllo

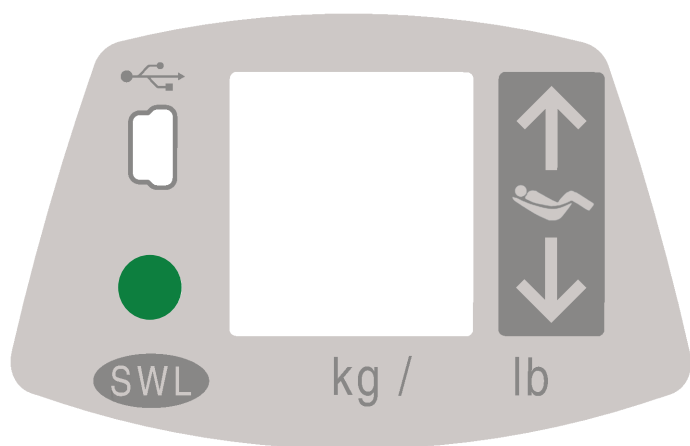

-  **Pulsante Su-Giù ausiliario**  
I pulsanti Su e Giù vengono usati per completare un trasferimento se si verifica un problema con la pulsantiera di controllo durante il funzionamento.
-  **LED di stato**  
Il LED è un complemento del display per attirare l'attenzione su un messaggio visualizzato sullo schermo.
-  **Carico di Lavoro Sicuro (SWL)**  
Questa etichetta indica la capacità di sollevamento massima del sollevapazienti.
-  **Porta di accesso USB**  
La porta USB è a uso esclusivo degli utenti MAXISMART.

## Simboli del display



### Livello di carica della batteria

100%

75% Intervallo di funzionamento normale

50%

25% Basso  
Accompagnato da un breve “bip” quando si preme un pulsante

< 5% Critico  
Le icone si alternano a due brevi “bip” ogni 10 secondi



### Indicatore Enhanced Charging System (ECS)

Viene visualizzato quando le unità sono caricate tramite Sistema di autoricarica (ECS).



### Ritorno alla posizione di ricarica (RTC)

Indica che è stata attivata la funzione Ritorno alla posizione di ricarica (RTC) dalla pulsantiera di controllo.



### Ritorno alla posizione di riposo (RTH)

Indica che è stata attivata la funzione Ritorno alla posizione di riposo (RTH) dalla pulsantiera di controllo.

PPP



### Posizione Preprogrammata (PPP)

Indica che è stata attivata la funzione Posizione Preprogrammata (PPP) dalla pulsantiera di controllo.



### Protezione surriscaldamento Ciclo di lavoro

Lampeggia quando il sollevapazienti viene usato per un lungo periodo senza lasciarlo raffreddare.

La protezione da surriscaldamento si attiva quando una funzione che ha superato il proprio ciclo di lavoro viene disattivata mentre tutte le altre funzioni rimangono attive.

La luce rossa rimane accesa durante il periodo di raffreddamento e si sente un “bip” singolo.

Il simbolo scompare quando la funzione è stata raffreddata e può essere utilizzata di nuovo.



### Guasto generale (simbolo di avvertenza accompagnato da un carattere numerico)

Lampeggia quando si verifica un malfunzionamento del sollevatore.

Il sollevatore deve essere ispezionato o riparato da un tecnico addetto alla manutenzione qualificato.

La luce rossa rimane accesa e si sente un “bip” singolo.



ABC

### Necessità di manutenzione (simbolo con chiave accompagnato da una lettera)

Appare per 7 secondi (accompagnato da 2 “bip”) quando il sollevatore viene riattivato dopo la modalità Riposo e lampeggia ogni 5 secondi per attirare l’attenzione dell’utente.

È possibile usare l’unità, ma un tecnico Arjo deve eseguire la manutenzione il prima possibile.





### Sovrappeso

Lampeggia quando si tenta un trasferimento con un carico che eccede la capacità del sollevatore.



La luce rossa rimane accesa (accompagnata da 4 rapidi “bip”) finché il paziente non viene abbassato.

La funzione viene disattivata mentre le altre rimangono attive.

## Aggancio della barra di sollevamento e della bilancia

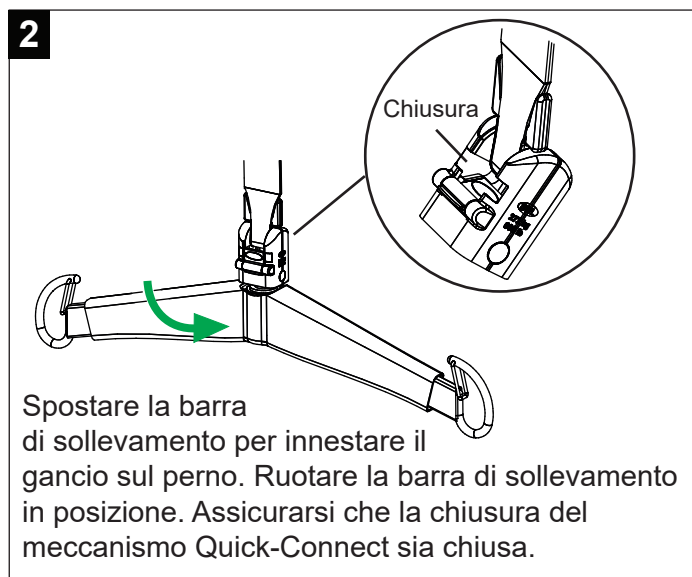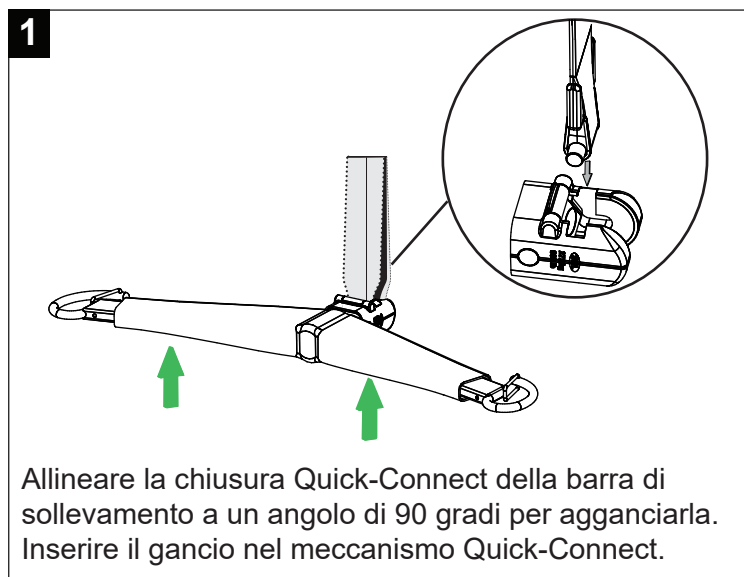

## Rimozione della barra di sollevamento e della bilancia

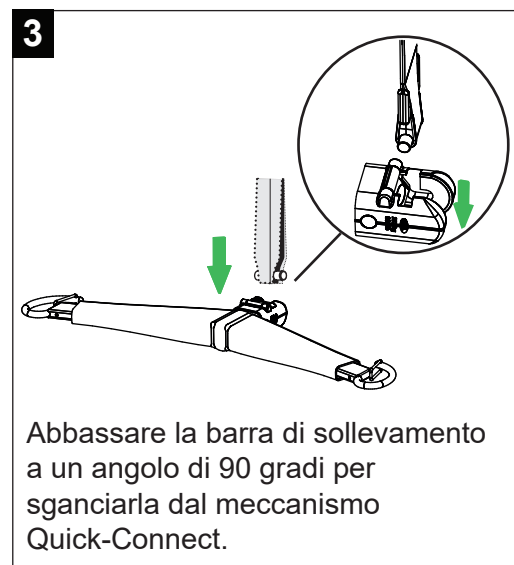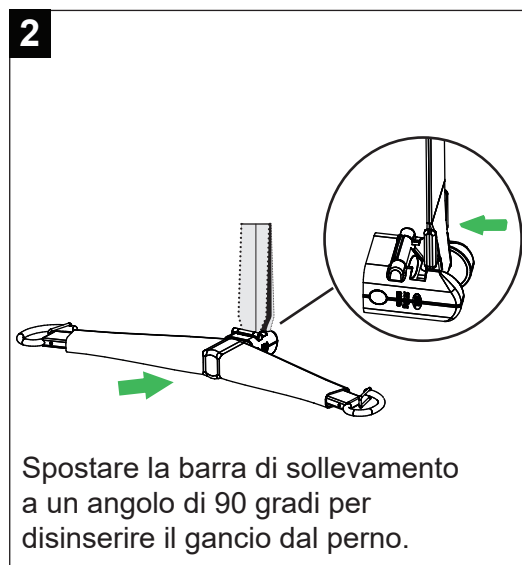

## Aggancio o rimozione della barra di sollevamento e della bilancia (solo per il sollevapazienti a soffitto mod. Basic)

