








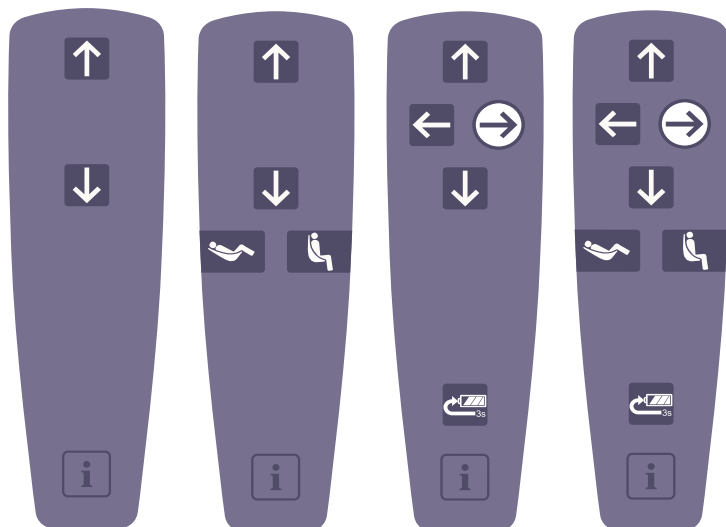

Maxi Sky 2




Handkontroll



-  **Uppåtknapp**
-  **Nedåtknapp**
-  **Höger-knapp**
-  **Vänster-knapp**
-  **Knappen för tillbakalutad ställning**
(endast elektrisk DPS)
-  **Knappen för sittande ställning**
(endast elektrisk DPS)
-  **RTC (återgång till laddning)**
Återgå till utgångsläge-knapp (RTH)
-  **Programmerings-/informationsknapp**

Manöverpanel

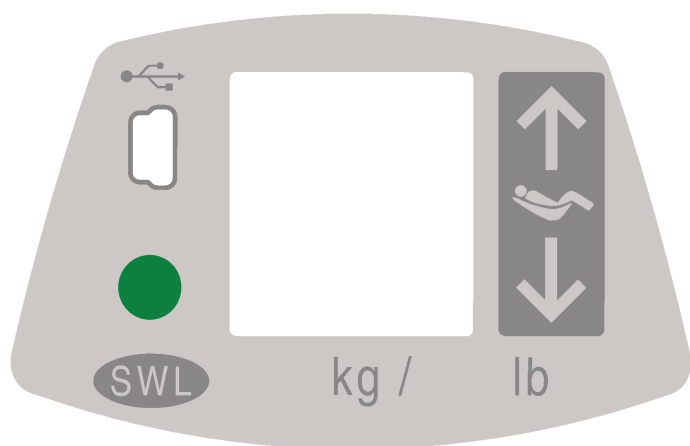

-  **Extraknapp för upp och ner**
Upp- och ned-knapparna används för att avsluta en förflyttning om det skulle bli något problem med handkontrollen under förflyttningen.
-  **Statuslysdiod**
Lysdioder är ett komplement till displayen och ska dra uppmärksamhet till att det finns ett meddelande på skärmen.
-  **SWL**
Etiketten anger lyftens maximala lyftkapacitet.
-  **USB-port**
USB-porten är endast till för MAXISMART-användare.

Displayens symboler



Batteriets laddningsnivå



100 %



75 %

Normalt driftintervall



50 %



25 % Låg

Åtföljs av ett kort pip när en knapp trycks ned



< 5 %

Kritiskt

Ikonerna växlar med två korta pip var tionde sekund



Indikator för Enhanced Charging System (ECS) (förbättrat/utökat laddningssystem)

Visas vid laddning med ECS.



Återgång till laddning (RTC)

Anger att RTC-funktionen aktiverades av handkontrollen.



Återgå till utgångsläge (RTH)

Anger att RTH-funktionen aktiverades av handkontrollen.



PPP (Pre-Programmed Position – förprogrammerad position)

Anger att PPP-funktionen aktiverades av handkontrollen.



Driftcykel överstigen

Blinkar när lyften används under en lång tid utan avkylning.

Överhettningsskyddet aktiveras när en funktion överstiger driftcykeln. Funktionen inaktiveras medan alla andra funktioner förblir aktiva.

Den röda lampan förblir tänd under nedkylningsperioden och ett enda pip hörs.

Symbolen försvinner när funktionen har kylts ner och är klar för användning igen.



Allmänt tekniskt fel (varningssymbol åtföljd av ett numeriskt tecken)

Blinkar när lyften får ett tekniskt fel.

Lyften måste kontrolleras eller repareras av en behörig servicetekniker.

Den röda lampan förblir tänd och ett enda pip hörs.



ABC

Underhåll krävs (skruvnyckelsymbol åtföljd av ett bokstavstecken)

Visas under sju sekunder (åtföljd av två pip) när lyften lämnar vänteläget och blinkar var femte sekund för att uppmärksamma användaren.

Enheten kan användas, men underhåll måste göras snarast av en tekniker från Arjo.




Övervikt

Blinkar när man försöker göra en förflyttning vars last överstiger lyftens kapacitet.


Den röda lampan förblir tänd (åtföljd av fyra snabba pip) tills patienten har sänkts.

Funktionen är inaktiverad medan alla andra funktioner förblir aktiva.

Fäste av lyftbygel och våg

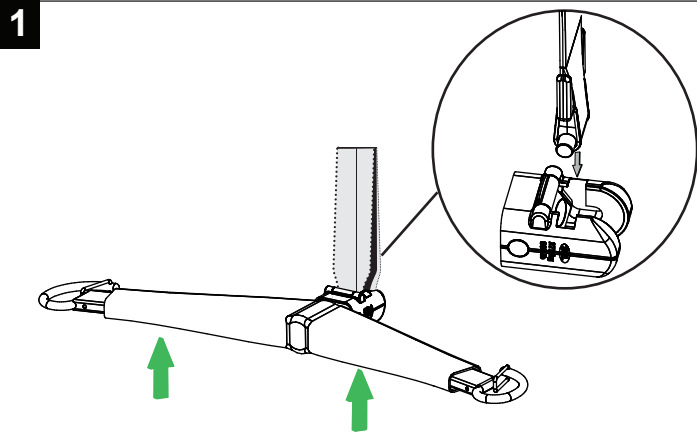


Rikta in lyftbygelns Quick-Connect-spärr i 90 graders vinkel mot kroken. För in kroken i Quick-Connect.

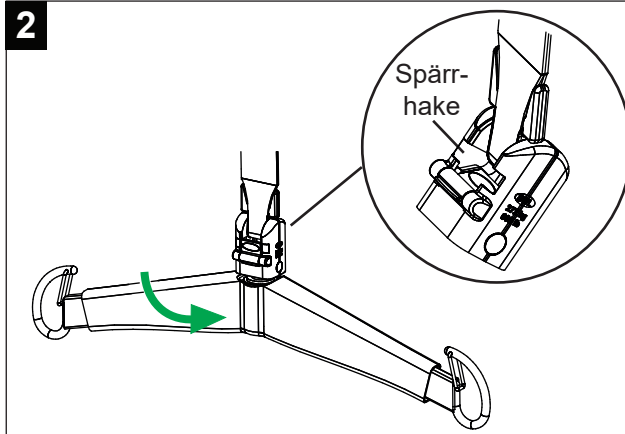


Flytta lyftbygel för att fästa kroken i svängtappen. Roter lyftbygel i läge. Se till att Quick-Connect-spärren stängs.


Borttagning av lyftbygel och våg

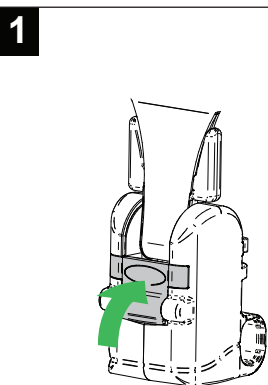

Öppna spärren som håller kroken på plats genom att trycka på den.

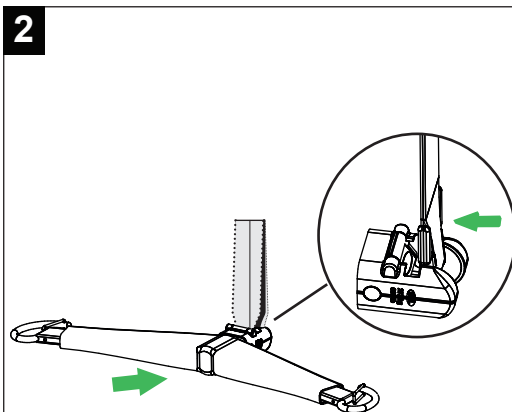


Flytta lyftbygel i 90 graders vinkel för att lossa kroken bort från svängtappen.

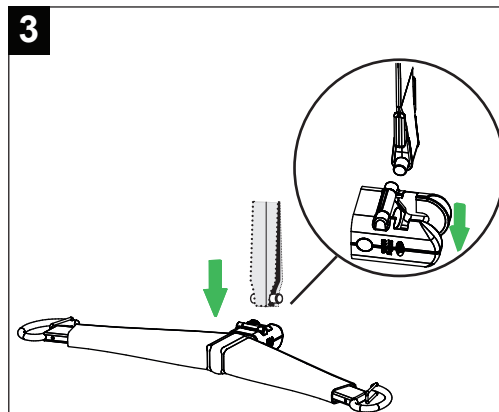

Dra lyftbygel nedåt i 90 graders vinkel, ut ur Quick-Connect-fästet.

Sätta fast eller ta bort lyftbygel och våg (endast modellen Basic-taklyft)

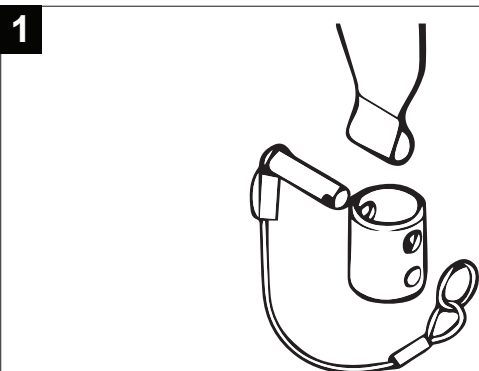

För in remmens ände i lyftbygelns fäste. För in sprinten genom fästet och oöglan i slutet av remmen.



Säkra sprinten med låsringen.