

# Maxi Sky 2



## AVERTISSEMENT



Pour éviter toute lésion oculaire ou cutanée, toujours utiliser des lunettes et des gants de protection. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. En cas d'irritation des yeux ou de la peau, contacter un médecin. Lire attentivement le mode d'emploi et la fiche de données de sécurité du désinfectant.

Désinfectants autorisés	Ammonium quaternaire ≤ 0,21% (2 100 ppm)	Isopropanol ≤ 70%	Phénol ≤ 1,56 % (15 600 ppm)	Eau de Javel ≤ 1% (10 000 ppm)	Acide peracétique ≤ 0,25% (2 500 ppm)	Peroxyde d'hydrogène ≤ 1,5%
Modèle Lève-personne sur rail Basic et Maxi Sky 2 (sangle en nylon tissé)	X	X	X			
Modèle Maxi Sky 2 Infection Control (sangle non poreuse)	X	X	X	X	X	X
Autres accessoires * et **	X	X	X	X	X	X
Berceau mobile moyen à 2 crochets (700-05461-BOX) et berceau à 4 crochets (700-05443)	X	X	X			
Cadre de civière (700-19522) et civières de morgue (700.05380, 700.05385, 700-05382 et 700-05387)	X	X	X			
DPS manuel ouvert (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
Berceau mobile moyen à 2 crochets (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
Petit berceau à 2 crochets (700-19420) et berceau moyen à 2 crochets IC (700-19470)	X	X	X	X	X	X
Berceau à 4 crochets (700-19430) et cadre de civière (700-15695)	X	X	X	X	X	X
DPS manuel plat (700-19475 & 700-19200)	X	X	X	X	X	X
DPS manuel ouvert (700-19480)	X	X	X	X	X	X
PDPS moyen (700-19350) et PDPS large (700-19355)	X	X	X	X	X	X

\* La partie métallique du connecteur WCS peut se corroder après une exposition répétée à l'eau de Javel et au peroxyde d'hydrogène.

\*\* Les câbles de la télécommande, WCS et PDPS peuvent devenir légèrement sales après un contact répété avec de l'eau de Javel ou du peroxyde d'hydrogène.

\*\*\* La housse du modèle peut être en vinyle ou en plastique. Si elle est en vinyle, ne pas utiliser d'agents désinfectants.

Nettoyer et désinfecter avant chaque nouveau patient.

Accessoires nécessaires :

- Gants et lunettes de protection
- Linge jetable

## Nettoyer

1. Utiliser un chiffon imbibé d'eau pour éliminer tout excès de résidus du lève-personne et de ses accessoires en procédant de haut en bas.
2. Utiliser un chiffon imbibé d'une solution d'eau chaude et de liquide de nettoyage.
3. Frotter l'équipement de haut en bas pour éliminer tous les dépôts.
4. Utiliser un chiffon propre imbibé d'eau claire pour essuyer toutes les taches de liquide de nettoyage.
5. Essuyer ensuite avec un chiffon sec.

Les zones indiquées sont plus susceptibles de contenir des saletés et des microbes ; attention aux points suivants :

- Bord de la télécommande
- Verso et poignée de la télécommande
- Joint entre le berceau mobile et la sangle
- Cadre et boîtier du berceau
- Cordon d'arrêt d'urgence
- Sangle

## Désinfection

6. Essuyer le Maxi Sky 2 et ses accessoires avec une solution contenant un des désinfectants compatibles.
7. Les méthodes de désinfection doivent être conformes aux directives locales ou nationales, en fonction de l'établissement de soins ou du pays d'utilisation. En cas de doute, consulter le spécialiste local chargé de la prévention des infections.

