

# Maxi Sky 440

## Transfert du patient




1



Positionner le harnais autour du patient. Pour le harnais avec repose-tête, s'assurer de l'étendre jusqu'en haut de la tête du patient.


2

Appuyer sur le bouton DESCENDRE de la commande manuelle, garder la tension sur la sangle de l'autre main.

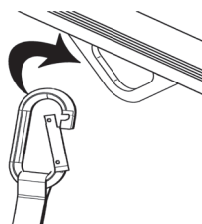

Amener le mousqueton au chariot, puis amener le lève-personne au-dessus du patient.

3

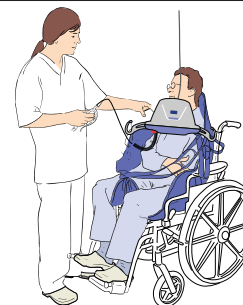


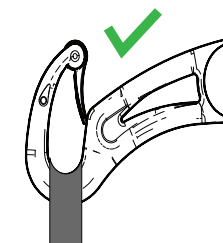
Abaisser le lève-personne en dessous du menton du patient et déplier les supports. Si le patient est en position allongée abaisser le lève-personne près de la cage thoracique du patient, puis positionner les sangles.

4

Pour attacher le harnais, placer la boucle de la sangle sur le support, puis tirer doucement sur la boucle.


5

 Harnais à boucles



S'assurer que le loquet de sécurité est fermé.


6

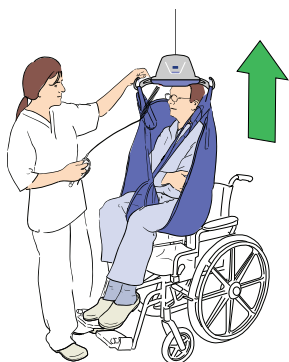

Pour soulever le patient, appuyer sur le bouton Haut de la télécommande. Faire monter l'appareil jusqu'à ce que les fesses du patient soient dégagées des accoudoirs du fauteuil, du haut de la baignoire ou du lit.

Guider les jambes du patient au-delà des obstacles.

7

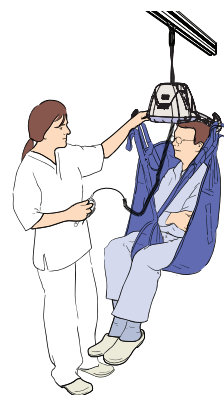

Déplacer le patient.

8

Lorsque le patient est placé au-dessus du point de transfert voulu et qu'il est prêt à descendre, appuyer sur le bouton BAS.

9

Lorsque le patient est assis correctement, détacher les boucles et dégager le harnais du lève-personne.

Détacher le lève-personne du chariot.