

# Maxi Sky 440

## Trasferimento del paziente




1



Posizionare il corsetto attorno al paziente. Nel caso di un corsetto con supporto per la testa, assicurarsi che arrivi oltre la testa del paziente.

2

Premere il pulsante GIÙ sulla pulsantiera di controllo per srotolare la cinghia, mantenendo in tensione la cinghia con l'altra mano.

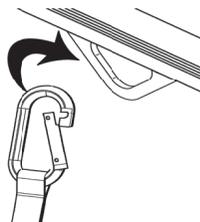

Attaccare il gancio automatico alla barella e quindi spostare il sollevapazienti sopra il paziente.

3




Abbassare il sollevapazienti al di sotto del mento e aprire i supporti. Se il paziente si trova in posizione supina, abbassare il sollevapazienti vicino al suo torace, aprire i supporti e quindi bloccare le cinghie dei corsetti.

4

Per agganciare il corsetto, inserire l'anello della cinghia sul supporto e tirare delicatamente la cinghia.

5

 Corsetto ad asola

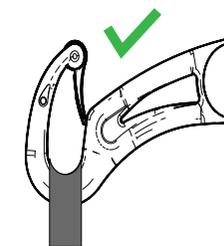

Assicurarsi che la chiusura di sicurezza sia chiusa.

6



Per sollevare il paziente, premere il pulsante SU sulla pulsantiera di controllo. Sollevare l'unità finché i glutei del paziente non sono lontani dai braccioli della sedia a rotelle, dalla parte superiore del bagno o del letto, prima di spostarlo.

Accompagnare le gambe del paziente per superare qualsiasi ostacolo.

7



Spostare il paziente.

8

Quando il paziente si trova sopra il punto di trasferimento desiderato e pronto a essere abbassato, premere il pulsante GIÙ.

9

Una volta che il paziente è correttamente in posizione, staccare gli anelli e sganciare il corsetto dal sollevapazienti.

Sganciare il sollevapazienti dalla barella.