

Maxi Sky 440

患者様の移乗方法




1



スリングを患者様に装着します。ヘッドサポート付きのスリングの場合、患者様の頭の上まで伸びることを確認してください。


2

ストラップを巻き戻すには、ハンドコントロールのDOWN(下降)ボタンを押し、他の手でストラップの張力を保持します。

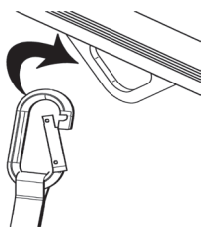

カラビナをトロリーに取り付け、リフトを患者の上に移動します。

3

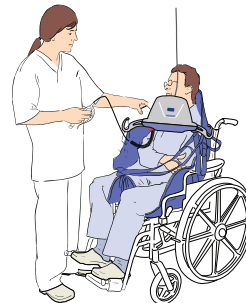


リフトを患者の顎下まで下降させ、サポートを広げます。仰臥位の患者の場合は、本リフトを患者胸部近くまで下降させ、スリングサポートを広げ、次いでストラップを取り付けます。

4

スリングを取り付けるには、ストラップループをサポートに挿入して、ストラップを穏やかに引っ張りだします。


5

！ ループスリング

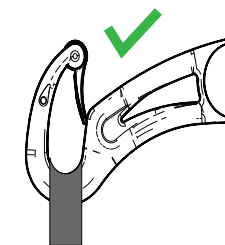

安全ラッチが閉じていることを確認してください。


6

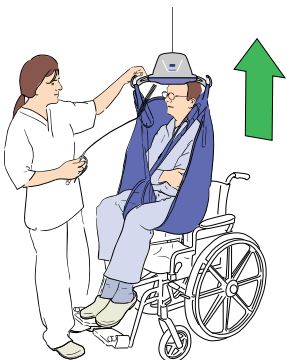

患者を持ち上げるときは、ハンドコントロールのUPボタンを押します。患者を移乗する前には、患者の臀部が車椅子のアームサポート、浴槽またはベッドの上部よりも高くなるまで持ち上げてください。

患者の脚部が障害物に触れないようにガイドします。

7

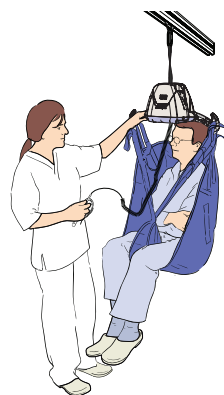

患者様を移動させます。

8

患者を移乗先に移動させたら、下降できる準備が整った時点で、DOWN(下降)ボタンを押します。

9

患者が正しい座位姿勢をとれたら、ループを取り外し、本リフトからスリングを外します。

本リフトをトロリーのフックから外します。