

# Maxi Sky 440

## Pasientforflytning




1



Legg seilet rundt pasienten. Hvis seilet har hodestøtte, må du passe på at det går helt opp til toppen av pasientens hode.


2

Trykk på NED-knappen på håndkontrollen for å dra ut remmen mens du holder remmen stram med den andre hånden.

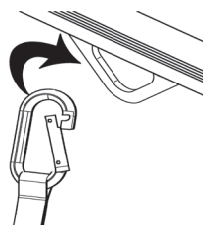

Fest karabinkroken til løpevognen og flytt deretter løfteren over pasienten.

3

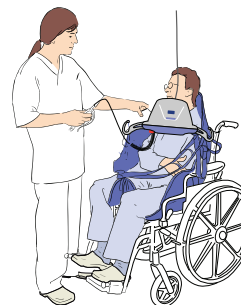


Senk løfteren til under haken, og brett ut støttene. Hvis beboeren ligger på rygg, senker du løfteren ned mot brystet, feller ned topunktsbøylen og fester deretter remmene.

4


Fest seilet ved å stikke løkken på remmen inn i støtten, og trekk forsiktig i remmen.

5

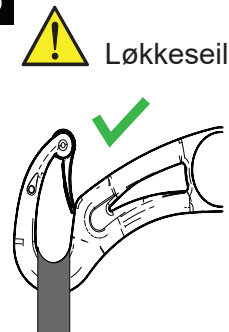

Kontroller at sikkerhetslåsehaken er lukket.


6

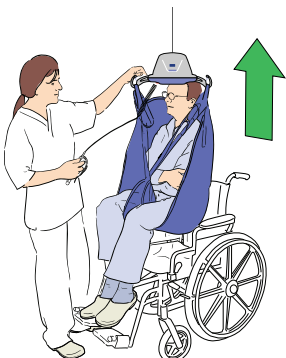

Trykk på opp-knappen på håndkontrollen for å løfte pasienten. Løft til pasientens bak går klar av armstøttene på rullestolen, oversiden av badekaret eller sengen før du flytter pasienten.

Styr pasientens ben unna eventuelle hindringer.

7

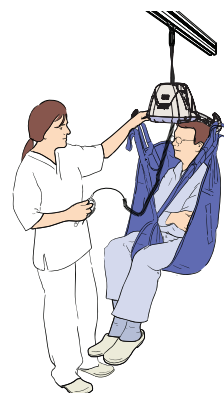

Flytt pasienten.

8

Når pasienten befinner seg over ønsket forflytningspunkt og er klar til å senkes ned, trykker du på NED-knappen.

9

Når pasienten sitter ordentlig, løsner du løkkene og fjerner seilet fra løfteren.

Hekt løfteren av vognen.