

Maxi Sky 440

Transfer pacjenta




1



Umieścić nosidło wokół pacjenta. W przypadku nosideł z podparciem głowy sprawdzić, czy podparcie jest rozłożone i sięga do końca głowy pacjenta.


2

Naciskać przycisk W DÓŁ pilota, aby rozwinąć pas jednocześnie utrzymując napięcie pasa drugą ręką.

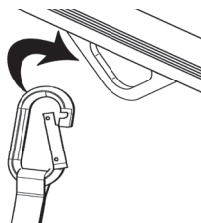

Przyłączyć karabinek do wózka, a następnie przesunąć podnośnik nad pacjenta.

3

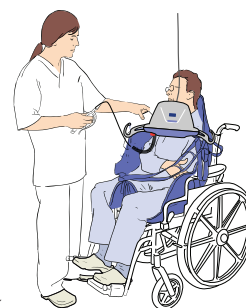


Obniżyć podnośnik poniżej podbródka i rozłożyć wsporniki. W przypadku, gdy pacjent znajduje się w pozycji leżącej na wznak należy obniżyć podnośnik w pobliżu klatki piersiowej, rozłożyć ramiona kasety, a następnie założyć pasy.

4

Aby przymocować nosidło, wprowadzić pętlę pasów na ramiona kasety i pociągnąć lekko pasy.


5

 Nosidło pętlowe

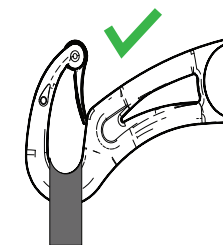

Sprawdzić, czy zatrzask bezpieczeństwa jest zamknięty.


6

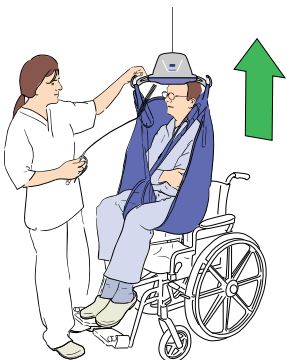

W celu uniesienia pacjenta, nacisnąć przycisk W GÓRĘ na pilocie. Przed przemieszczeniem poziomym pacjenta, unosić urządzenie, aż pośladki pacjenta znajdą się powyżej oparcia wózka inwalidzkiego, brzegów wanny lub łóżka.

Kierować nogi pacjenta w taki sposób, aby omijały przeszkody.

7

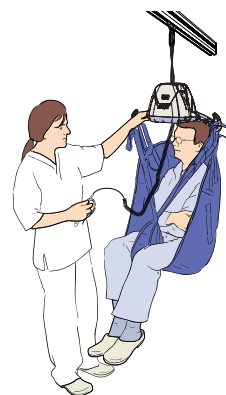

Przesunąć pacjenta.

8

Gdy pacjent znajduje się ponad wymaganym miejscem przeniesienia i można go obniżyć, nacisnąć przycisk W DÓŁ.

9

Po właściwym umiejscowieniu pacjenta odczepić pętlę i odłączyć nosidło od podnośnika. Odczepić podnośnik od wózka.