

Maxi Sky 440

Förflyttning av patienter och vårdtagare




1



Placera selen runt patienten. För sele med huvudstöd, se till att den sträcker sig hela vägen upp på patientens huvud.


2

Tryck på nedåtknappen på handkontrollen för att rulla av remmen. Håll remmen spänd med andra handen.

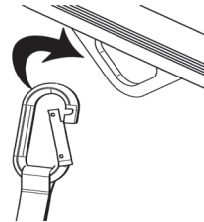

Fäst karbinhaken vid vagnen och flytta sedan lyften över patienten.

3

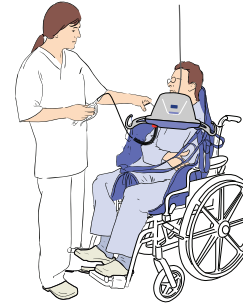


Sänk lyften under hakan och fäll ut stöden. Om patienten är i liggande ställning ska lyften sänkas ned nära bröstet, stöden fällas ut och därefter ska remmarna fästas.

4

Fäst selen genom att föra in fästöglan på stödet och dra försiktigt i remmen.


5

Sele med öglor

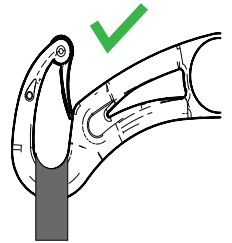

Se till att säkerhetsspärren stängs.

6

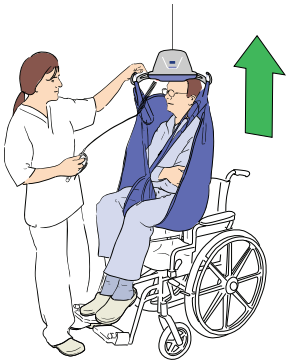

Lyft patienten genom att trycka på uppåt-knappen på handkontrollen. Lyft tills patientens ända går fri från rullstolens armstöd (eller badet eller sängen) innan du flyttar patienten.

Styr patientens ben förbi eventuella hinder.

7



Flytta patienten.

8

När patienten befinner sig ovanför rätt plats och är klar för nedhissning trycker du på nedåtknappen.

9

När patienten sitter ordentligt, lossa öglorna och koppla bort selen från lyften.

Haka av lyften från vagnen.