


Pulsantiera di controllo

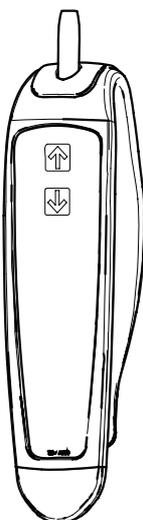

Pulsante con freccia verso l'alto



Pulsante con freccia verso il basso

Pannello di controllo



Pulsanti "Su" e "Giù"

I pulsanti Su e Giù vengono usati per completare un trasferimento se si verifica un problema con la pulsantiera di controllo durante il funzionamento.



Manutenzione necessaria - Spia rossa

Lampeggiante (senza bip) - Richiesta di manutenzione da parte del proprio rappresentante locale.
Fissa (con bip) - Mancata esecuzione della manutenzione. Interrompere l'utilizzo del sollevapazienti e contattare il rappresentante locale per assistenza.



Livello di carica della batteria - Spia gialla

Lampeggiante - Le batterie sono in carica.
Fissa - Le batterie sono cariche.

Freno di emergenza automatico




Rischio di caduta

Il freno di emergenza rappresenta un ulteriore dispositivo di sicurezza che impedisce automaticamente la caduta accidentale del paziente nella remota eventualità di un guasto alla trasmissione o al motore.

Il freno di emergenza può essere utilizzato una sola volta. In caso di attivazione, contattare il proprio rappresentante Arjo per concordare la sostituzione dell'unità. Non è possibile utilizzare il sistema di discesa di emergenza quando il freno di emergenza è inserito. Utilizzare un dispositivo alternativo per abbassare il paziente.

Arresto di emergenza

1

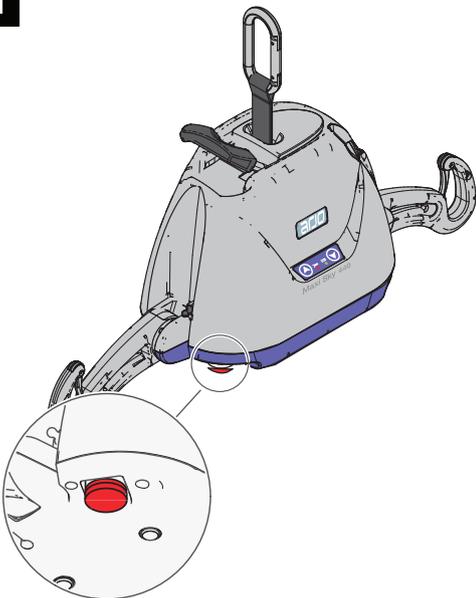


L'operatore può disattivare l'alimentazione elettrica in qualsiasi momento premendo il tasto rosso di emergenza a forma di fungo situato sotto il sollevapazienti.

Il tasto viene ripristinato ruotandolo in senso orario nella direzione delle frecce.

La prima volta si consiglia agli utenti di fare pratica con la manovra di arresto prima di azionare il sollevapazienti con un paziente.


Discesa di emergenza

1

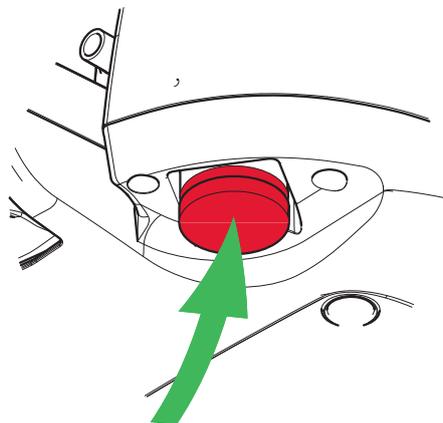


Premere il tasto rosso di arresto di emergenza sotto il sollevapazienti. Spostare il sollevapazienti con il paziente sul letto o sopra la sedia a rotelle.

2

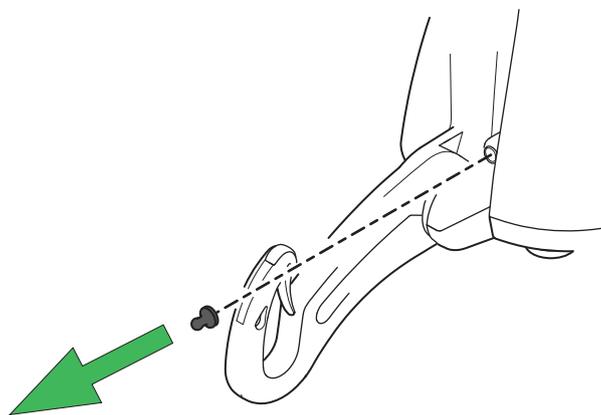

Rimuovere il tappo nero in plastica posto sul lato del sollevapazienti.

3

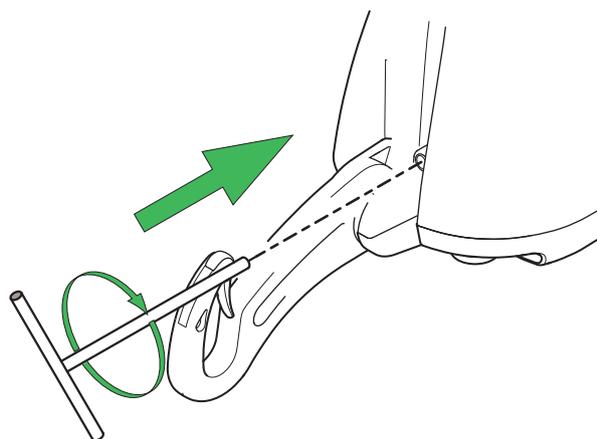

Inserire l'utensile speciale nell'apertura. Ruotarlo in senso orario per abbassare il paziente. L'utensile ruota il motore direttamente, in modo che ad ogni giro abbassi leggermente il paziente.

Una volta abbassato in sicurezza il paziente sul letto o su una sedia a rotelle, rimuovere l'utensile dal sollevapazienti. Contattare un tecnico qualificato per la manutenzione del sollevapazienti.