


Maxi Sky 440




ハンドコントロール

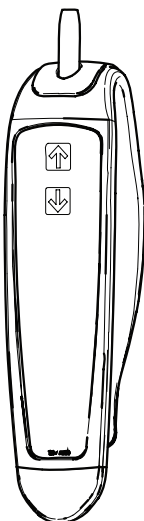

↑ 上昇ボタン

↓ 下降ボタン

コントロールパネル

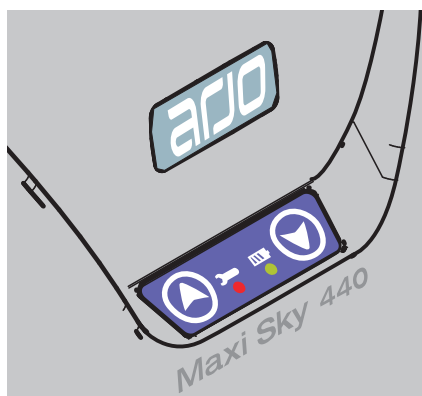

上昇・下降ボタン

上昇・下降ボタンは、操作中にハンドコントロールに何らかの問題が発生した場合に、移乗を完了させるために使用するコントロールパネルに設置されたスイッチです。



メンテナンスが必要です - 赤のライト

点滅 (ビープ音なし) - 最寄りの代理店によるメンテナンスが必要です。

点灯 (ビープ音あり) - メンテナンスの期限が経過しています。本リフトの使用を停止し、最寄りの代理店に点検・メンテナンスの依頼をしてください。



バッテリー充電レベル - 黄色のライト

点滅 - バッテリーが充電中です。

点灯 - バッテリーが充電されました。

自動緊急ブレーキ




落下リスク

緊急ブレーキ機能は、トランスミッションやモーターの故障という極めて稀な事態発生時に、患者の落下を自動的に防止する安全追加機能です。

緊急ブレーキは1度しか使用できません。緊急ブレーキ起動後の部品交換については、Arjo代理店にお電話でご連絡ください。緊急下降システムは、緊急ブレーキが作動しているときは使用することはできません。利用者を下降させるには、別の装置を使用してください。

緊急停止

1

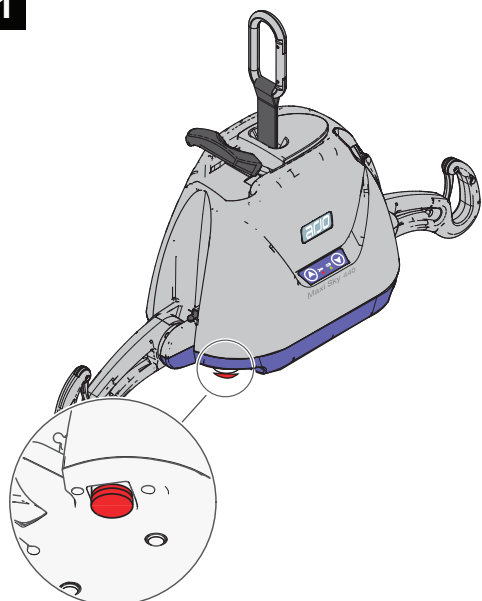


リフトの下部に付属する赤いマッシュルーム型の緊急ボタンを押せば、いつでも本体の電源を切ることができます。

本ボタンは、矢印方向に回す事によってリセットされます。

初めて本リフトを使用する介助者は、利用者を乗せてリフトを操作する前に、この停止操作を練習して下さい。


緊急下降

1

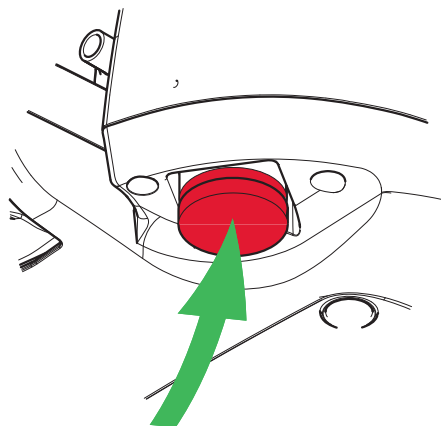


本リフトの下部にある赤色の緊急停止ボタンを押します。利用者を乗せたリフトを、ベッドまたは車椅子上に移乗します。

2

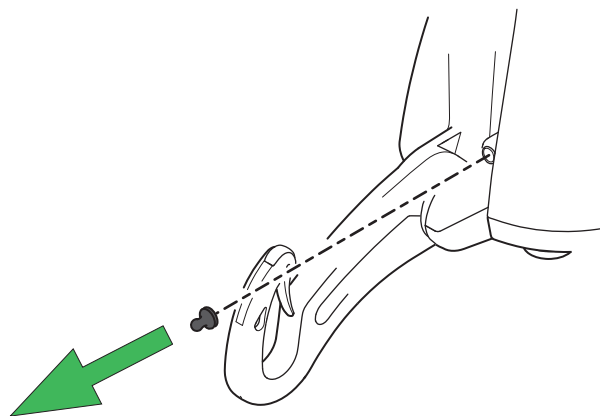

リフトの側面にある黒いプラスチック製のキャップを取り外します。

3

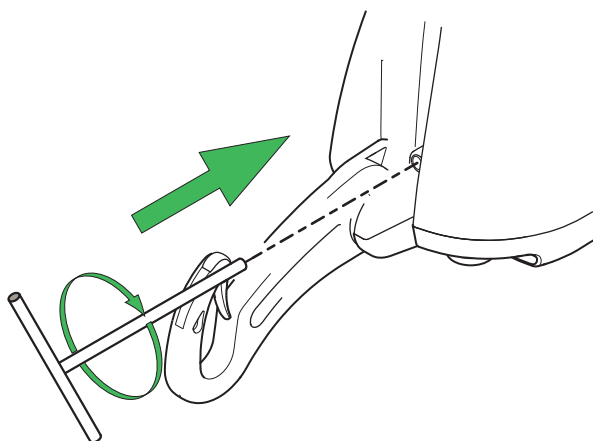

前記の専用工具を閉口部に挿入します。利用者を降下させるには、時計回りに回します。工具を回すと、昇降モーターを直接回転させ、利用者を徐々に降下させることができます。

利用者をベッド上または車椅子上に安全に降下させ、本工具をリフトから外します。リフトの点検・整備は、有資格サービス担当者にご依頼ください。