


# Maxi Sky 440




## Håndkontroll

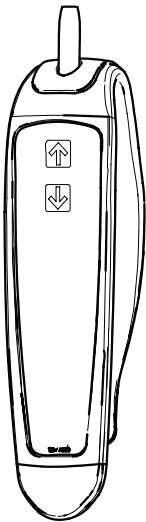

 **Opp-knapp**

 **Ned-knapp**

## Kontrollpanel

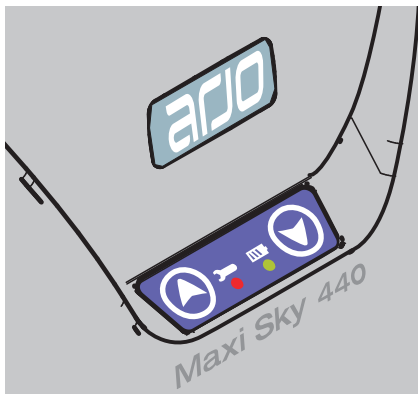

### Opp- og ned-knapper

Opp- og ned-knappene brukes til å fullføre en forflytning hvis det skulle oppstå et problem med håndkontrollen under bruk.



### Vedlikehold påkrevd – Rødt lys,

Blinker (uten pipesignal)

– Krever vedlikehold av din lokale representant.

Kontinuerlig (med pipesignal) – Tidsfrist for vedlikehold er utløpt. Slutt å bruke løfteren og kontakt din lokale representant for å bestille service.



### Batteriets lade nivå – Gult lys

Blinker – Batteriene lades.

Blinker ikke – Batteriene er ladet.

## Automatisk nødbremse




### Risiko for å falle

Nødbremsen er en ekstra sikkerhetsfunksjon som automatisk hindrer at pasienten faller hvis det mot formodning skulle oppstå en feil på overføringen eller motoren.

Nødbremsen kan bare brukes én gang. Hvis nødbremsen har vært aktivert, må du kontakte Arjo-forhandleren for å avtale utskifting av enheten. Nødsenkesystemet kan ikke brukes mens nødbremsen er aktivert. Bruk en annen enhet til å senke pasienten.

## Nødstop

1

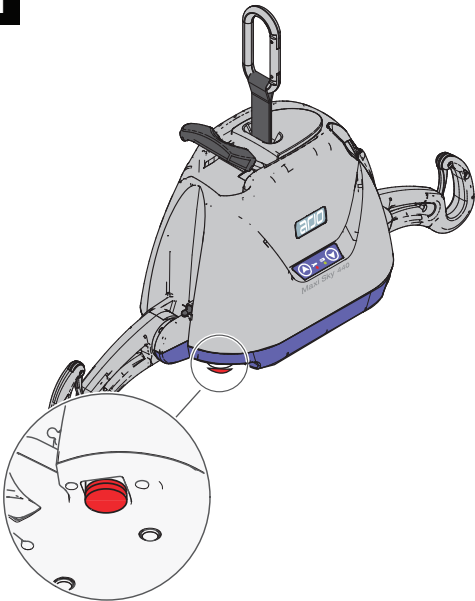


Operatøren kan når som helst stenge av strømmen ved å trykke på den røde nødstopknappen under løfteren.

Knappen tilbakestilles ved å vri den med urviserne i pilens retning.

Førstegangsbrukere bør trene på nødstopprosedyren før løfteren brukes på en pasient.


## Nødsenkning

1

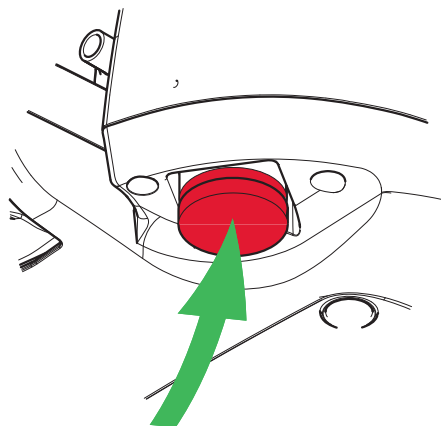


Trykk på den røde nødstopknappen under løfteren. Flytt løfteren med pasienten over sengen eller rullestolen.

2

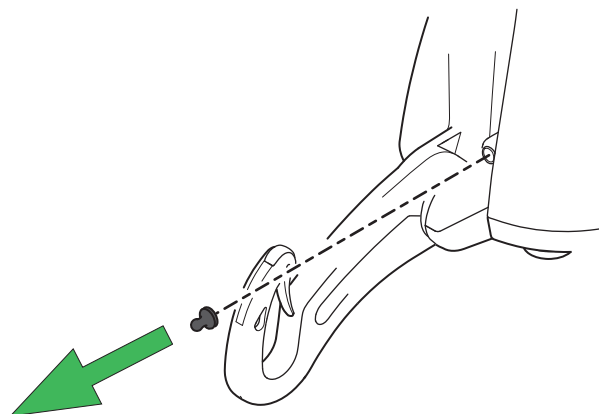

Fjern den svarte hetten på hver side av løfteren.

3

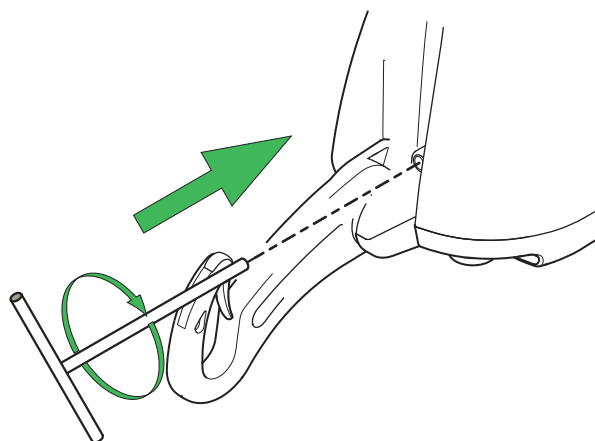

Sett spesialverktøyet inn i åpningen. Vri det med klokken for å senke brukeren. Verktøyet roterer motoren direkte, slik at hver omdreining av verktøyet senker pasienten litt.

Når pasienten er senket trygt ned på en seng eller i en rullestol, fjerner du verktøyet fra løfteren. Tilkall en kvalifisert tekniker for å få utført service på løfteren.