


# Maxi Sky 440




## Pilot

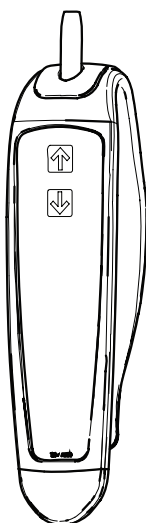

 **Przycisk „w górę”**

 **Przycisk „w dół”**

## Panel sterowania

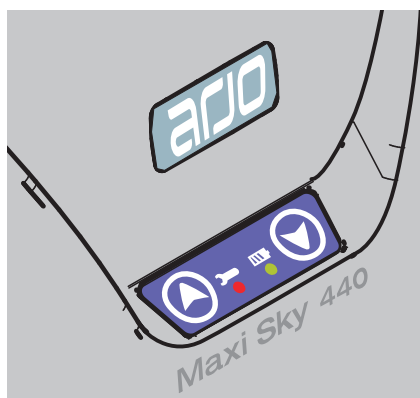

### Przyciski góra dół

Przyciski góra i dół są używane, aby zakończyć przeniesienie, jeśli pojawi się problem z pilotem podczas użytkowania.



**Wymagana konserwacja** — czerwona lampka, Miganie (bez dźwięku) — wymagane serwisowanie przez lokalnego przedstawiciela.

Światło ciągłe (bez dźwięku) — minął termin konserwacji. Zaprześcić używania podnośnika i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w sprawie serwisowania.



**Poziom naładowania akumulatora** — żółta lampka Miganie — trwa ładowanie akumulatorów. Światło ciągłe — akumulatory są naładowane.

## Automatyczny hamulec awaryjny




### Ryzyko upadku

Hamulec awaryjny jest dodatkowym elementem, który automatycznie zabezpiecza pacjenta przed upadkiem podczas nieoczekiwanego zdarzenia związanego z awarią przekładni lub silnika.

Hamulec awaryjny może być użyty tylko raz. Po użyciu wezwać przedstawiciela firmy Arjo w celu wymiany urządzenia. Systemu obniżania awaryjnego nie można używać po użyciu hamulca awaryjnego. Obniżyć pacjenta przy użyciu innego urządzenia.

## Wyłączenie awaryjne

1

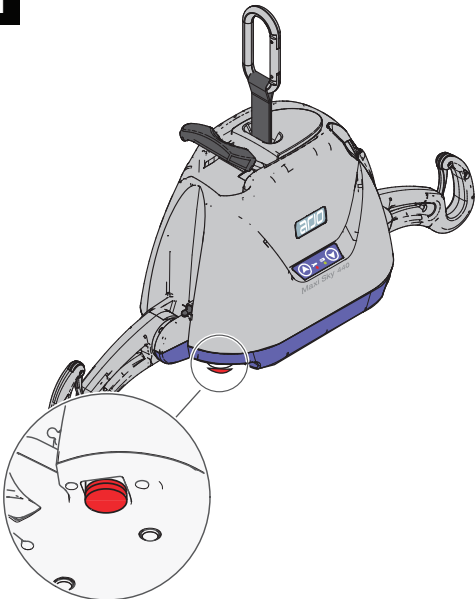


Operator może wyłączyć zasilanie elektryczne w dowolnym czasie, naciskając czerwony przycisk awaryjny w kształcie grzybka znajdujący się pod podnośnikiem.

Przycisk ten jest resetowany po obróceniu go zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku wskazywanym przez strzałki.

Początkujący użytkownicy powinni przećwiczyć ten manewr przed zastosowaniem podnośnika do przeniesienia pacjenta.


## Obniżanie awaryjne

1

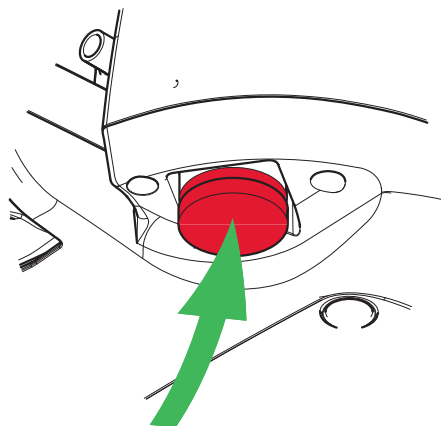


Nacisnąć czerwony przycisk wyłącznika awaryjnego znajdujący się pod podnośnikiem. Przesunąć podnośnik z pacjentem nad łóżko lub wózek inwalidzki.

2

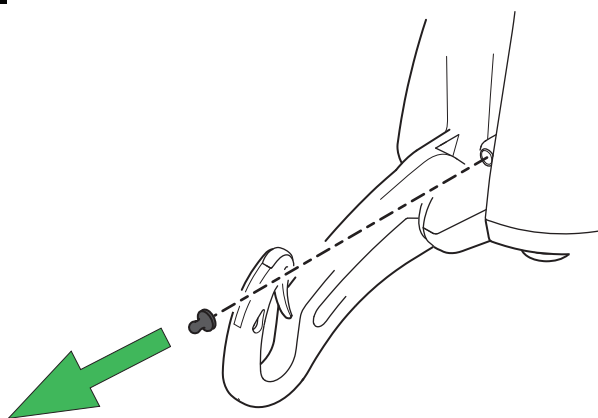

Zdjąć czarną plastikową zatyczkę umieszczoną z boku podnośnika.

3

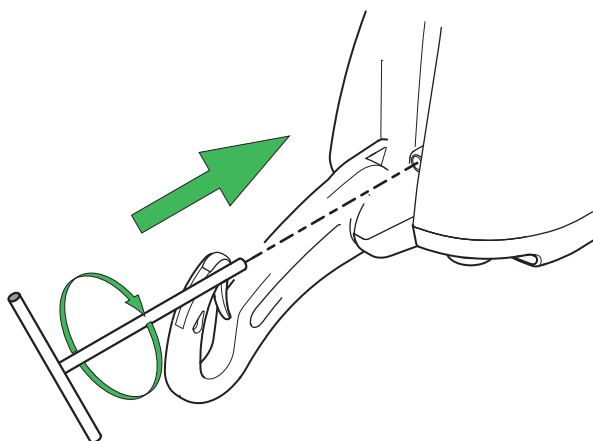

Wprowadzić specjalne narzędzie w otwór. Aby obniżyć pacjenta obrócić narzędzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Narzędzie obraca silnik bezpośrednio, dzięki czemu każdy obrót narzędzia nieznacznie obniża pacjenta.

Po bezpiecznym obniżeniu pacjenta na łóżko lub wózek inwalidzki należy wyjąć narzędzie z podnośnika.

Wezwać wykwalifikowanego technika, który wykona przegląd podnośnika.