


Maxi Sky 440




Handkontroll

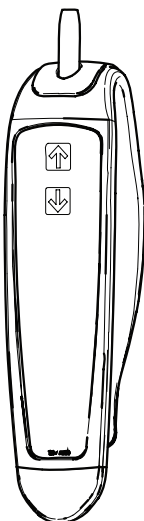

 **Uppåtknapp**

 **Nedåtknapp**

Manöverpanel

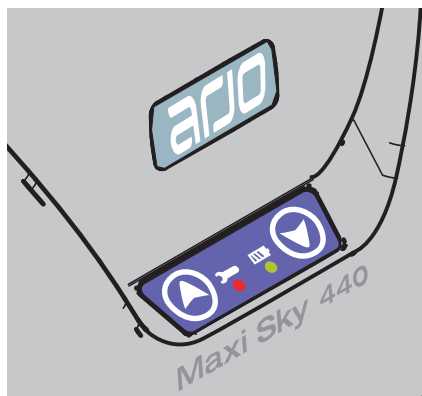

Knappar för höjning och sänkning

Upp- och ned-knapparna används för att avsluta en förflyttning om det skulle bli något problem med handkontrollen under förflyttningen.



Underhåll krävs – Röd lampa,

Blinkande (utan pip) – underhåll måste utföras av lokal representant.

Fast sken (med pip) – underhåll försenat. Sluta använda lyften och kontakta din lokala representant för service.



Batteriets laddningsnivå – Gul lampa

Blinkande – Batterierna laddas.

Fast sken – Batterierna är laddade.

Automatisk nödbroms




Fallrisk

Nödbromsen är en extra säkerhetsfunktion som automatiskt förhindrar patienten från att falla om kraftöverföringen eller motorn mot förmodan skulle sluta fungera.

Nödbromsen kan endast användas en gång. Om den har aktiverats kontaktar du närmaste Arjo-representant för att beställa byte av enheten. Nödsänkningssystemet kan inte användas när nödbromsen är aktiverad. Använd en alternativ enhet för att sänka patienten.

Nödstopp och avstängning

1

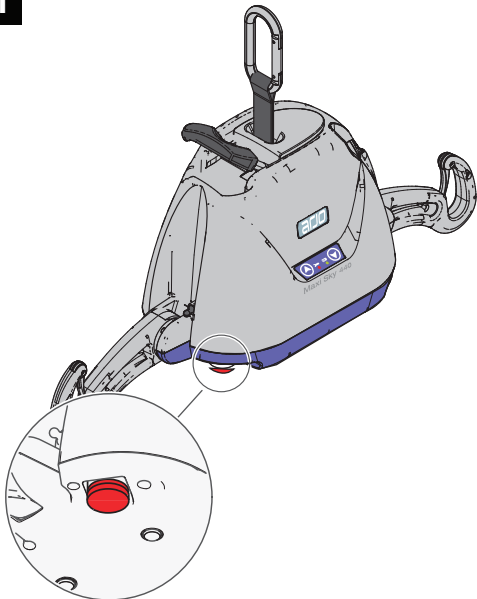


Operatören kan stänga av elmatningen när som helst genom att trycka på den röda nödstoppsknappen under lyften.

Knappen kan återställas genom att vrida den medurs i pilarnas riktning.

Förstagångsanvändare bör öva på avstängning innan lyften används med en patient.


Nödsänkning

1

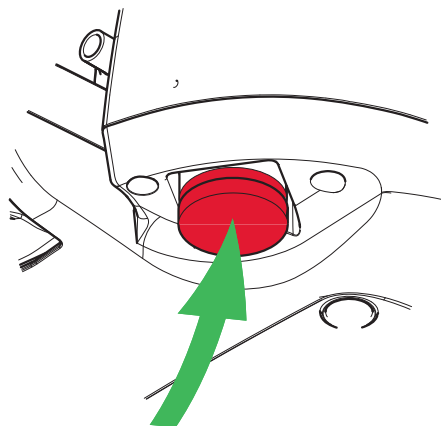


Tryck på den röda nödstoppknappen under lyften. Flytta lyften med patienten över sängen eller rullstolen.

2

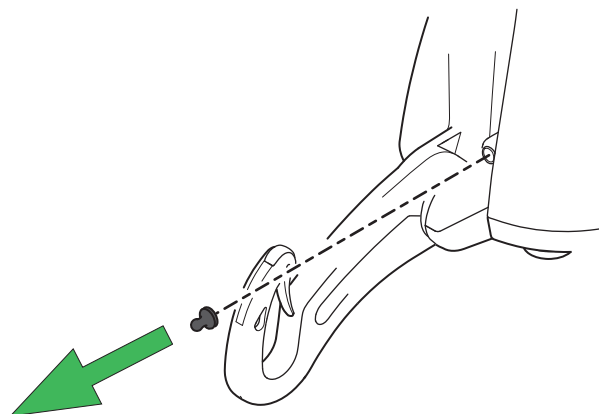

Ta bort den svarta plastkåpan på lyftens sida.

3

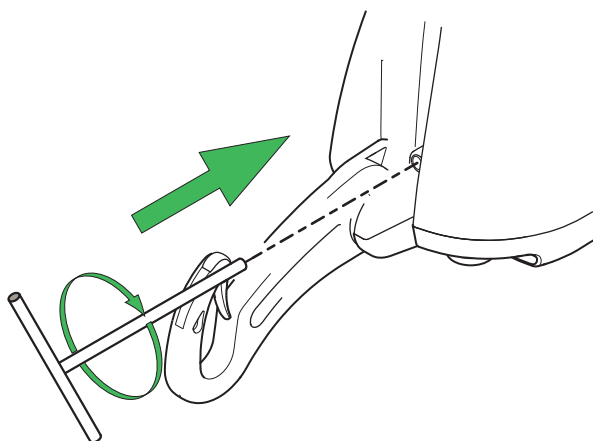

För in specialverktyget i öppningen. Vrid det medurs för att sänka patienten. Verktöget roterar motorn direkt, vilket gör att patienten sänks en aning för varje varv som verktyget vrids.

När patienten är säkert nedsänkt på en säng eller i en rullstol kan verktyget tas bort från lyften. Ring en behörig tekniker för service av lyften.