

Maxi Sky 440



Pulire e disinfettare prima dell'utilizzo per nuovi pazienti e quando si sospetta una contaminazione.

Pulire

1. Utilizzare un panno inumidito con acqua per rimuovere i residui in eccesso presenti sul sollevapazienti e sugli accessori, andando dall'alto verso il basso.
2. Utilizzare un panno inumidito con acqua calda e un detergente leggero.
3. Strofinare l'apparecchiatura da cima a fondo rimuovendo tutti i residui visibili.
4. Risciacquare l'eventuale detergente residuo con acqua pulita.
5. Asciugare con un panno asciutto.

ATTENZIONE

Non schizzare, bagnare o immergere l'unità in acqua. Il sollevapazienti è un dispositivo elettrico, pertanto l'acqua può danneggiarlo.

Per garantire una migliore superficie di scorrimento per le ruote della barella, pulire la parte interna del binario ogni quattro mesi.

Per fare questo, inserire uno straccio inumidito nell'apertura e farlo scorrere da un'estremità all'altra del binario.

Prestare attenzione alle aree elencate di seguito, poiché sono le più esposte alla presenza di sporizia e microbi:

- Giunzione dell'involucro in plastica
- Attacco pulsantiera
- Cavità di plastica
- Angoli degli involucri
- Bordo etichetta del prodotto
- Distanziatori in gomma
- Bordo membrana
- Cavità arresto di emergenza
- Cavità della vite
- Giunzione dell'involucro
- Apertura della cinghia

Disinfettare

6. Pulire Maxi Sky 440 e gli accessori con una soluzione contenente uno dei disinfettanti compatibili.
7. Per disinfettare efficacemente le superfici del sollevapazienti, sfregare accuratamente con le salviette.
8. Non usare solventi a base di fenolo, cloro o tali da poter danneggiare le finiture.