

Maxi Sky 440



新しい患者様の前および汚染が疑われる場合には、清掃と消毒を行います。

洗浄

1. 水に浸した布を使用して、リフトと付属品の上から下まで残留物を取り除きます。
2. 温水と中性洗剤で湿らせた布を使用してください。
3. すべての目に見える残留物を除去しながら、装置を上から下に拭いてください。
4. 洗剤が残っているときは、きれいな水ですすぎます。
5. 乾いた布できれいに拭き取ってください。

注意

本製品に水をかける、水浸しする、または水中に入れたりしないでください。
本リフトは電気製品ですので、水によって損傷する可能性があります。

トロリーホイールの良好な接地面を確保するため、レールの内部を4ヶ月に1度は清掃してください。この清掃は、湿らせた布を開口部に挿入し、レールの端から端までスライドさせることで行えます。

以下の場所には汚れや微生物が含まれている可能性が高いため、注意を払ってください。

- プラスチックハウジングの接合部分
- 手元スイッチ用ポケット
- プラスチックの空洞部分
- ハウジングの隅
- 製品ラベルの縁部分
- ゴムの絶縁体
- 製品ラベルの縁部分
- E-ストップの空洞部分
- ネジの空洞部分
- ハウジングの接合部分
- ストラップ開口部分

消毒

6. Maxi Sky 440と付属品は、互換性のある消毒剤のいずれかを含む溶液で拭いてください。
7. ワイブを使うときは、表面全体が効果的に消毒されるように、リフトをしっかりとこすってください。
8. 表面の仕上げを損なう可能性のあるフェノール、塩素または他のタイプの溶媒は使用しないでください。