

Maxi Sky 440



Czyścić i dezynfekować przed nowymi pacjentami oraz w przypadku podejrzenia skażenia.

Czyszczenie

1. Ściereczką moczoną w wodzie usunąć resztki zabrudzeń z podnośnika i jego akcesoriów od góry do dołu.
2. Używać wilgotnej ściereczki i ciepłej wody zmieszanej z łagodnym detergentem.
3. Przetrzeć urządzenie od góry do dołu, usuwając wszystkie widoczne zanieczyszczenia.
4. Ewentualne ślady detergentu zmyć wodą.
5. Następnie wytrzeć suchą ściereczką.

OSTRZEŻENIE

**Nie należy spryskiwać, oblewać ani zanurzać urządzenia w wodzie.
Podnośnik jest urządzeniem elektrycznym, i woda mogłaby go uszkodzić.**

Aby zapewnić lepszą jakość powierzchni tocznej dla kółek wózka, należy czyścić wnętrze szyn co 4 miesiące. W celu wykonania tej czynności należy wprowadzić zwilżoną szmatkę do otwartej części i przesunąć ją z jednego końca szyny na drugi.

Obszary o najwyższym prawdopodobieństwie zabrudzenia i zanieczyszczeń mikrobiologicznych:

- Stykające się części plastikowej obudowy
- Kieszeń pilota
- Wgłębienia plastiku
- Krawędzie obudowy
- Brzeg etykiety produktu
- Gumowe podkładki dystansujące
- Krawędzie osłony
- Wgłębienie wyłącznika awaryjnego
- Wgłębienia śrub
- Stykające się części obudowy
- Otwór pasa

Dezynfekcja

6. Przetrzeć Maxi Sky 440 i akcesoria przy użyciu roztworu zawierającego jeden z kompatybilnych środków dezynfekcyjnych.
7. W celu zapewnienia dokładnej dezynfekcji podnośnika, wszystkie powierzchnie należy energicznie przecierać ściereczkami.
8. Nie należy używać fenolowych, chlorowych lub innego typu rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.