

Maxi Sky 440



Rengör och desinficera före ny patient och vid misstanke om att produkten har förorenats.

Rengör

1. Använd en vattendränkt trasa för att ta bort synliga avlagringar från taklyften och dess tillbehör, uppifrån och ned.
2. Använd en trasa fuktad med varmvatten blandat med mildt rengöringsmedel.
3. Torka utrustningen uppifrån och ned och avlägsna alla synliga avlagringar.
4. Skölj bort eventuellt kvarvarande rengöringsmedel med rent vatten.
5. Torka rent med en torr trasa.

AKTA

Enheten får inte skvättas ned, doppas eller dränkas i vatten. Lyften är en elektrisk enhet och vatten kan skada den.

För att vagnens hjul ska rulla så lätt som möjligt ska insidan av skenan rengöras var fjärde månad. Detta görs genom att föra in en fuktig trasa i öppningen och skjuta den från ena sidan av skenan till den andra.

Var särskilt uppmärksam på följande områden eftersom det är mest sannolikt att smuts och mikrober har ansamlats där:

- Höljeförbindelse i plast
- Ficka för handkontroll
- Fördjupningar i plasten
- Höljets hörnor
- Produktetikettens kant
- Gummitassar
- Membrankant
- Nödstoppsförsänkning
- Skruvförsänkning
- Höljeförbindelse
- Remöppning

Desinficera

6. Torka av Maxi Sky 440 och dess tillbehör med en lösning som innehåller någon av de kompatibla desinficeringsmedlen.
7. Torka av lyften ordentligt med dukarna för att effektivt desinficera alla ytor.
8. Använd inte fenol, klorin eller något annat lösningsmedel som kan skada ytan.