

Es wird empfohlen, dass Ihr *Maxi 500* und sein Zubehör zwischen den einzelnen Anwendungen am Pflegebedürftigen oder mindestens 1x täglich gereinigt und desinfiziert werden.

Berücksichtigen Sie bei der Reinigung besonders die Teile, die am ehesten berührt werden können, wie:

- Handbedienung
- Steuerkasten
- Akkupack
- Lifter-Handgriff
- Aufhängung

## Reinigung

1. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit warmem Wasser, dem Reinigungsmittel zugesetzt wurde.

### **ACHTUNG**

**Verwenden Sie nie ein feuchtes Tuch für das Steuergerät, die Akkuhalterung oder den Akkupack, weil es dadurch zu Korrosion an elektrischen Komponenten kommen kann.**

**Wenn ein Heißlufttrockner zum Trocknen des Lifts verwendet wird, darf die Temperatur 80 °C (176 °F) nicht übersteigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel auf Erdölbasis oder Ähnliches, da dies Kunststoffteile beschädigen kann.**

## Reinigen/Desinfizieren

2. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit warmem Wasser, dem Desinfektionsmittel zugesetzt wurde.