

Se recomienda limpiar y desinfectar la grúa *Maxi 500* y sus accesorios entre cada uso de paciente o diariamente, como mínimo.

Preste especial atención a las partes que son más propensas a ser tocadas, como por ejemplo:

- Mando de control
- Caja de control
- Conjunto de batería
- Manilla de elevación
- Bastidor

Limpieza:

1. Utilice un paño humedecido con agua templada y con detergente.

PRECAUCIÓN

Nunca utilice un paño húmedo en la caja de control, el compartimento de la batería o la batería ya que puede provocar corrosión en los componentes eléctricos.

Si se usa un secador de aire caliente para secar la grúa, la temperatura no debe superar los 80 °C (176 °F). No utilice solventes a base de petróleo o similares, ya que esto puede estropear los componentes de plástico.

Desinfección

2. Utilice un paño humedecido con agua templada y con desinfectante.

