

Recomenda-se que o *Maxi 500* e respetivos acessórios sejam limpos e desinfetados entre cada utilização em pacientes ou, no mínimo, diariamente.

Preste especial atenção às peças com maior probabilidade de serem tocadas, como as seguintes:

- Comando manual
- Caixa de controlo
- Conjunto de bateria
- Manípulo do elevador
- Barra de suporte

Limpeza

1. Utilize um pano humedecido em água quente à qual adicionou uma solução de limpeza.

CUIDADO

Nunca utilize um pano molhado na caixa de controlo, no suporte da bateria ou no conjunto de bateria, pois pode causar corrosão nos componentes elétricos.

Caso seja utilizado um secador de ar quente para secar o elevador, a temperatura não pode exceder os 80 °C (176 °F). Não utilize solventes à base de petróleo ou similares, uma vez que isto poderá danificar as peças plásticas.

Desinfecção

2. Utilize um pano humedecido em água quente à qual adicionou desinfetante.

