


Maxi 500




Caixa de controlo

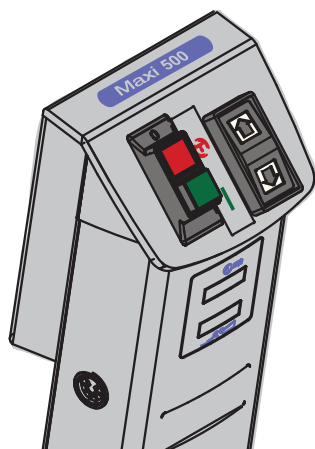

Botão para cima - prima para elevar o paciente


Botão para baixo - prima para descer o paciente

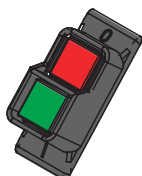

Botão de paragem de emergência - prima para desligar a energia

Botão de alimentação - prima para repor a paragem de emergência

Comando manual

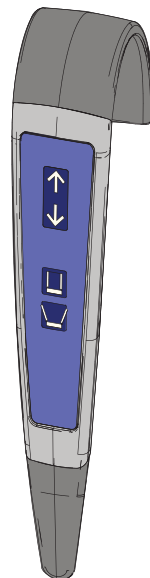

Botão para cima - prima para elevar o paciente




Botão para baixo - prima para descer o paciente



Feche as pernas



Abra as pernas

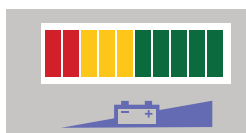

Indicador de carga da bateria -

O indicador de carga da bateria é um visor de gráfico de barras, situado no suporte do conjunto de bateria.

Um dispositivo de aviso sonoro emite um sinal sonoro quando o nível da bateria atingir um nível crítico.

Verde - Funcionamento normal

Amarelo - Bateria fraca


Vermelho - Crítico

Paragem de emergência

1

Botão de paragem de emergência


Botão para soltar a bateria

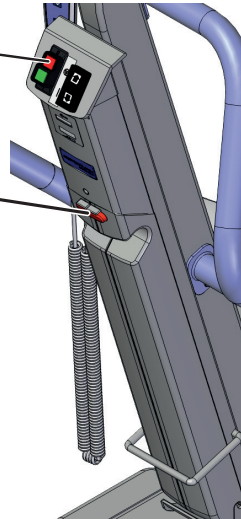

Para desligar a energia, prima o botão de emergência vermelho, ou prima o botão para soltar a bateria vermelho enquanto a puxa para trás para a retirar.

2


Botão de alimentação

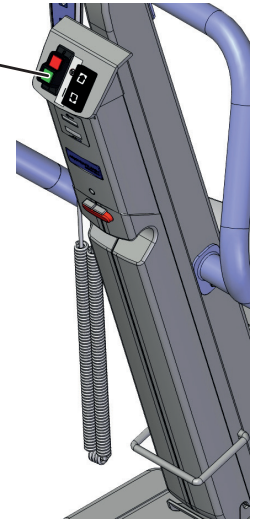

Para repor a função de paragem de emergência, prima o botão de alimentação verde ou instale novamente a bateria.

Travões

1

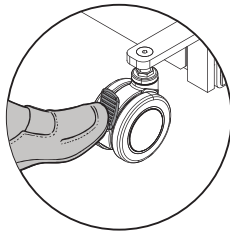


Bloqueado



Para aplicar os travões, pise a parte traseira do almofadado.

2

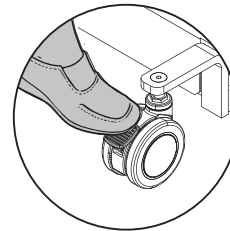


Desbloqueado



Para libertar os travões, empurre a parte superior do almofadado para a frente.

Descida de emergência

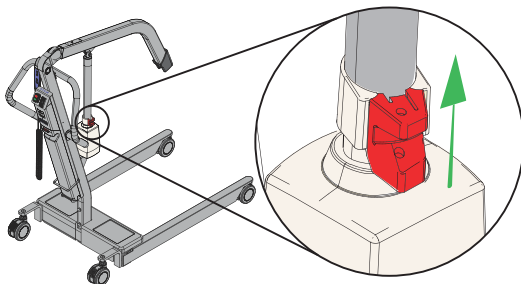

Em caso de falha do comando manual ou da caixa de controlo, procure o manípulo vermelho por cima do atuador.

Puxe o manípulo gradualmente para cima e segure até o atuador descer para o nível pretendido.

Deve ser aplicada uma carga na viga. A força exercida no manípulo e o peso do paciente influenciam a velocidade da descida.

O manípulo tem uma mola e regressa à posição normal e interrompe o processo de descida quando é libertado.