


Maxi Move


Activar y desactivar el freno

Activar el freno

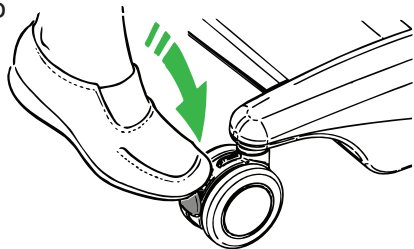


Solo para almacenamiento y en pendiente.
No active nunca los frenos al elevar a un paciente.

Desactivar el freno

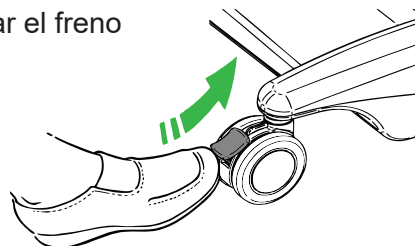


Botones del panel de control y del mando de control

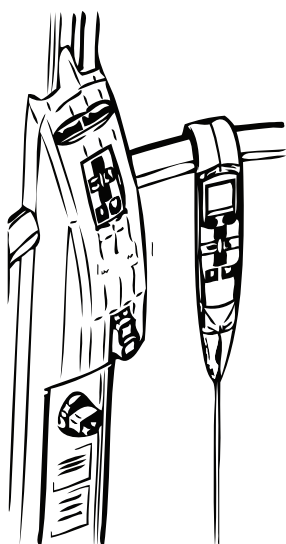

Posición reclinada con DPS

Bajar bastidor

Cerrar patas


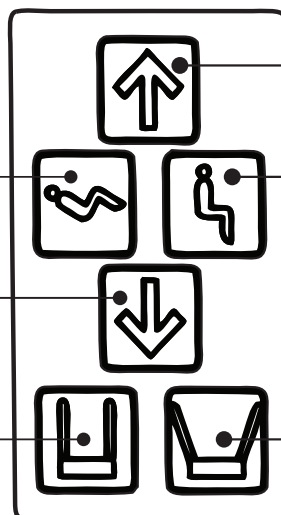


Subir bastidor

Posición sentada con DPS



Abrir las patas

Acoplamiento del arnés de bucles

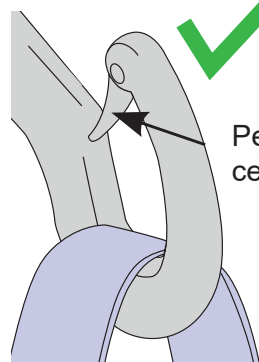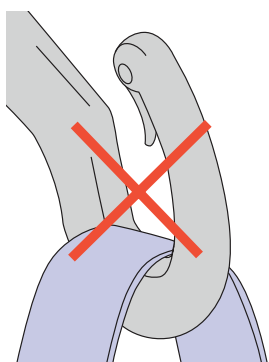


Pestillo cerrado

Acoplamiento del arnés de clips

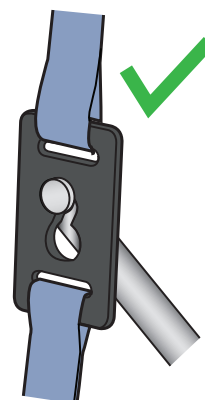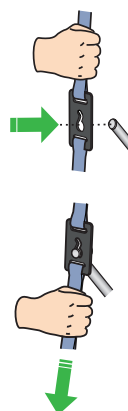


Acople y fije el clip en la orejeta antes de levantar al paciente.

Extracción del accesorio

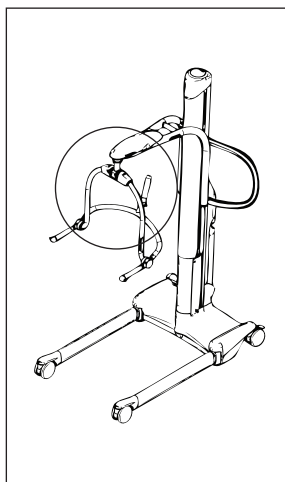


1

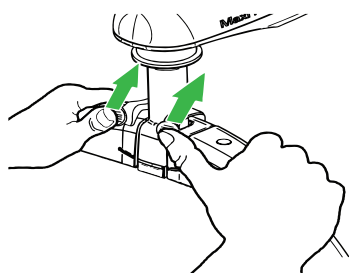


Presione los pulsadores del clip de sujeción.

2

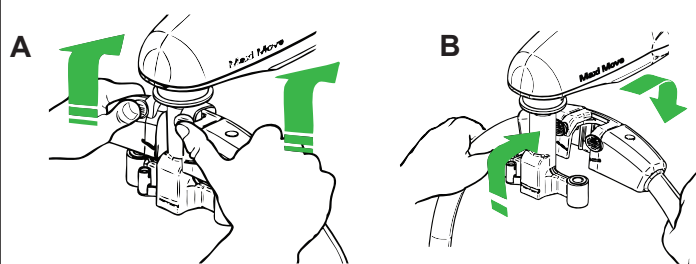


Levante el accesorio (A) y sepárelo (B) del bastidor.

Instalación del accesorio


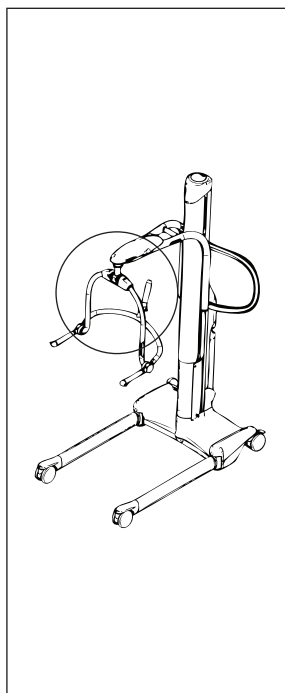


1

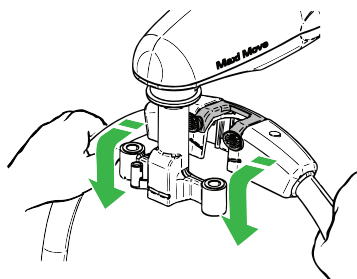


Coloque el accesorio alrededor del bastidor, con los pulsadores hacia delante.

2

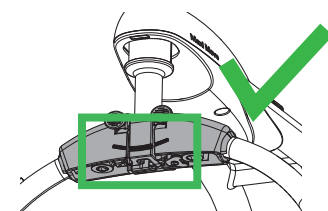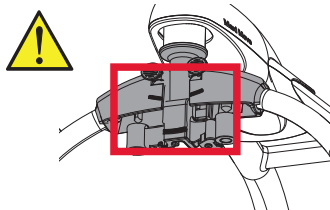


Las marcas del accesorio están alineadas.

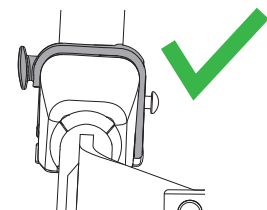


El clip de sujeción está perfectamente enganchado.

Fallo en el suministro eléctrico: descenso del brazo

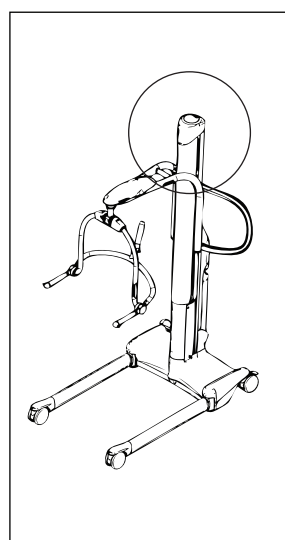


1

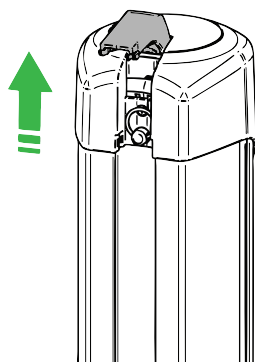


Levante la palanca

2

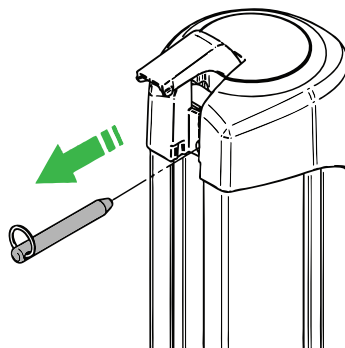

Retire el pasador de bloqueo.

3

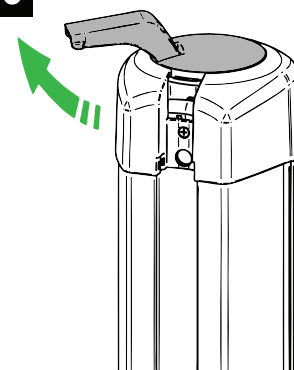

Use la palanca como manivela y gírela una vuelta en sentido horario.

