


# Maxi Move


## Zakładane i zwalnianie hamulca

Zakładanie hamulca

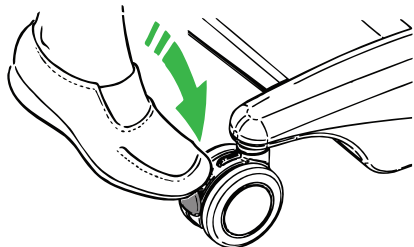


Używać wyłącznie podczas przechowywania i podjazdu. Nie zakładać hamulców, unosząc pacjenta w inny sposób.

Zwalnianie hamulca

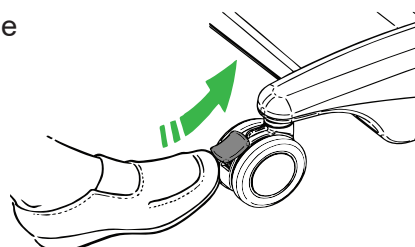


## Przyciski na panelu sterowania i pilocie

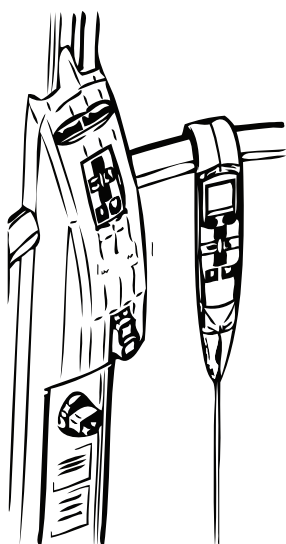

DPS w pozycji odchylonej

Rama w dół

Nogi złożone


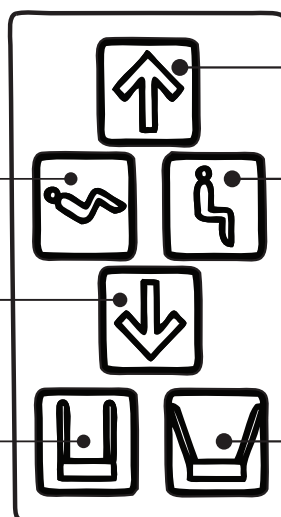


Rama w górę

DPS w pozycji siedzącej



Nogi rozłożone

## Mocowanie nosidla pętlowego

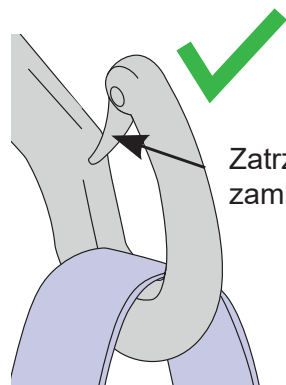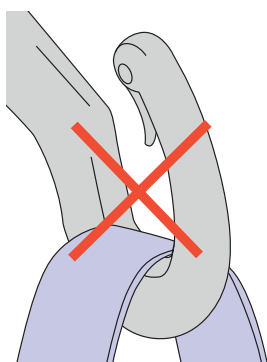


Zatrzask zamknięty

## Mocowanie nosidla zaciskowego

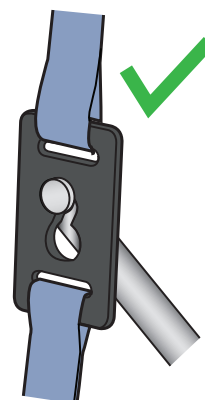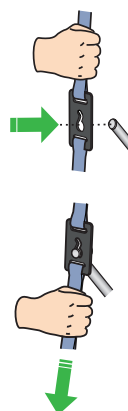


Zapiąć zatrzask przed umieszczeniem pacjenta.

## Zdjęcie mocowania

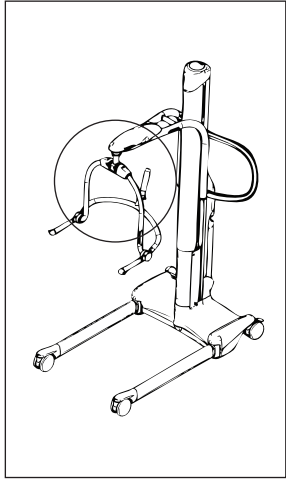


1

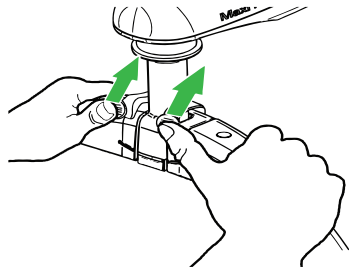


Kciukami wcisnąć przyciski kciukowe zatrasku.

2

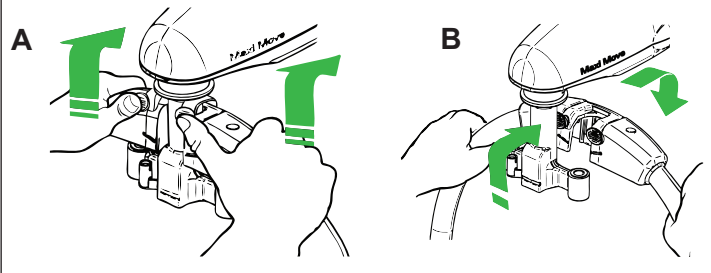


Mocowanie przesunąć do góry (A) i odsunąć od stelaża (B).

## Założenie mocowania

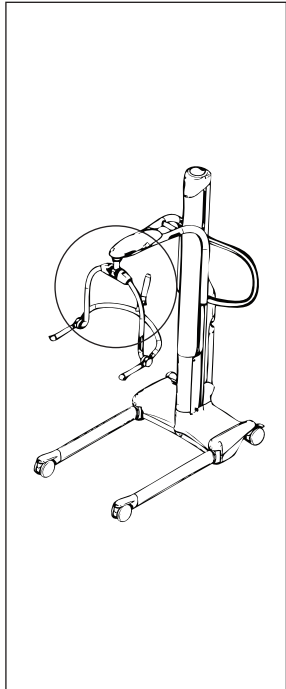


1

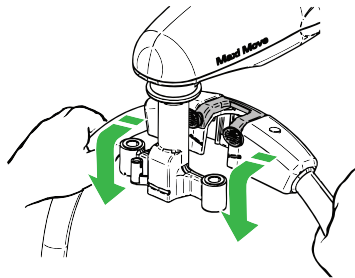

Mocowanie założyć wokół stelażu, przyciskami kciukowymi do przodu.


2

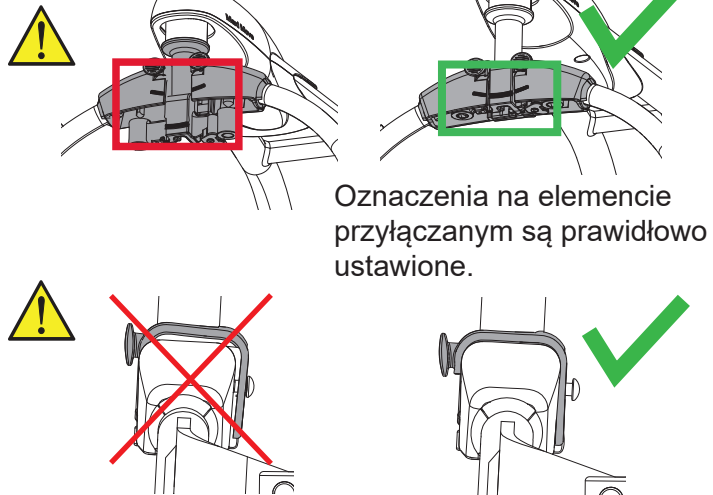


Oznaczenia na elemencie przyłączanym są prawidłowo ustawione.

Zacisk blokujący jest zaciśnięty do oporu.

## Brak zasilania — obniżyć wysięgnik

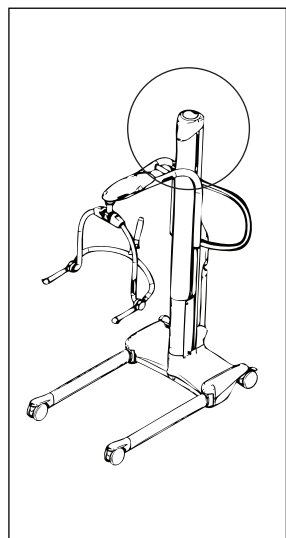


1

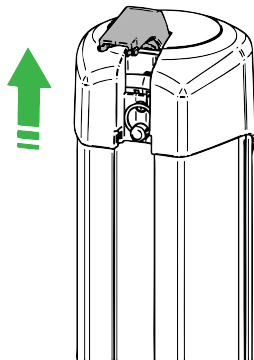


Podnieść dźwignię

2

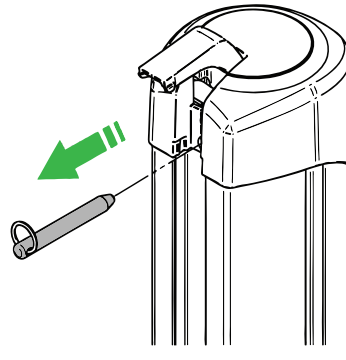

Wyjąć bolec blokujący.

3

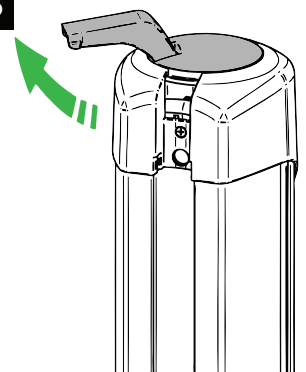

Użyć dźwigni jak korbki. Przesunąć o jeden obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara.