

Maxi Sky 2 PLUS



Transferencia desde la posición sentada a la posición supina

1




Coloque el arnés alrededor del paciente. Si el arnés cuenta con reposacabezas, extiéndalo hasta la parte superior de la cabeza del paciente.

2



Tire de las correas de las piernas para que pasen por debajo, de modo que salgan al otro lado por la parte interior de los muslos.

3

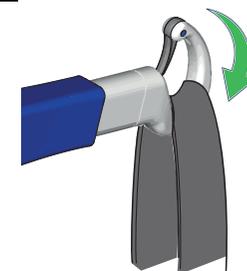


Inserte el bucle de sujeción en el gancho. Asegúrese de que el pestillo de seguridad esté cerrado.

4




Incline el bastidor a 45°, acercándolo lo suficiente para enganchar los bucles de los hombros y, a continuación, los de las piernas. Levante en primer lugar el lado de los pies del bastidor mediante el botón «Recline» para crear tensión en los bucles de las piernas.

5

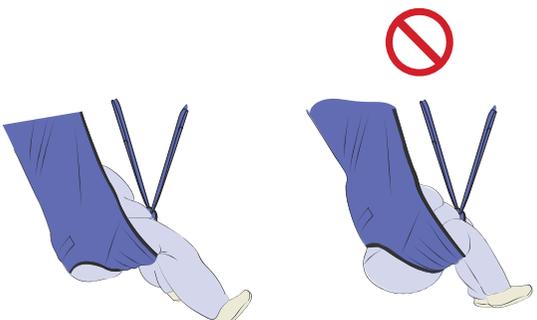


Asegúrese de que el arnés esté correctamente instalado y rodee bien las nalgas del paciente para ofrecerle un mejor soporte.

6

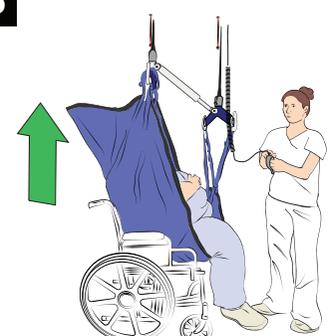

Levante al paciente.

7

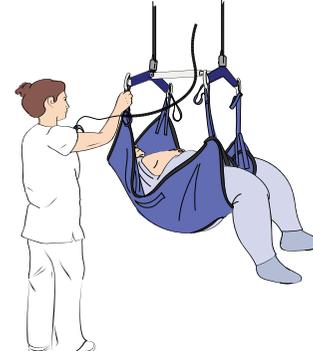

Desplace al paciente.

8



Baje al paciente hasta que no haya tensión en los bucles. Desenganche los bucles de las piernas y, a continuación, los de los hombros.

Transferencia desde la posición supina a la posición sentada

1




Vuelva al paciente sobre su costado. Doble el arnés por la mitad y póngalo sobre la cama, a lo largo de la espalda del paciente.

2




Vuelva el paciente de nuevo sobre el arnés, y luego en la dirección opuesta, de modo que pueda estirarse la parte plegada del arnés.

3

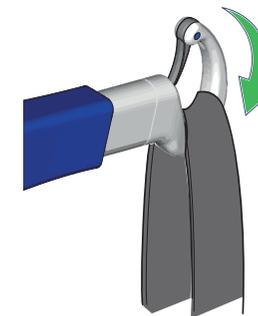


Inserte el bucle de sujeción en el gancho. Asegúrese de que el pestillo de seguridad esté cerrado.

4

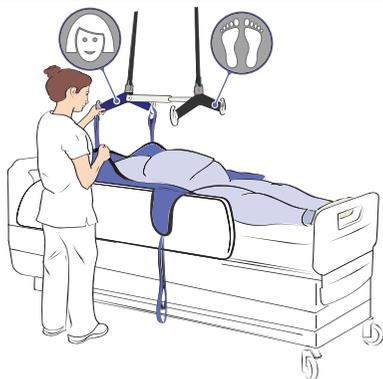

Coloque el bastidor en posición horizontal y lo bastante cerca para enganchar los bucles. Enganche al bastidor los bucles del arnés para los hombros y las piernas.

5

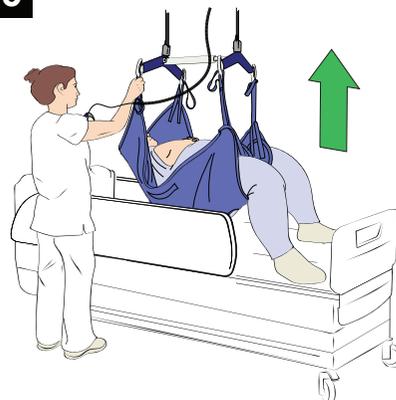


Levante al paciente.

6





Desplace al paciente.

7

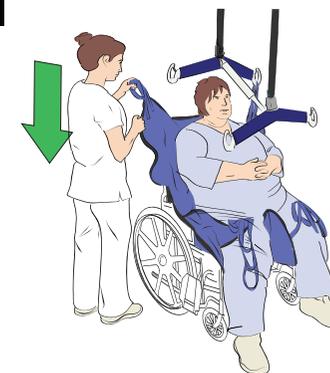


Baje al paciente hasta que no haya tensión en los bucles. Desenganche los bucles de las piernas y, a continuación, los de los hombros.

Recolocación: hacia arriba o hacia un lado de la cama

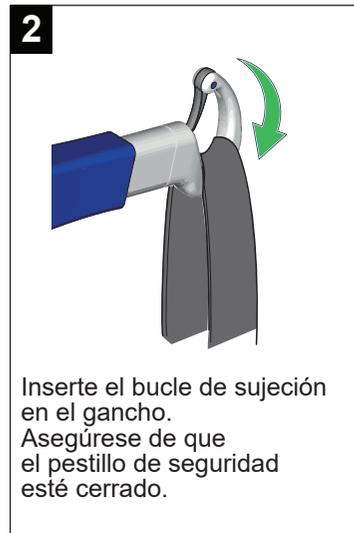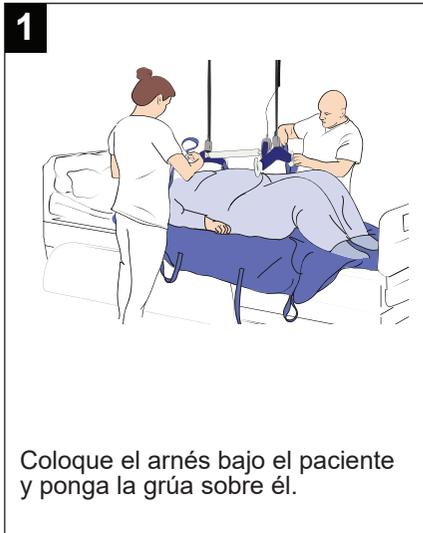

Recolocación: girar al paciente en la cama

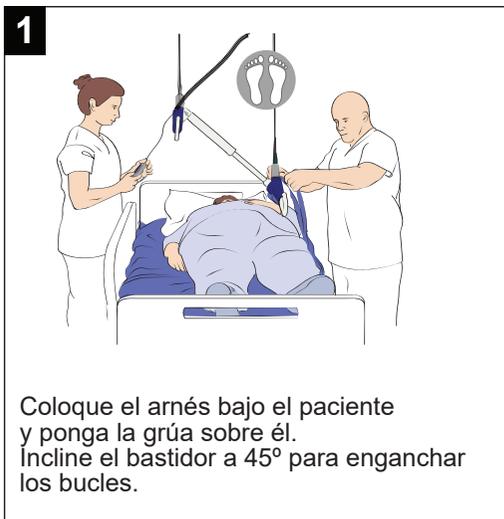


Transferencia lateral entre superficies planas adyacentes

1




Acerque la grúa lo bastante para enganchar los bucles.

2

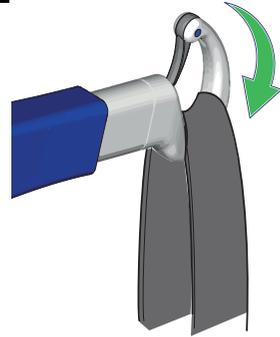


Inserte el bucle de sujeción en el gancho. Asegúrese de que el pestillo de seguridad esté cerrado.

3

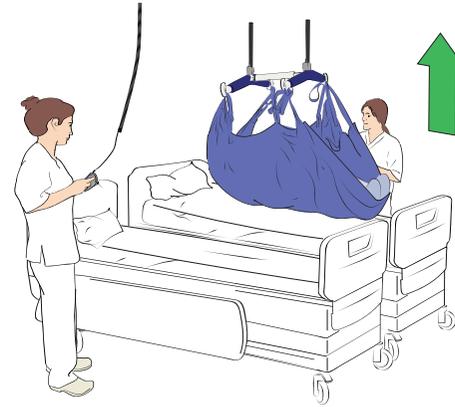


Enganche los bucles al bastidor. Levante al paciente hasta que esté completamente suspendido.

4

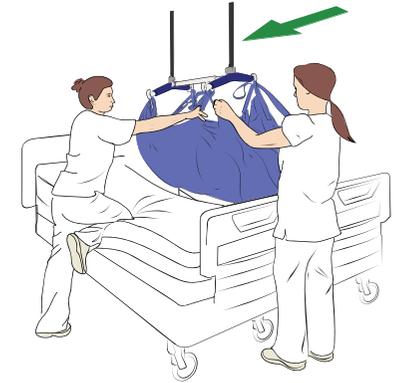

Mueva al paciente hacia la nueva superficie. Coloque al paciente en el centro de la nueva superficie.

5

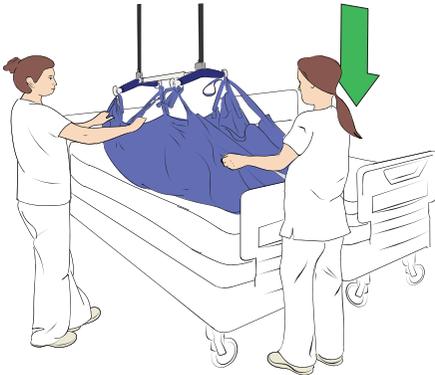

Baje al paciente hasta la cama. Baje más el bastidor para poder desenganchar los bucles. Suba el bastidor y aleje la grúa de techo del paciente.

