

# Maxi Sky 2 PLUS



## Transfert depuis une position assise vers une position allongée

**1**




Positionner le harnais autour du patient. Si le harnais est muni d'un repose-tête, l'étendre jusqu'au sommet de la tête du patient.

**2**




Tirer chaque jambièrre sous la cuisse afin qu'elle apparaisse entre les cuisses.

**3**

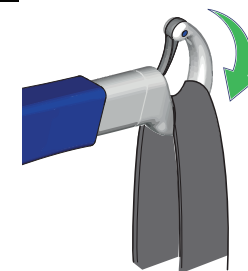


Placer la boucle d'attache sur le crochet. S'assurer que le loquet de sécurité est fermé.

**4**

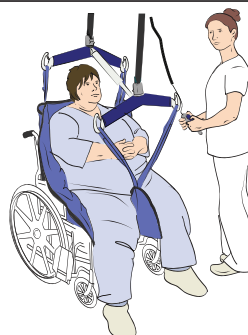


Placer le berceau à 45° et suffisamment proche pour pouvoir attacher les boucles des épaules puis celles des jambes. Lever d'abord le côté pieds du berceau à l'aide du bouton Position inclinée pour créer une tension au niveau des boucles des jambes.

**5**

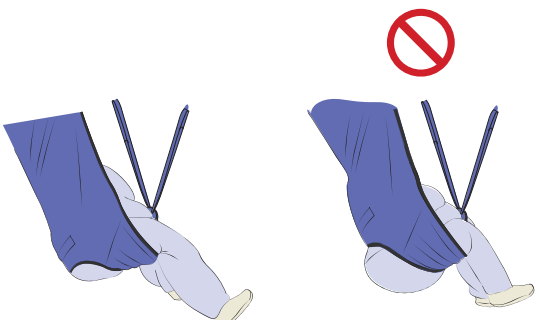


S'assurer que le harnais est correctement installé et entoure les fesses du patient pour apporter un meilleur soutien.

**6**

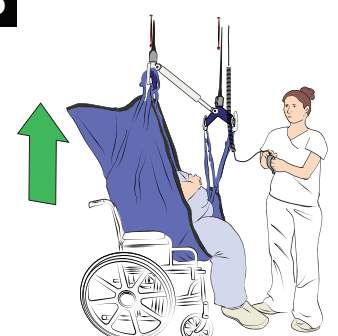

Lever le patient.

**7**

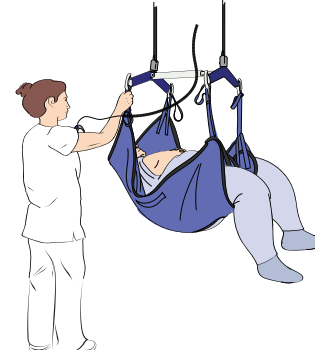

Déplacer le patient.

**8**



Abaisser jusqu'à ce que les boucles ne soient plus tendues. Détacher les boucles des jambes, puis celles des épaules.


## Transfert depuis une position allongée vers une position assise

1




Faire rouler le patient sur le côté. Plier le harnais en deux et le placer sur le lit dans le dos du patient.

2

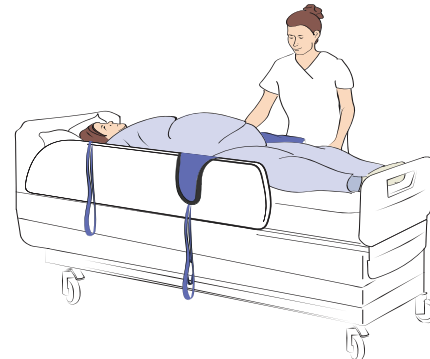


Faire rouler le patient sur le harnais, puis le pousser légèrement dans le sens opposé, afin de déployer la partie pliée du harnais.

3

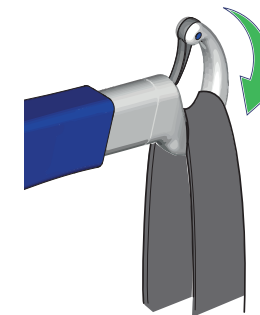


Placer la boucle d'attache sur le crochet. S'assurer que le loquet de sécurité est fermé.

4

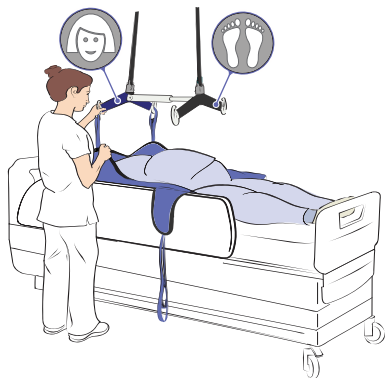


Placer le berceau mobile à plat et suffisamment près pour attacher les boucles. Attacher les boucles du harnais au niveau des épaules et des jambes au berceau.

5

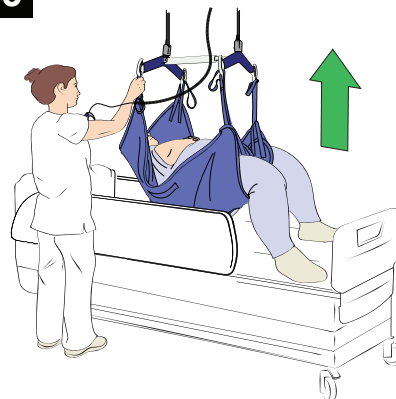


Lever le patient.

6

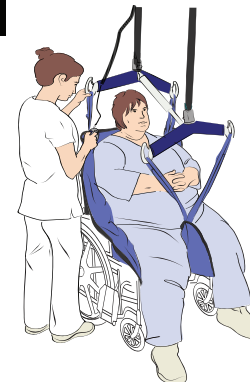

Déplacer le patient.


7

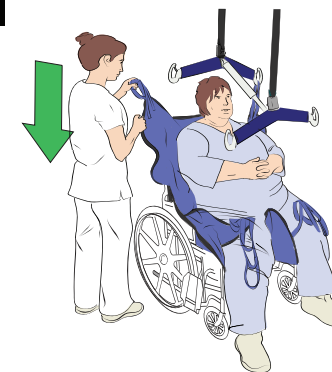

Abaisser jusqu'à ce que les boucles ne soient plus tendues. Détacher les boucles des jambes, puis celles des épaules.


## Repositionnement - déplacement vers le haut ou le côté du lit

**1**

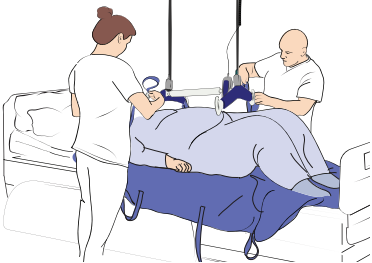

Placer le harnais sous le patient et positionner le lève-personne par-dessus ce dernier.

**2**

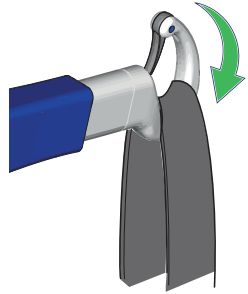

Placer la boucle d'attache sur le crochet. S'assurer que le loquet de sécurité est fermé.

**3**



Attacher autant de boucles de harnais que possible sur le berceau.

**4**



Le soulever jusqu'à ce que ses hanches soient soutenues et le déplacer vers le haut ou sur le côté.


**5**



Abaisser le patient sur le lit et détacher toutes les boucles du harnais.


## Repositionnement - retournement au lit

**1**

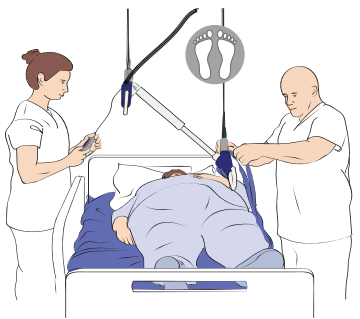


Placer le harnais sous le patient et positionner le lève-personne par-dessus ce dernier. Placer les berceaux mobiles à 45° pour attacher les boucles.

**2**

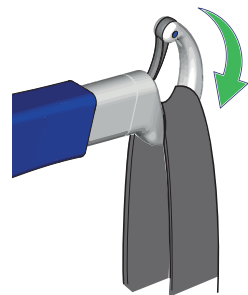


Placer la boucle d'attache sur le crochet. S'assurer que le loquet de sécurité est fermé.

**3**

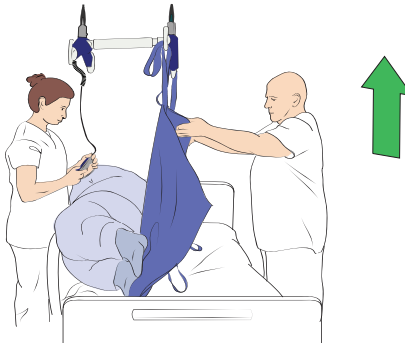

Attacher autant de boucles de harnais que possible sur un côté du harnais du berceau. Relever le berceau jusqu'à ce que le patient soit dans la position souhaitée.


**4**

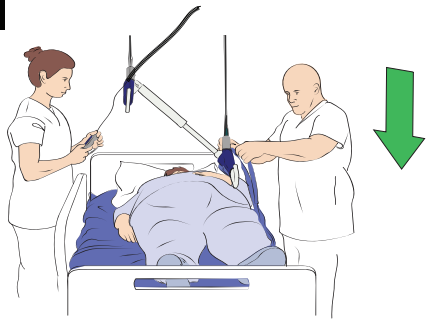

Abaisser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension dans les boucles et les décrocher toutes.


## Transfert latéral - entre des surfaces planes adjacentes

1

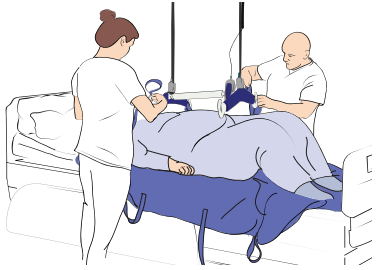


Placer le lève-personne suffisamment proche pour attacher les boucles.

2

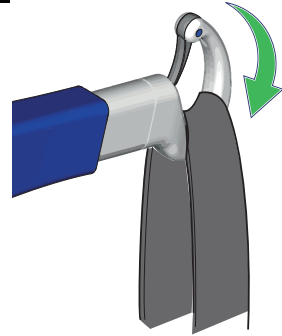


Placer la boucle d'attache sur le crochet. S'assurer que le loquet de sécurité est fermé.

3

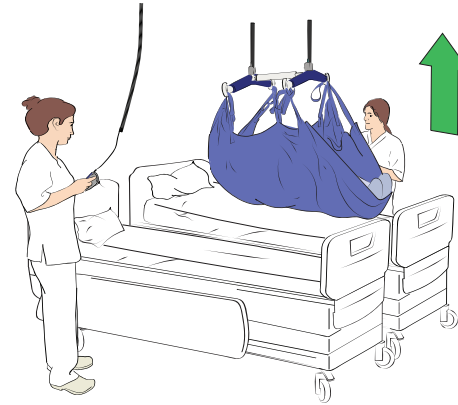


Attacher les boucles au berceau. Lever le patient jusqu'à ce que le patient soit entièrement soutenu.

4

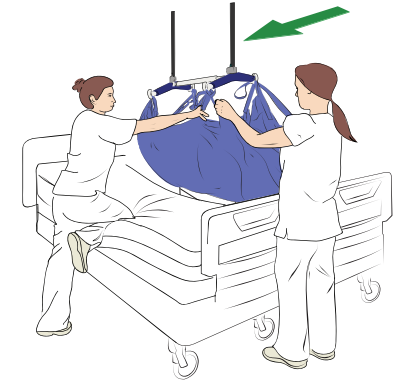

Déplacer le patient vers la nouvelle surface. Positionner le patient au centre de la nouvelle surface.

5

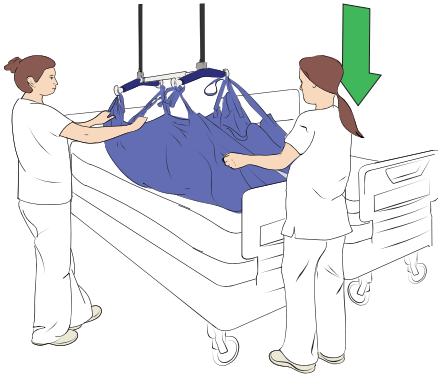

Abaisser le patient sur le lit. Abaisser le berceau pour détacher les boucles. Remonter le berceau et éloigner le lève-personne sur rail du patient.

