

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

Parker



Politique conceptuelle et droits d'auteur

® et ™ sont des marques commerciales appartenant au groupe de sociétés Arjo.

© Arjo 2023

Dans le cadre de notre politique d'amélioration permanente, nous nous réservons le droit de modifier la conception de nos produits sans avertissement préalable. Toute copie partielle ou totale du contenu de cette notice est interdite sans l'autorisation d'Arjo.

Table des matières

Mesures de sécurité	5
Dimensions et poids	6
Préparation du site	8
Sol/murs	8
Espace requis autour de la baignoire	8
Déballage et assemblage	10
Préparatifs	10
Éléments de la baignoire Parker	10
Éléments de l'évacuation	11
Installations spéciales	11
Raccordement de l'eau	12
Instructions pour une installation correcte des conduites d'eau	12
Montage de la baignoire Parker	14
Emplacement définitif	14
Vue d'ensemble de l'installation	16
Installation électrique	17
Installation de l'évacuation	18
Installation de l'évacuation – Sol	18
Installation de l'évacuation – Mur	20
Alimentation en eau froide et chaude	22
Arrivée d'eau	22
Étalonnage du mitigeur thermostatique	24
Remplacement du flacon de désinfectant	26
Support de douche (option pour le Royaume-Uni uniquement)	28
Exigences et spécifications relatives au site	30

Laissé volontairement vide

Précautions de sécurité

Définitions utilisées dans cette notice

AVERTISSEMENT

Signification :

Avertissement de sécurité. Tout(e) incompréhension ou non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures pour l'opérateur ou autrui.

MISE EN GARDE

Signification :


Le non-respect de ces instructions peut endommager tout ou partie du système.

REMARQUE

Signification :

Information importante relative à l'utilisation du système ou de l'équipement.

Il convient de s'assurer que les composants de l'alimentation électrique correspondent bien aux données sur l'étiquette.

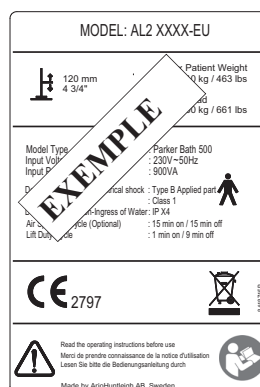

Exemple d'étiquette



Exemple d'étiquette d'identification

Assurez-vous que l'assemblage est effectué :

- par un personnel qualifié.
- conformément aux codes locaux.
- conformément aux réglementations locales.


Veillez à ne pas démonter la baignoire pendant la procédure d'installation.

Une fois l'assemblage et l'installation terminés, vérifiez que :

- tous les éléments sont montés conformément aux instructions d'assemblage.
- les pièces ne présentent pas de bords tranchants susceptibles de blesser le patient.
- tous les flexibles, tuyaux et raccords sont intacts et ne présentent pas de fuites d'eau.
- aucun flexible ou tuyau ne risque de se coincer dans une des sections mobiles de l'unité.
- toutes les fonctions de la baignoire marchent normalement.
Si nécessaire, procédez à des réglages.
- les autres dispositifs électriques (par ex. télécommande) à proximité immédiate de la baignoire sont protégés contre toute immersion dans l'eau.

Dimensions et poids



La baignoire *Parker* est livrée dans une seule boîte.

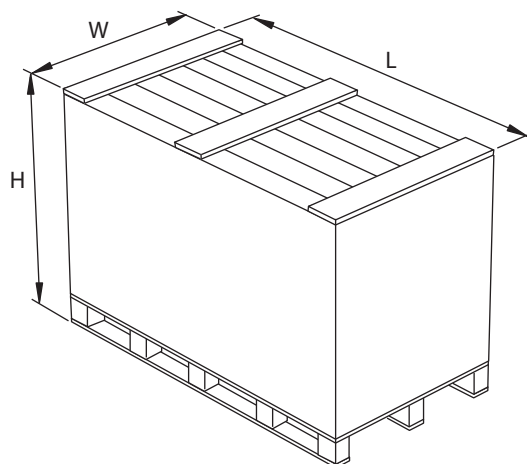

Dimensions, boîte avec contenu		
L = longueur	2 035 mm	(80 1/8")
H = hauteur	1 128 mm	(44 3/8")
I = largeur	948 mm	(37 3/8")

Poids, boîte avec contenu approximatif		
En fonction des options sélectionnées	189 – 196 kg	(417 – 432 lb)

Poids, baignoire <i>Parker</i>		
En fonction des options sélectionnées	124-131 kg	(273 – 289 lb)

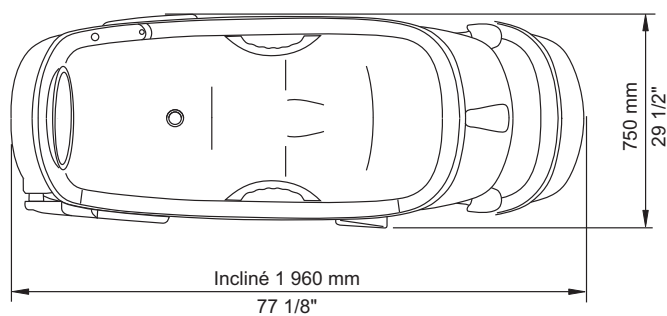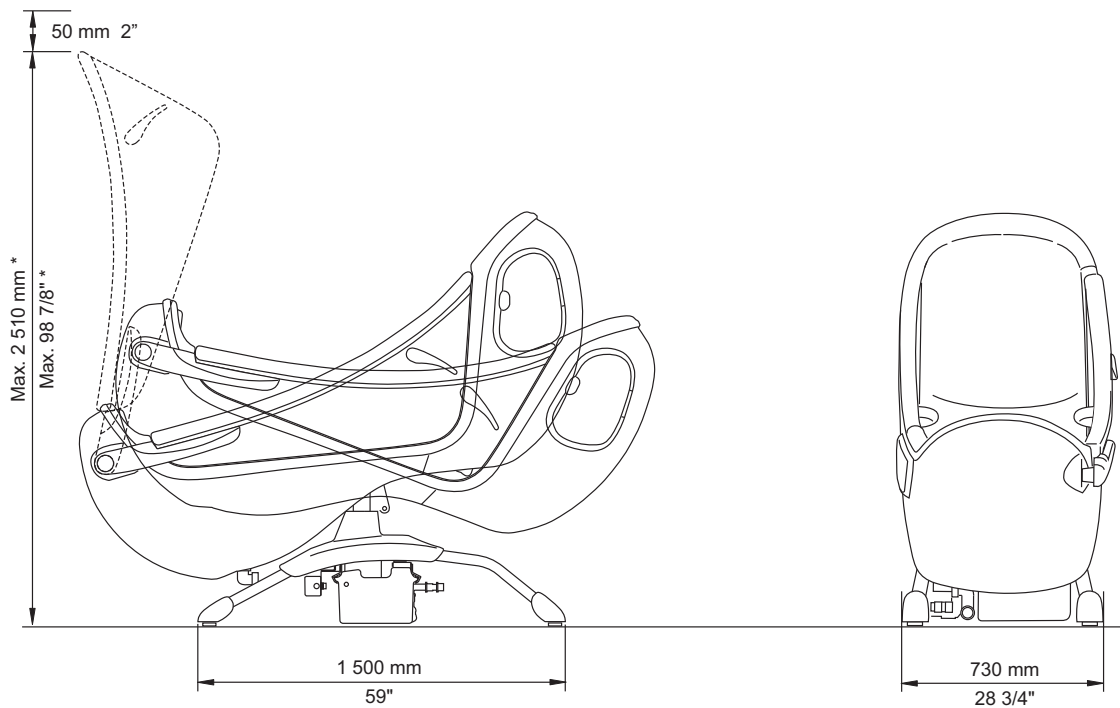

* Ces dimensions sont approximatives et doivent être considérées comme des exigences minimales, sauf indication contraire.

Préparation du site

Sol/murs

Avant d'installer la baignoire *Parker*, le sol et les murs du périmètre nécessaire doivent être terminés.

Le sol doit être fabriqué dans un matériau antidérapant et être résistant à l'eau.


Lors de l'utilisation d'une évacuation au sol, le sol doit avoir une pente maximale de 1:50 en direction de l'évacuation, avec une capacité d'évacuation dépassant la capacité minimale d'évacuation.

Une évacuation au sol est nécessaire en cas d'ouverture involontaire de la porte de la baignoire ou de remplissage excessif de la baignoire.

La porte ne doit pas comporter de seuil mais, si un seuil est nécessaire, il doit être en caoutchouc souple dépressible afin de faciliter l'utilisation d'équipements mobiles.

La baignoire *Parker* doit être installée à plus de 250 mm (10") de tout objet fixe afin d'éviter que des parties du corps se coincent. Il convient également de s'assurer qu'il y a 50 mm (2") entre la porte de la baignoire *Parker* complètement ouverte et le plafond.

Si un lève-personne sur rail est utilisé avec la baignoire *Parker*, il convient de s'assurer que les rails sont centrés au-dessus de la baignoire ou que la baignoire est centrée sous les rails, selon l'élément installé en premier.

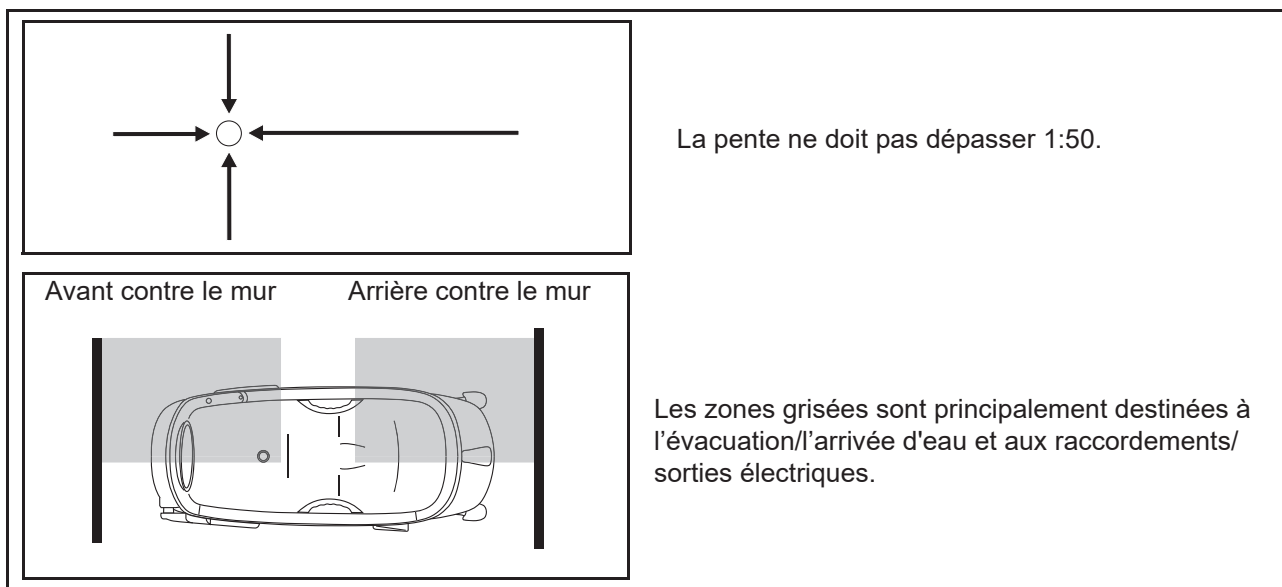

La pente ne doit pas dépasser 1:50.

Les zones grisées sont principalement destinées à l'évacuation/l'arrivée d'eau et aux raccordements/sorties électriques.

Espace requis autour de la baignoire

La baignoire *Parker* doit impérativement être installée selon le plan d'encombrement recommandé afin d'assurer des conditions de travail optimales au personnel et au patient. (**Figure 1**)

REMARQUE


L'espace occupé par les meubles et autres objets personnels n'est pas pris en compte dans ces mesures.

REMARQUE


Ces dimensions sont approximatives et doivent être considérées comme des exigences minimales, sauf indication contraire.

1

Position en alcôve/dans un coin

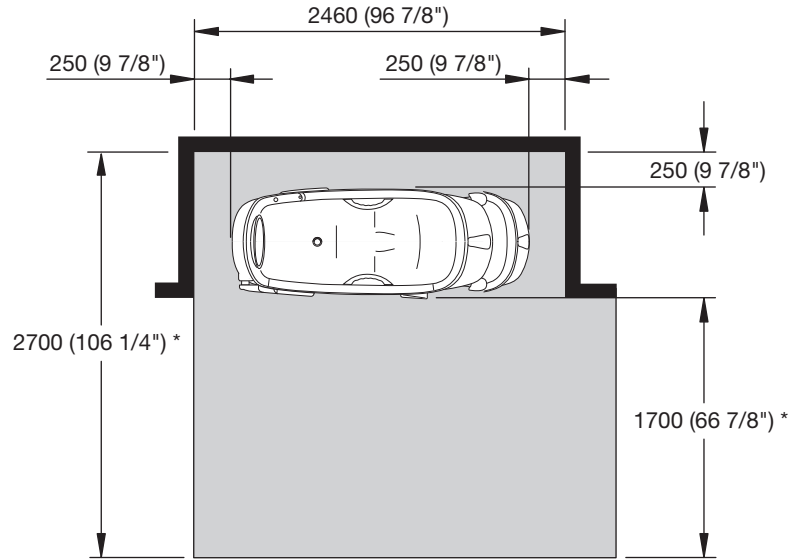

Position péninsulaire

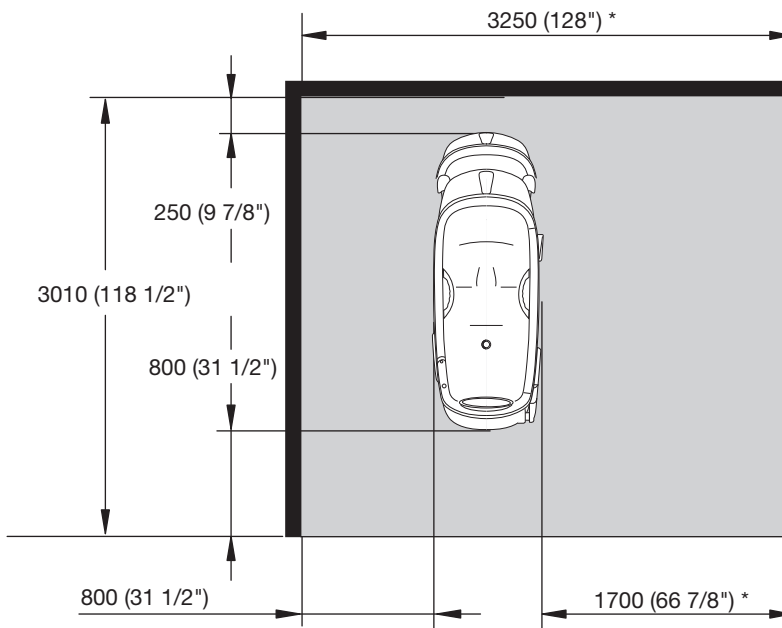

*Espace requis lors de l'utilisation d'un dispositif de levage

Déballage et montage


Préparatifs

MISE EN GARDE


Lors du déballage du produit, assurez-vous toujours que **TOUTES** les agrafes ont été retirées avant de retirer le couvercle extérieur. Cela évitera d'endommager la surface stratifiée.

Retirer le couvercle en bois, puis la boîte couvrant le produit. Vérifiez le contenu :


Éléments de la baignoire *Parker*

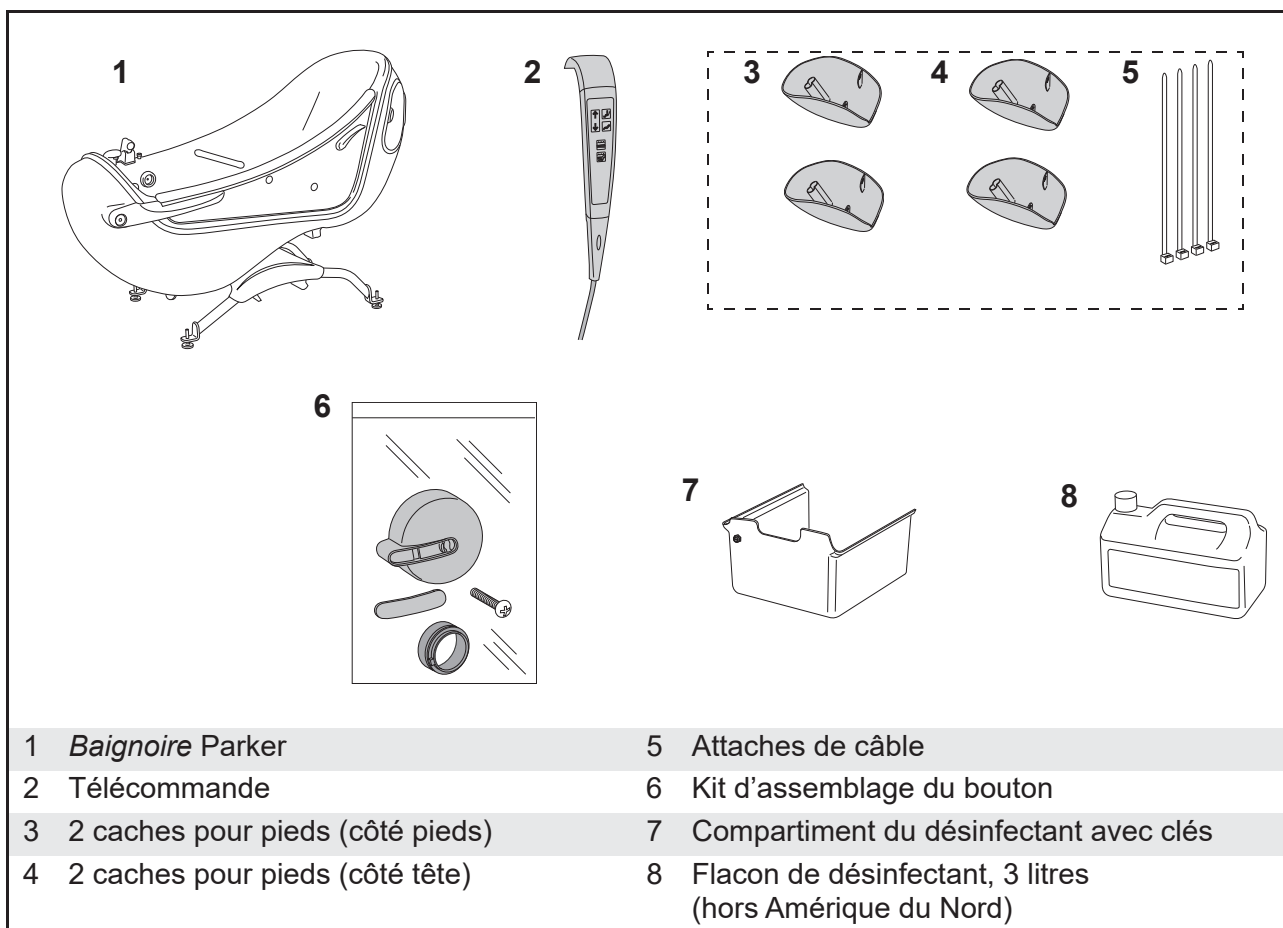

Éléments de l'évacuation

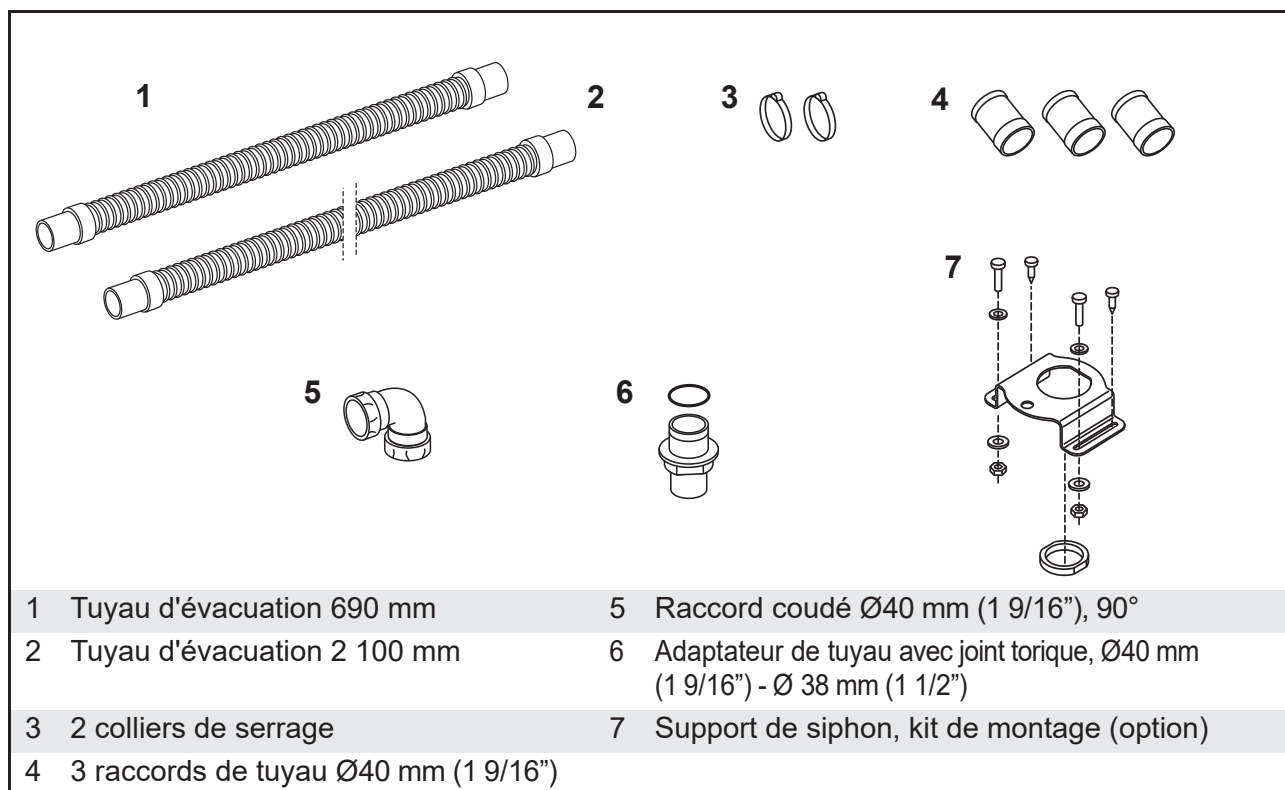

Installations spéciales

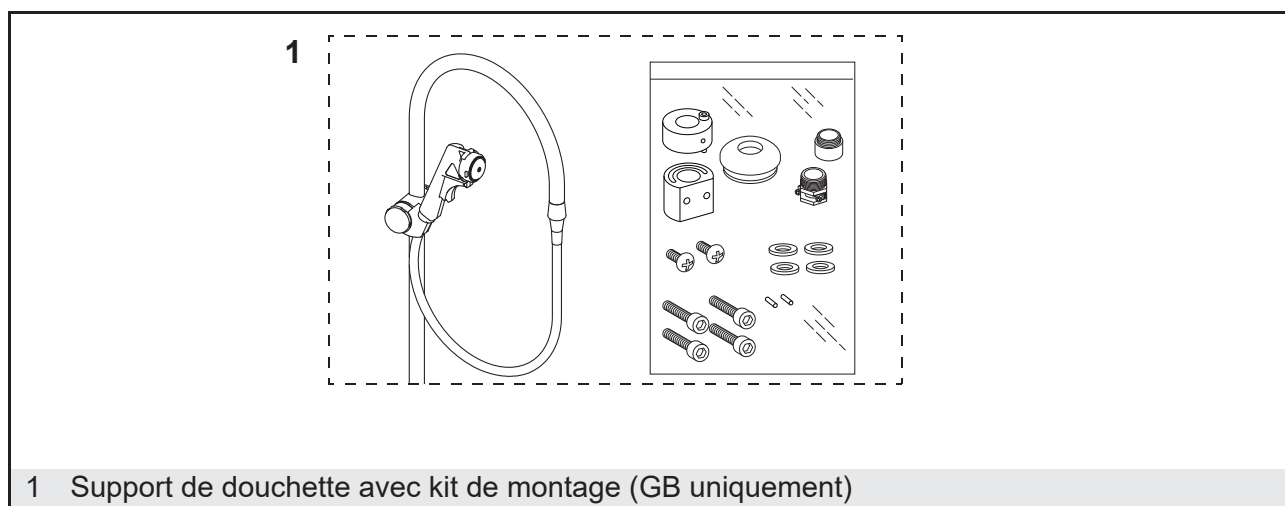

Branchement de l'eau

AVERTISSEMENT

L'arrivée d'eau chaude et froide doit être équipée de vannes d'isolement locales.

MISE EN GARDE

Tous les raccordements et toutes les installations de plomberie doivent être conformes à toutes les réglementations locales, étatiques ou fédérales pertinentes ainsi qu'aux codes de plomberie en vigueur.

REMARQUE

Rincez les tuyaux de raccordement avant de les brancher sur le mitigeur.

REMARQUE

Pour connaître les exigences relatives à l'arrivée d'eau et aux conduites d'eau, voir la rubrique *Exigences et spécifications relatives au site*.

Instructions pour une installation correcte des conduites d'eau

MISE EN GARDE

Les conduites d'eau doivent être placées de manière visible.
Elles ne doivent pas être encastrées, installées dans des tunnels étroits ou dans des endroits inaccessibles où elles ne peuvent pas être atteintes et inspectées.
Les conduites d'eau ne doivent pas être isolées ou recouvertes de matériaux isolants.




MISE EN GARDE

Évitez d'installer les conduites d'eau sous tension ou en torsion.



MISE EN GARDE

N'installez pas les conduites d'eau avec un rayon de courbure (R) inférieur à ceux indiqués dans l'illustration.

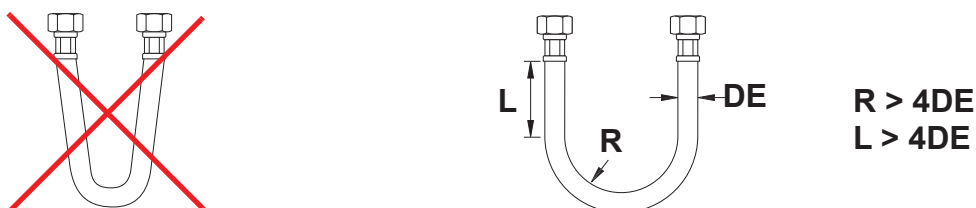

Laissé volontairement vide

Montage de la baignoire *Parker*

Emplacement définitif

AVERTISSEMENT

Avant de soulever la baignoire *Parker*, vérifiez le poids de levage pour vous assurer qu'il est conforme aux réglementations locales.


Avant de soulever la baignoire *Parker* de la palette

Avant de placer la baignoire à son emplacement définitif, contrôlez les points suivants :

- Service d'eau, vannes d'arrêt et de mélange, lignes, tube, etc.
- Système d'évacuation du bâtiment prêt pour la connexion.
- Une provision est faite pour le raccordement électrique à l'intérieur de la boîte à bornes.


Retirez la baignoire *Parker* de la palette

1. Pour soulever et déplacer la baignoire en toute sécurité, il est recommandé d'utiliser quatre sangles (non fournies). Attachez une sangle autour de chaque pied de la baignoire *Parker*. (**Figure 1**)
2. Certaines baignoires *Parker* sont équipées d'une base en option située au-dessus des pieds. Soulevez la base pour accéder aux pieds. Les étapes 5 à 7 ne s'appliquent pas.






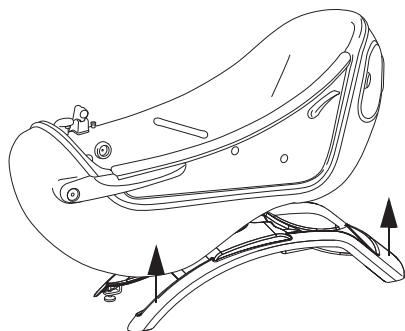


3. Demandez à quatre personnes (deux de chaque côté de la baignoire) de saisir chacune une sangle et de soulever la baignoire *Parker* pour la sortir de la palette. Déplacez la baignoire à l'endroit prévu. (**Figure 2**)


4. Tournez l'écrou de chaque pied pour régler la hauteur de la baignoire *Parker* et verrouillez la position. Assurez-vous que la baignoire *Parker* est de niveau et qu'elle est stable. (**Figure 3**)
5. Placez chaque cache de pied par-dessus la vis. Les deux plus grands caches sont destinés aux pieds côté tête de la baignoire. Chaque cache est doté de rails et peut être utilisé du côté gauche ou du côté droit. (**Figure 4**)

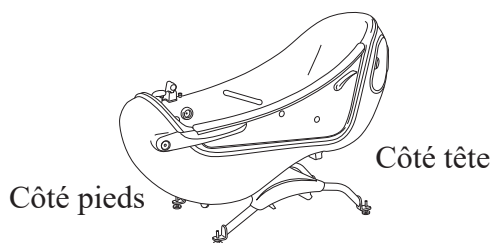

6. Les caches doivent être alignés avec les pieds. Montez chaque cache conformément à l'illustration. (**Figure 5**)
7. Attachez chaque cache de pied à l'aide d'attaches de câble. (**Figure 6**)

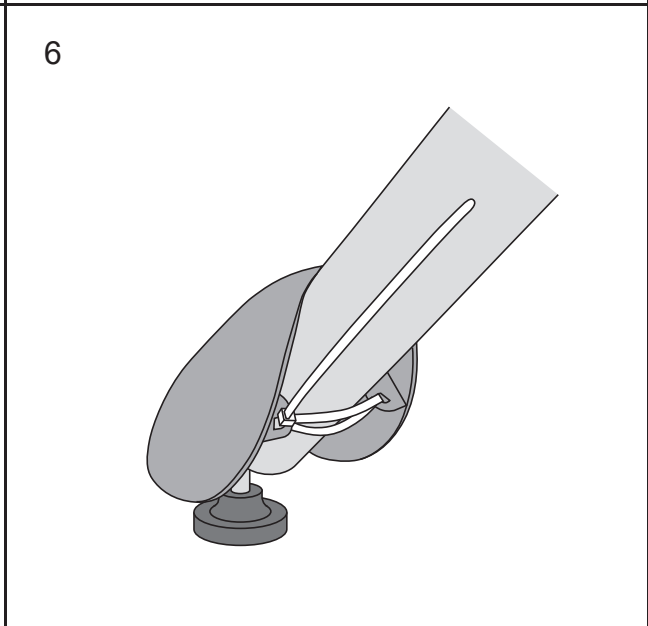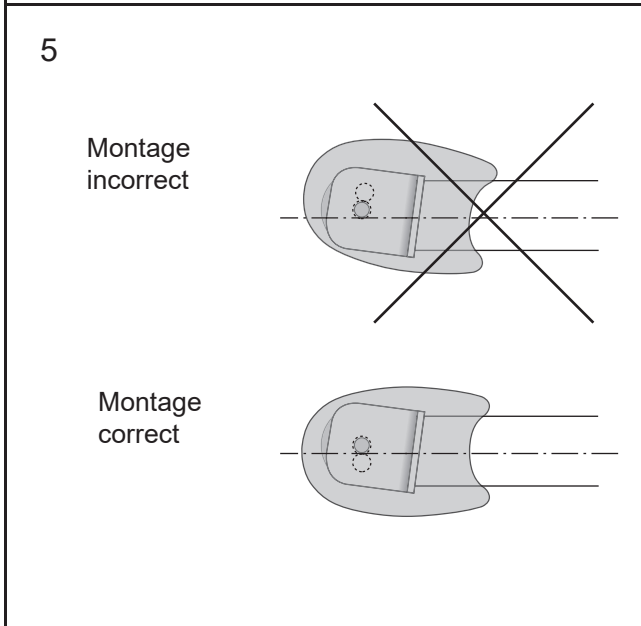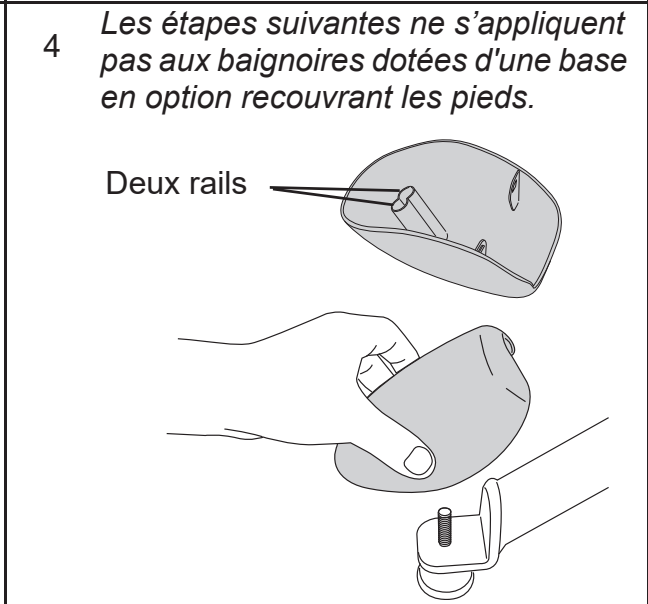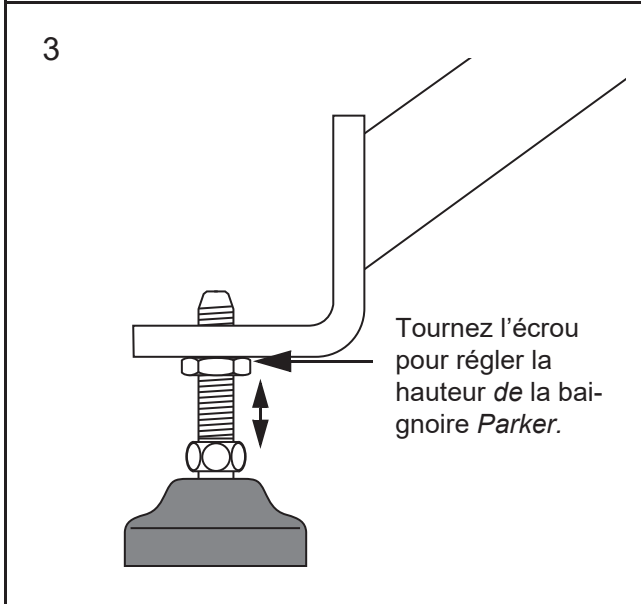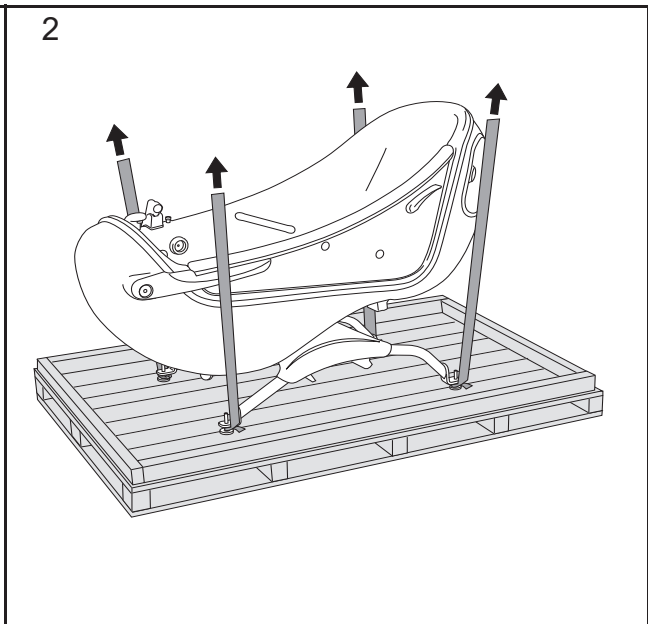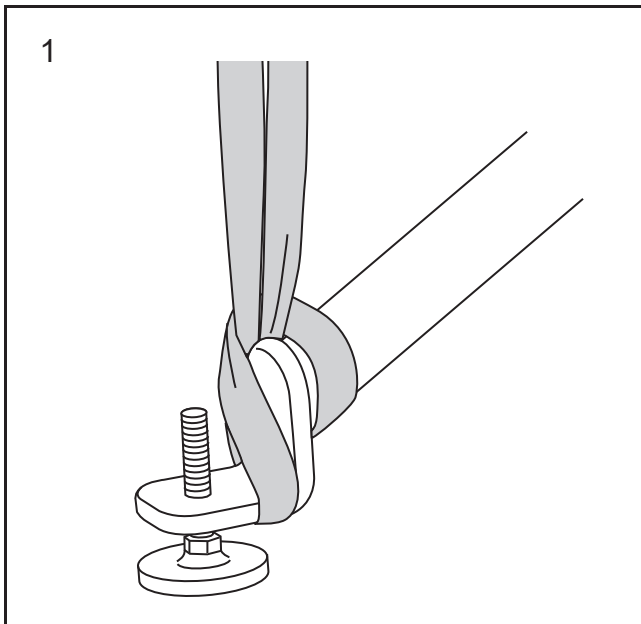

Vue d'ensemble de l'installation

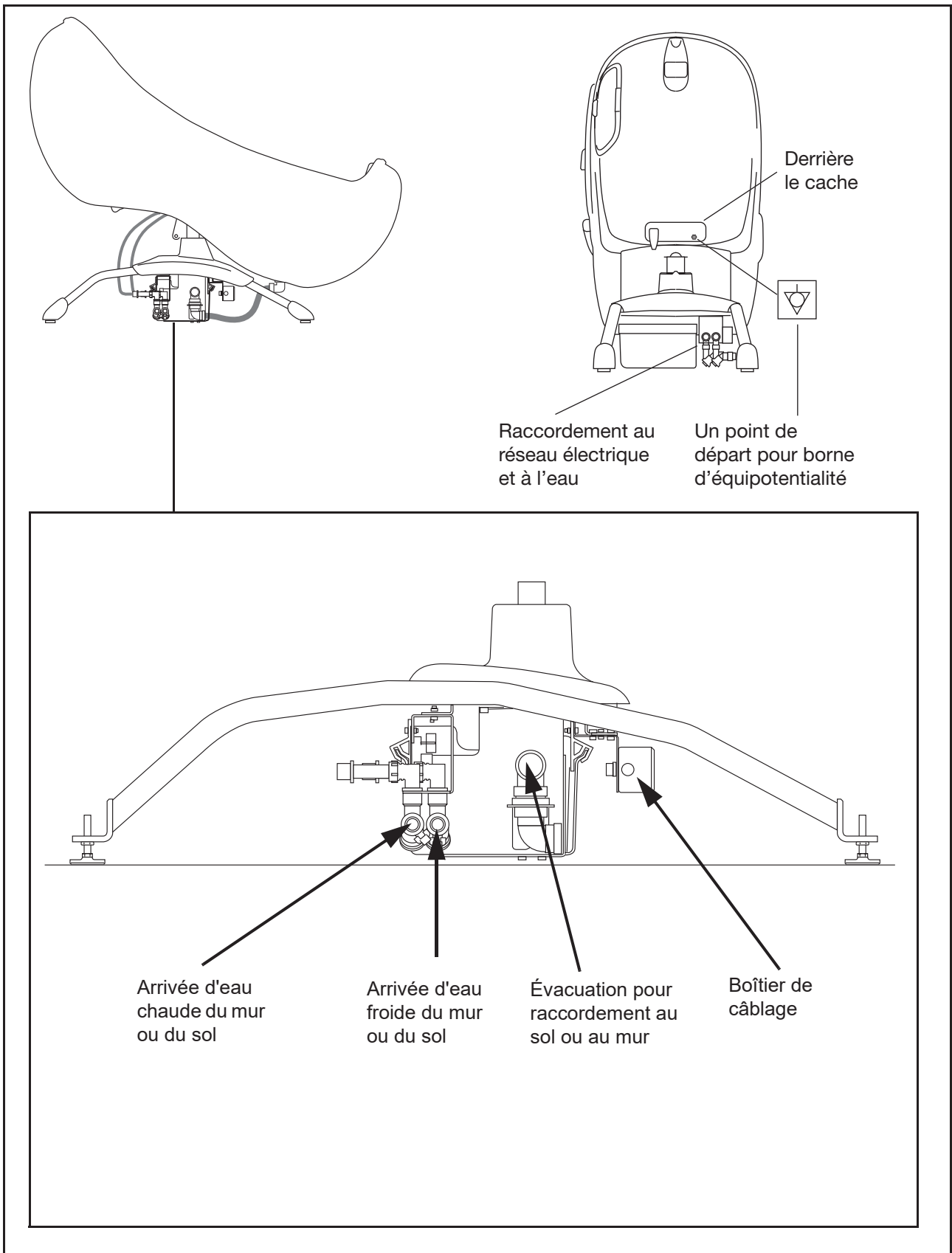

Installation électrique

AVERTISSEMENT


- Tous les travaux de plomberie et d'électricité doivent être réalisés par du personnel qualifié conformément aux réglementations et aux codes locaux.
- Pour prévenir tout risque de choc électrique, cet équipement ne doit être branché qu'à une alimentation secteur avec mise à la terre.
- L'unité doit être raccordée depuis le point de liaison indiqué sur l'appareil jusqu'au point de la borne d'équipotentialité de la pièce, ou, si autorisé par la réglementation locale, via la mise à la terre. Il en va de même pour tous les équipements fixes à proximité de la baignoire.
- L'appareil doit être continuellement sous tension et branché dans un dispositif de déconnexion électrique, et dans un fusible séparé avec disjoncteur en cas de défaut de masse conformément aux codes et aux règlements locaux.
- Le produit doit être protégé par un disjoncteur différentiel (non fourni).
- Il convient de vérifier que la tension d'alimentation correspond bien aux informations sur l'étiquette des données.
- Le câble d'alimentation secteur doit bénéficier d'une protection mécanique supplémentaire adéquate, à la fois sur la distance parcourue au-dessus ou au sol, ainsi que sur le mur.
- Le câble d'alimentation secteur doit être protégé contre tout écrasement par des équipements munis de roulettes.
- Le câble de raccordement secteur doit être équipé d'un dispositif de décharge de traction adéquat.
- Le type de câble d'alimentation secteur doit être choisi de manière à pouvoir résister à la chaleur, à l'humidité et à la charge chimique susceptibles d'être rencontrées à l'emplacement prévu.

Marché	Tension	Fréquence	Fusible d'alimentation secteur Fusibles externes	Consommation d'énergie max.	Disjoncteur à courant résiduel*
Europe	230 V CA monophasé	50 Hz	10A	800 VA	30 mA
Amérique du Nord	120 V CA monophasé	60Hz	15A	800 VA	30 mA

**En Amérique du Nord, le disjoncteur à courant résiduel équivaut à un disjoncteur différentiel.*

Brancher les câbles comme indiqué ci-dessous :

- Neutre au câble (N)
- Phase au câble (L)
- Mise à la terre au câble jaune/vert (PE)

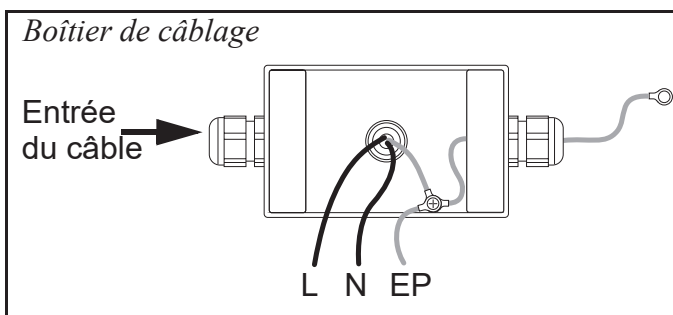

Branchement de l'évacuation

Conditions exigées pour l'évacuation	
Capacité d'évacuation min.	100 l/min (26,5 gal/min)
Dimensions du raccord d'évacuation	Ø38 (1 1/2")/Ø40 mm (1 9/16") (dimensions intérieures) Ø46 mm (1 13/16") (dimensions extérieures)
La baignoire doit être raccordée à l'évacuation. Un support de siphon anti-refoulement doit être utilisé si nécessaire.	
Effectuer les raccordements conformément aux réglementations locales.	

REMARQUE

L'évacuation installée sur le siphon au sol ou au mur doit être conforme à toutes les réglementations locales.

Installation de l'évacuation – Sol (Figure 1)

1. Raccordez le tuyau d'évacuation au raccord de tuyau et serrez-le à l'aide d'un collier de serrage.
2. Fixez l'extrémité ouverte du raccord de tuyau dans le siphon.
3. Fixez le tuyau d'évacuation à l'évacuation au sol.

Installez le support de siphon anti-refoulement sur l'évacuation.

(Le support de siphon peut être commandé séparément.) (Figure 2)

Après avoir raccordé le tuyau d'évacuation au siphon conformément aux étapes 1 et 2 ci-dessus,


1. raccordez l'extrémité ouverte du tuyau d'évacuation au raccord de tuyau et serrez-le avec un collier de serrage.
2. Fixez l'extrémité ouverte du raccord de tuyau dans le raccord coudé.
3. Coupez l'adaptateur de tuyau juste sous le filetage. (Voir figure 2A)
4. Placez le joint torique sur l'adaptateur de tuyau. Insérez ensuite l'adaptateur dans l'extrémité ouverte du raccord coudé.

5. Insérez maintenant l'extrémité ouverte de l'adaptateur de tuyau dans le support du siphon anti-refoulement et serrez-le par-dessous à l'aide d'un écrou.
6. Fixez le support du siphon anti-refoulement à l'évacuation au sol de l'une des manières suivantes :
 - soulevez le cache de l'évacuation au sol et fixez le support à l'aide des vis M5, des rondelles M5 et des écrous Nyloc M5, ou
 - marquez le cache au travers des fentes du support et percez 2 trous de 3,5 mm. Fixez le support à l'aide des vis autotaraudeuses et des rondelles M5.
7. Assurez-vous que la baignoire est placée de manière à pouvoir être utilisée sans endommager le tuyau.
8. Si la baignoire a été équipée d'une unité *MultiClean*TM, le support du siphon anti-refoulement comporte également un trou pour raccorder le tuyau *MultiClean*.

REMARQUE


Voir les *instructions de montage et d'installation du MultiClean* pour plus de détails.

1


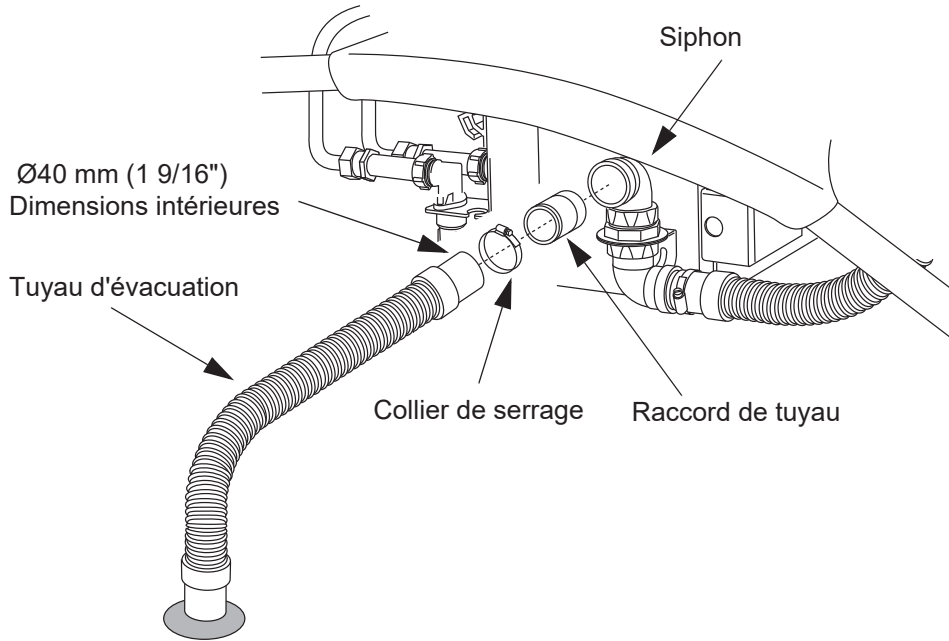


2

Adaptateur de tuyau

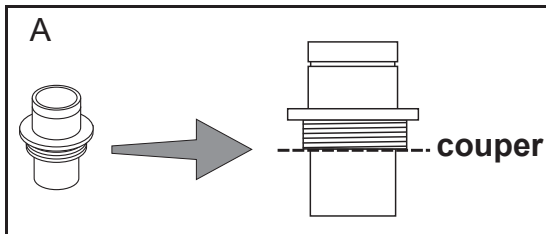

Support de siphon

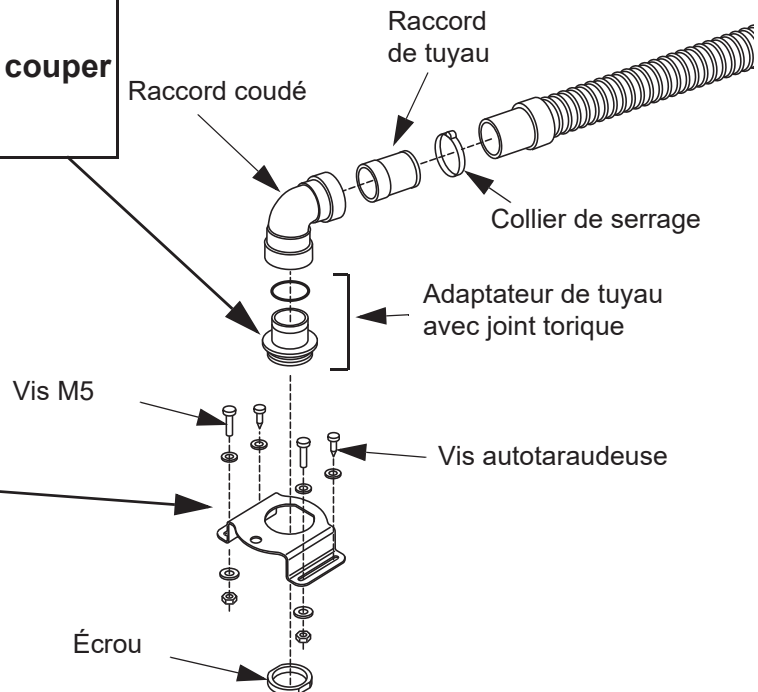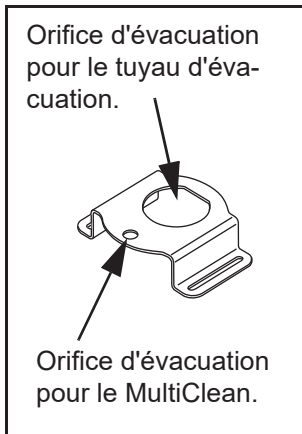

Installation de l'évacuation – Mur

La distance entre le sol et l'évacuation murale ne peut être supérieure à 100 mm (4").

(Figure 1)

Raccordement direct

(Figure 2)

1. Raccordez le tuyau d'évacuation au raccord de tuyau et serrez-le à l'aide d'un collier de serrage.
2. Fixez l'extrémité ouverte du raccord de tuyau dans le siphon.
3. Raccordement dans le mur
 - *Pour raccord de tuyau de Ø40 mm (1 9/16")*
Raccordez l'extrémité ouverte du tuyau d'évacuation au raccord de tuyau et serrez-le avec un collier de serrage. Fixez l'extrémité ouverte du raccord de tuyau sur l'évacuation murale de Ø40 mm.
 - *Pour raccord de tuyau de Ø38 mm (1 1/2")*
Placez le joint torique sur l'adaptateur de tuyau et insérez-le dans l'extrémité ouverte du tuyau d'évacuation. Serrez à l'aide du collier de serrage.
Fixez l'extrémité ouverte de l'adaptateur de tuyau à l'évacuation murale de Ø38 (1 1/2") mm.


Raccordement sur mesure

(Figure 3)


Dans certaines situations, le raccord coudé peut être utilisé pour adapter l'installation.

1. Raccordez le tuyau d'évacuation au raccord de tuyau et serrez-le à l'aide d'un collier de serrage.
2. Fixez l'extrémité ouverte du raccord de tuyau dans le siphon.
3. Raccordez l'extrémité ouverte du tuyau d'évacuation au raccord de tuyau et serrez-le avec un collier de serrage.
4. Fixez l'extrémité ouverte du raccord de tuyau dans le raccord coudé.
5. Raccordement dans le mur
 - *Pour raccord de tuyau de Ø40 mm (1 9/16")*
Raccordez l'extrémité ouverte du raccord coudé au raccord de tuyau. Fixez l'extrémité ouverte du raccord de tuyau sur l'évacuation murale de Ø40 mm.
 - *Pour raccord de tuyau de Ø38 mm (1 1/2")*
Placez le joint torique sur l'adaptateur de tuyau et insérez-le dans l'extrémité ouverte du raccord coudé.
Fixez l'extrémité ouverte de l'adaptateur de tuyau à l'évacuation murale de Ø38 (1 1/2") mm.


1

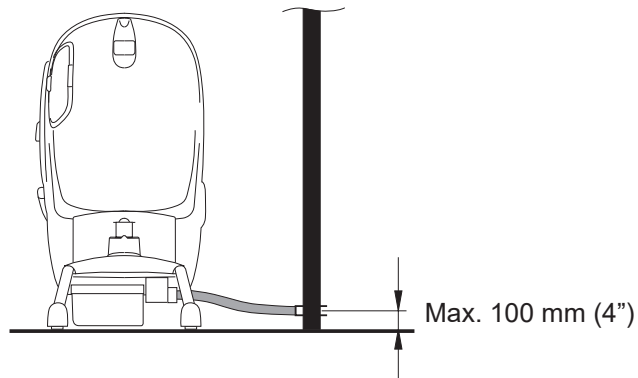

2 Adaptateur de tuyau, à utiliser avec un raccord mural de Ø38 mm (1 1/2")

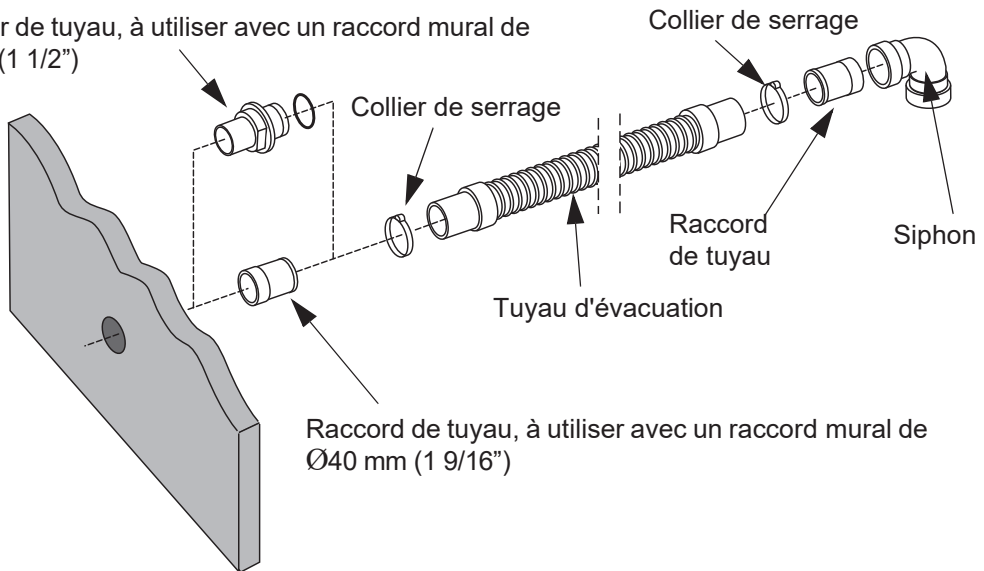

3

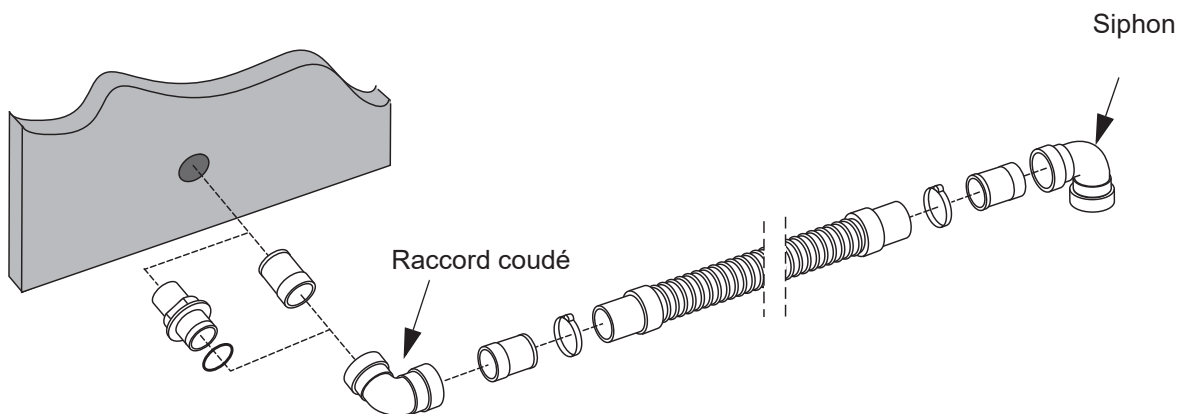

Alimentation eau froide et eau chaude

Exigences internes	
Débit min./conduite d'alimentation	25 l/min (6,6 gal/min) 50 l/min CW + HW (13,2 gal/min CW + HW)

Exigences relatives aux tuyaux de raccordement d'eau	
Tuyaux flexibles	
Taille standard	DN15
Dimensions du raccord	3/4 pouce B.S.P. femelle
Installation de vannes d'arrêt entre l'unité et l'arrivée d'eau	Ø 16 mm min.
Homologation selon les réglementations locales en matière de température/pression	

AVERTISSEMENT

L'arrivée d'eau chaude et froide doit être équipée de vannes d'isolement locales.

MISE EN GARDE

Tous les raccordements et toutes les installations de plomberie doivent être conformes à toutes les réglementations locales, étatiques ou fédérales pertinentes ainsi qu'aux codes de plomberie en vigueur.

REMARQUE


Rincez les tuyaux de raccordement avant de les brancher sur le mitigeur.

Alimentation en eau


L'alimentation en eau peut être installée de deux manières :

- Raccordement de l'eau depuis le sol.
 - Raccordement de l'eau depuis le mur.
1. Raccordez les conduites d'eau (non fournies) aux entrées d'eau chaude et froide dans le mur ou le sol.
 1. Il est possible de tourner les entrées latéralement si une meilleure orientation est nécessaire pour les tuyaux. (*Figure 1*)
 2. Raccordez les autres extrémités des conduites d'eau aux entrées d'eau chaude/froide de la baignoire. (*Figure 2*)

1

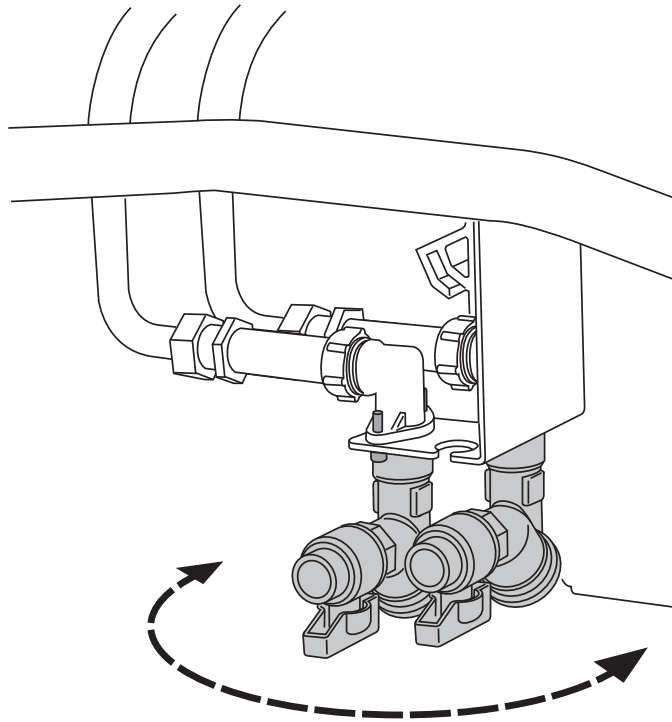

2

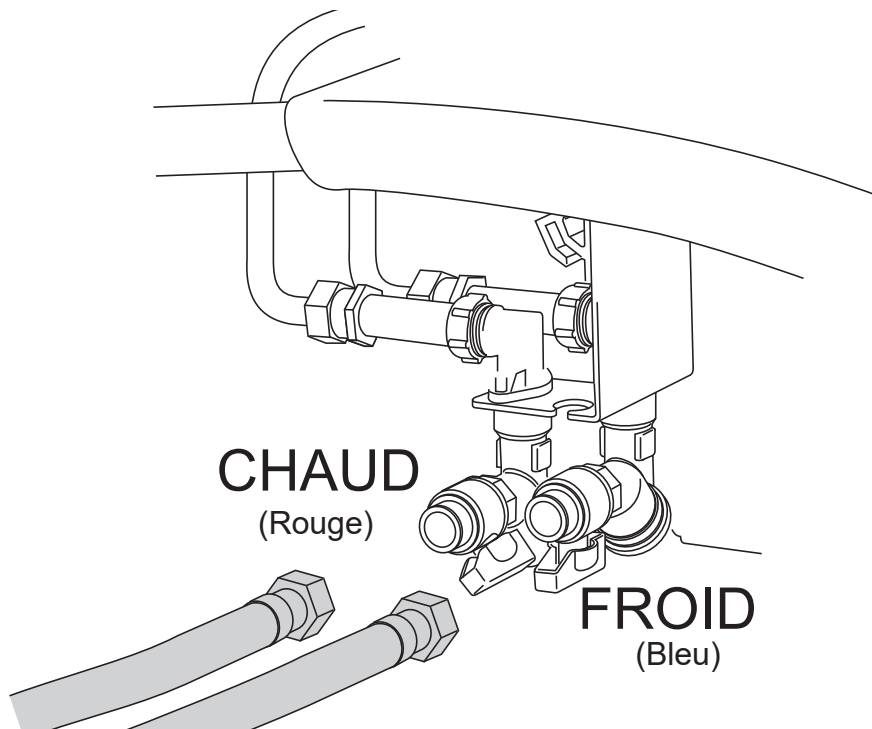

Étalonnage du mitigeur thermostatique

AVERTISSEMENT








Si le mitigeur thermostatique n'est pas correctement calibré, cela peut entraîner des brûlures, pouvant causer des blessures. N'oubliez pas de calibrer le mitigeur thermostatique après chaque installation. Contactez des personnes qualifiées ou un technicien Arjo.

MISE EN GARDE

Vérifier que l'alimentation en eau CHAUDE est d'une température stable et que la température maximale de l'eau chaude est disponible avant de commencer l'étalonnage.

Une fois l'installation terminée, le mitigeur thermostatique doit être étalonné comme suit :

1. Retirez l'étiquette d'étalonnage sur le panneau de commande. *(Figure 1)*
2. Activez la fonction de remplissage. Tournez la pièce en laiton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et attendez que la température atteigne 44 °C/ 111 °F (± 1 °C/2 °F).
3. Essayez de vous rapprocher le plus possible de 44 °C/111 °F, car une température d'eau supérieure à 45 °C/113 °F activera la protection anti-brûlure. N'oubliez pas que la température de l'eau de remplissage de 43 °C/109 °F donne une température au niveau de la douchette d'environ 40 °C/ 104 °F max.
4. Mesurez la température à l'aide d'un thermomètre externe étalonné avec une précision de $\pm 0,5$ °C/1 °F. *(Figure 2)*.
5. Laissez l'eau couler pendant 30 secondes et assurez-vous que la température de l'eau est stable.
6. Allumez la douchette et assurez-vous que la température de l'eau atteint 41 °C/106 °F (± 1 °C/2 °F). Mesurez la température à l'aide d'un thermomètre externe étalonné avec une précision de $\pm 0,5$ °C/1 °F.
7. Si la température n'est pas bonne, commencez à partir de l'étape 2 en ajustant la pièce en laiton pour obtenir la bonne valeur de température.
8. Sortez la bague d'arrêt noire du sac en plastique. *(Figure 3)*
9. Fixez la bague d'arrêt noire. *(Figure 4)*
10. Assurez-vous que le dispositif de butée est positionné comme indiqué sur le schéma. Le dispositif de butée doit être positionné juste en dessous du repère de température rouge. *(Figure 5)*
11. Sortez le bouton du sac en plastique. Enfoncez le bouton de réglage de la température de l'eau. Assurez-vous que le dispositif de butée du bouton est placé juste au-dessus du dispositif de butée de la bague d'arrêt noire. Cela empêchera le bouton de tourner dans le sens antihoraire au-delà de la limite de la température de l'eau chaude définie. *(Figure 6)*
12. Tournez le bouton sur la position froide puis de nouveau sur chaleur maximum. Activez la fonction de remplissage et vérifiez que la valeur de température réglée ne dépasse pas 44 °C/111 °F (± 1 °C/2 °F). Si une autre valeur de température est atteinte, repositionnez la bague d'arrêt noire en recommençant à partir de l'étape deux.
13. Sortez la vis et le cache du sac en plastique. Serrez le bouton à l'aide de la vis et placez le cache par-dessus. *(Figure 7)*

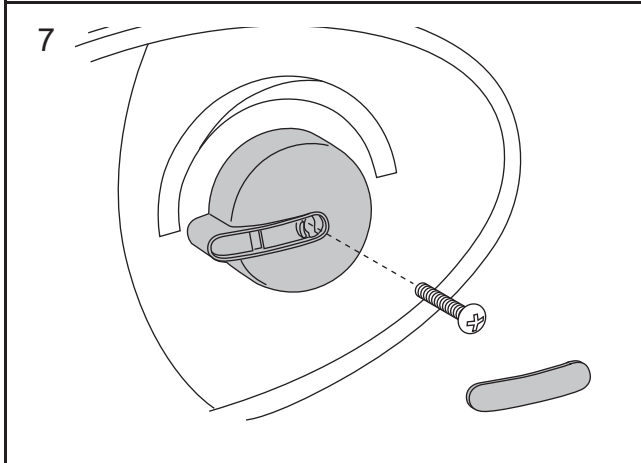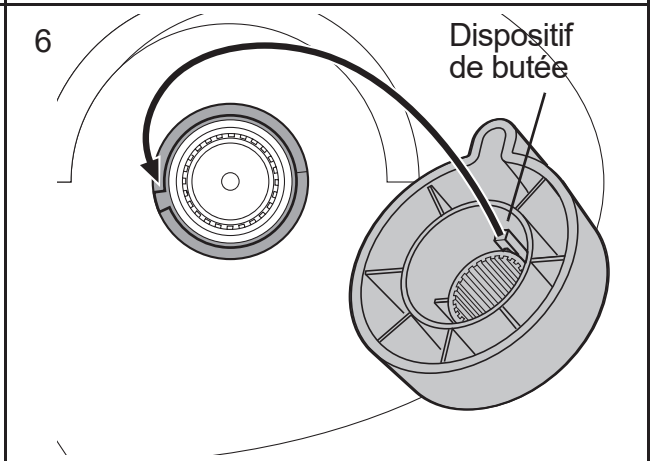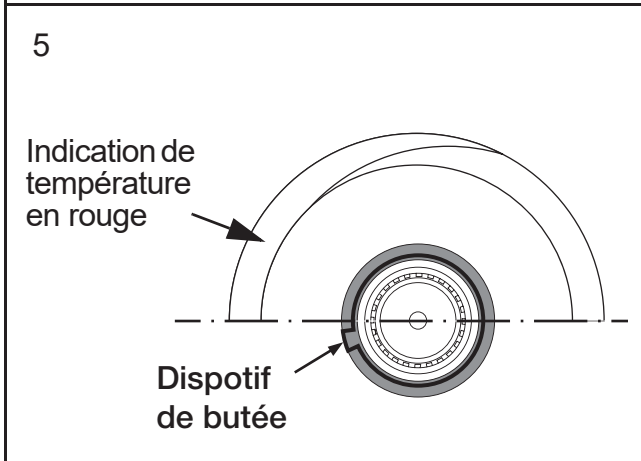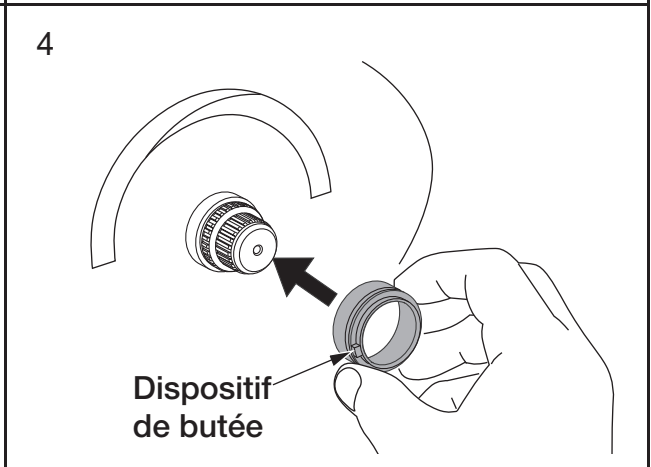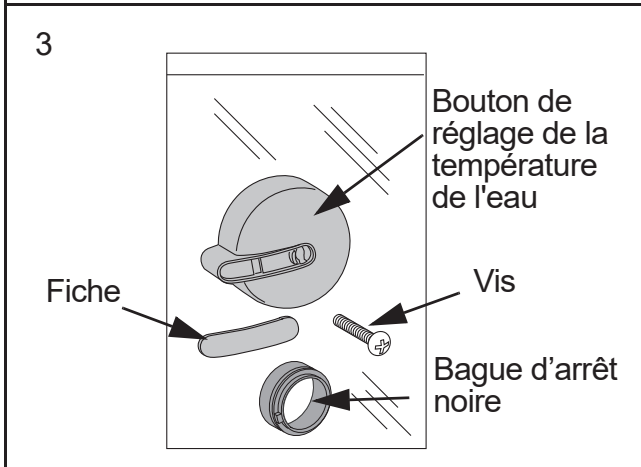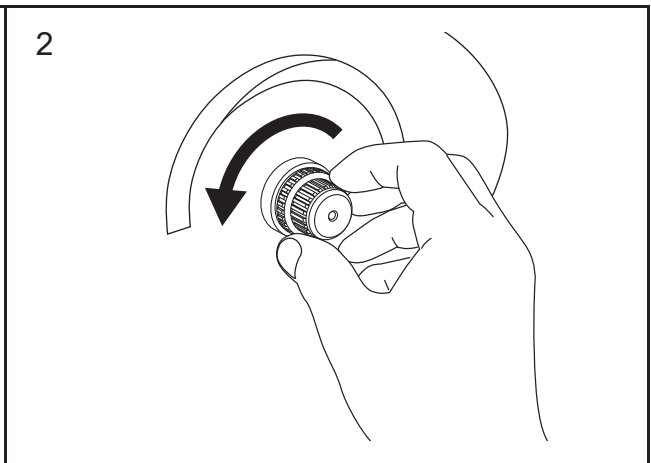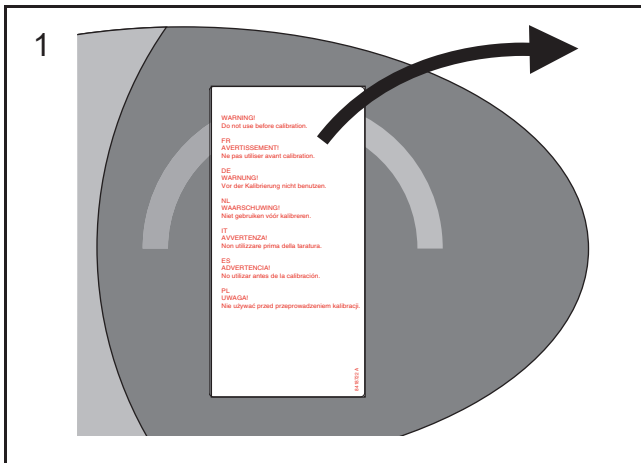

Remplacement du flacon de désinfectant


MISE EN GARDE

Afin d'éviter d'endommager la surface de l'appareil, utilisez uniquement :

- *Arjo Clean*
- *Arjo General Purpose Désinfectant*
- *Arjo Désinfectant Cleanser IV* ou
- *CenKleen IV*


1. Porter des gants et des lunettes de protection.
2. Retirez le compartiment du flacon de désinfectant et placez le flacon de désinfectant dans le compartiment. (*Figure 1*)
3. Sur le flacon de désinfectant :
 - Retirez le capuchon
 - Fixez le dispositif d'aspiration sur le flacon. (*Figure 2*)
4. Vérifiez que la baignoire *Parker* est en position relevée. (*Figure 3*)
5. Réglez la température à une valeur aussi basse que possible.
6. Ouvrez le cache et attrapez la douchette de désinfection.
7. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton Désinfection.
8. Vaporisez le liquide de désinfection dans la baignoire tout en surveillant constamment le débitmètre.
9. Vérifiez le rapport de mélange de liquide sur le débitmètre. Celui-ci doit être conforme à la plage de réglage indiquée. (*Figure 4*)
10. Si nécessaire, réglez le dispositif d'aspiration du flacon à la main afin d'obtenir le rapport de mélange adapté. (*Figure 2*)

1

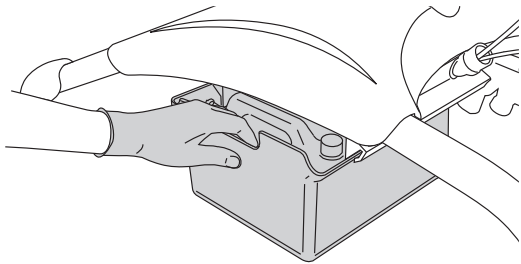


2


Fixez le dispositif d'aspiration sur le capuchon du flacon

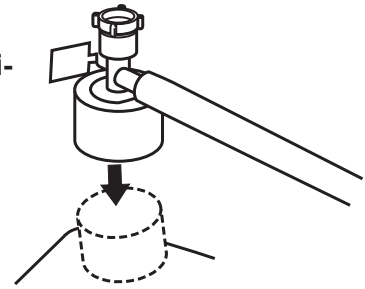



Tournez le dispositif d'aspiration pour obtenir le bon rapport de mélange

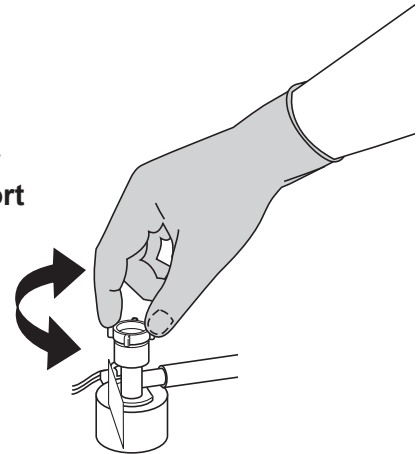

3

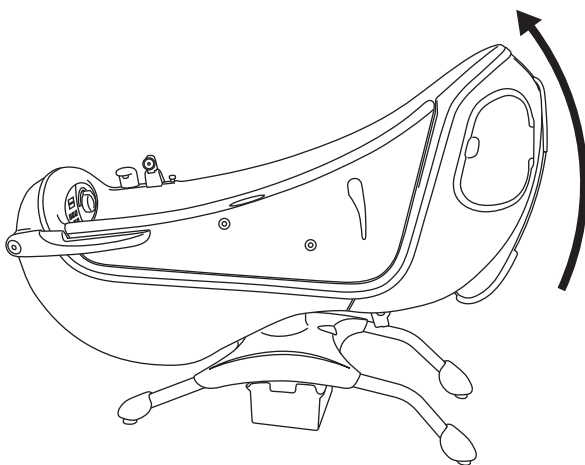

4

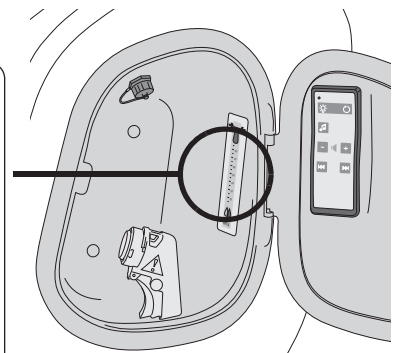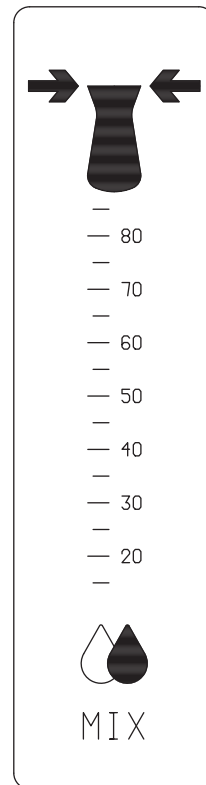

**Désinfectant Arjo
Cleanser IV (60)**









**Arjo General Purpose
Disinfectant (35)**

Arjo Clean (30)

Cen-Kleen IV (30)

Support de douchette (option pour le Royaume-Uni uniquement)

1. Avant de monter la base du support de douchette, retirez le cache de la base recouvrant les pieds. **(Figure 1)**
2. Dévissez le support des tuyaux d'évacuation. **(Figure 2)**
3. Vissez la base du support de douchette des deux côtés du châssis à l'aide des quatre vis à tête cylindrique creuse M6 x 30 mm (vis longues) et des quatre rondelles fournies. **(Figure 3)**
4. Revissez le support du tuyau d'évacuation et remettez en place le cache de la base.
5. Alignez les pièces comme indiqué sur le schéma. **(Figure 4)** Commencez par assembler les deux pièces se trouvant dans la loupe. Ensuite, commencez à assembler les pièces de bas en haut.
6. Enfilez les pièces par le bas de la barre de douche.
7. Serrez les vis sans tête. Elles servent à fixer les pièces sur la barre de douche. **(Figure 5)**
8. Insérez la barre de douche assemblée dans la base du support de douchette. Assurez-vous que le côté plat du bloc de montage s'aligne avec le côté plat à l'intérieur de la base du support de douchette. **(Figure 6)**
9. Fixez la barre de douche à la base du support de douchette à l'aide des 2 vis à tête cylindrique M6 x 12 mm. (Utilisez les vis courtes fournies dans le kit de montage) **(Figure 6)**
10. Insérez fermement la bague en plastique à l'extrémité de la base du support de douchette et fixez-la à l'aide des deux vis sans tête M6 x 8 mm fournies dans le sac. **(Figure 7)**
11. Vérifiez que le mouvement de rotation de la douchette couvre un angle de 180 degrés au-dessus de la baignoire. Assurez-vous que la barre est verticale. **(Figure 8)**
12. Pour éviter que la douchette n'entre en contact avec l'eau de la baignoire, assurez-vous qu'elle se trouve à au moins 44 mm (1 3/4") du bord de la baignoire.

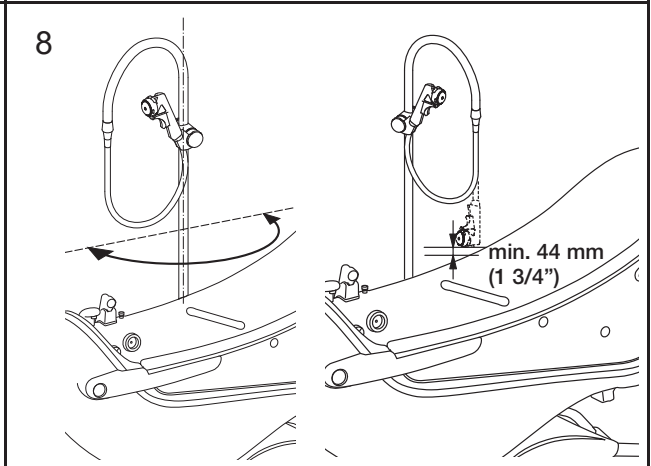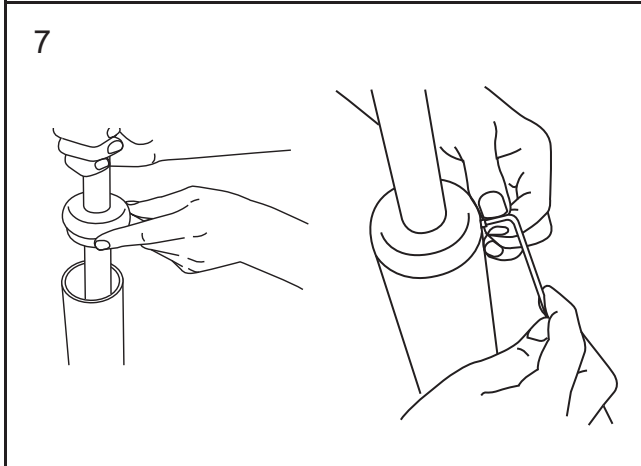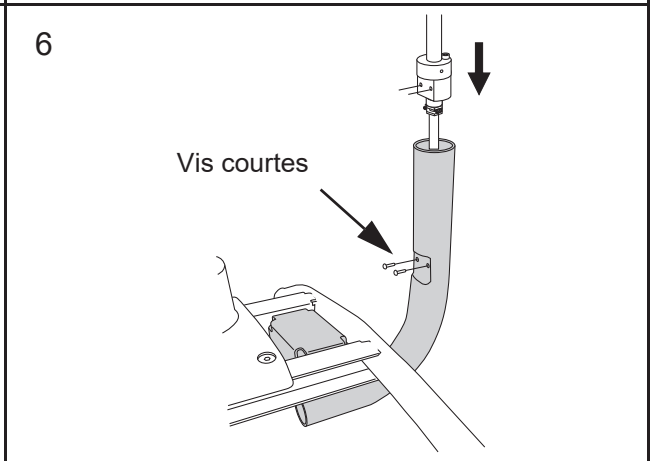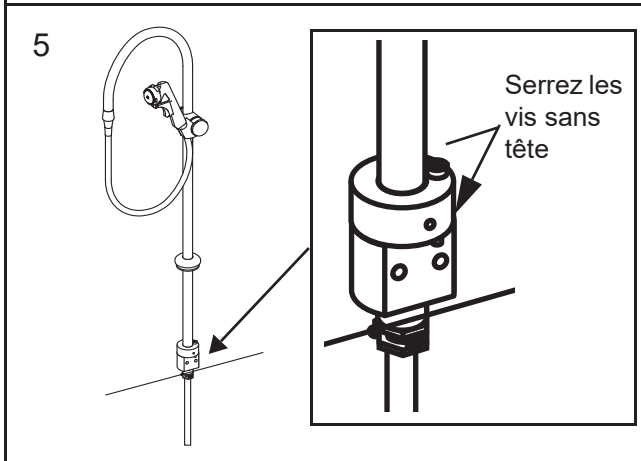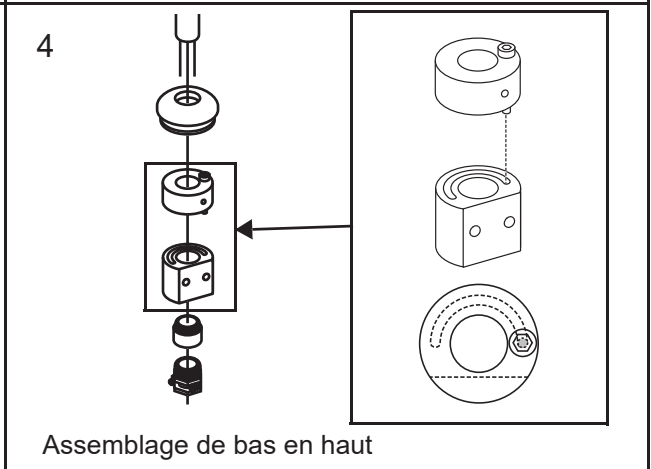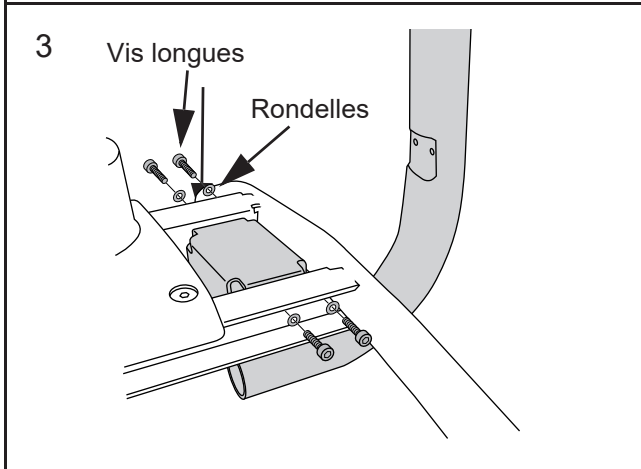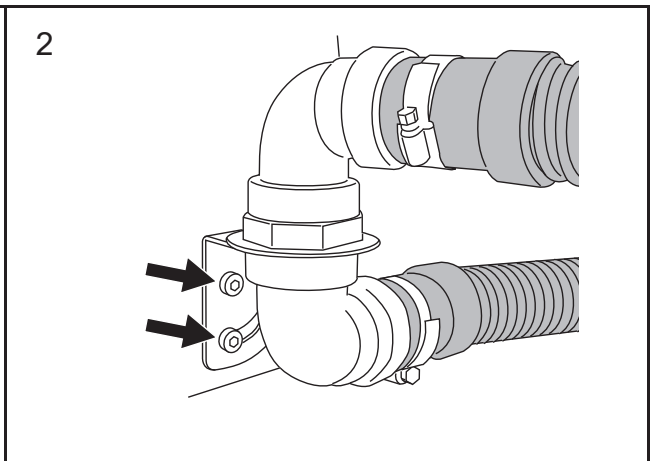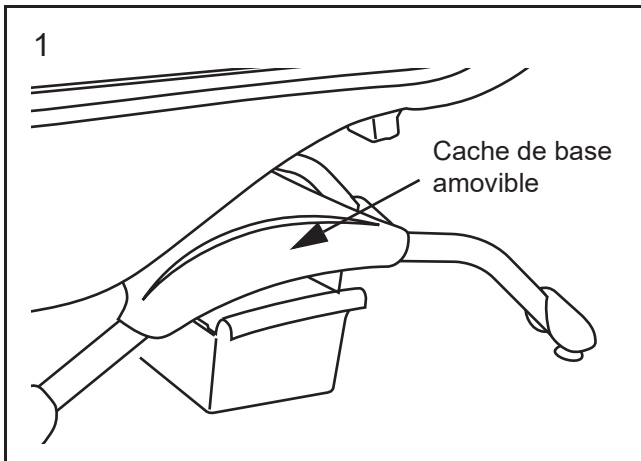

Exigences et spécifications relatives au site

Sol	
Charge maximum (résident +eau)	300 kg/661 lb
Charge maximale au sol	5 400 N/m ²
Pression maximum au sol	0,6 N/mm ²
Pente	1:50
Hauteur de plafond	Min. 2 510 mm + 50 mm (98 3/4" + 2")

Transport et stockage	
Température ambiante	-20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F)
Humidité relative	10 % - 80 % HR (sans condensation)
Pression atmosphérique	500 hPa à 1 100 hPa

Eau (chaude et froide)	
Raccord	¾ pouce B.S.P. mâle
Limite supérieure de pression statique	6 bars/87 psi
Pression dynamique recommandée à 8 °C (46°F) CW (eau froide) et à 80 °C (176°F) HW (eau chaude), débit de 58 l/min (15,3 Ggl/min)	3 bars/43 psi
Limite inférieure de pression dynamique à 8 °C CW et à 80 °C HW, débit de 26 l/min (GB)	0,8 bar/12 psi
Limite inférieure de pression dynamique à 8 °C (46 °F) CW et à 80 °C (176 °F) HW, débit de 29 l/min (7,7 gal/min). (Amérique du Nord, sans désinfection)	1 bar/15 psi
Limite inférieure de pression dynamique à 8 °C (46 °F) CW et 80 °C (176 °F) HW, débit de 45 l/min (11,9 gal/min). (Amérique du Nord, avec désinfection + tous les autres marchés)	2 bars/29 psi
Différence maximale de pression entre eau chaude et froide	+/- 0,5 bar / +/- 7 PSI
Température minimale de l'eau froide	2 °C (36 °F)
Température maximale de l'eau froide	20 °C (68 °F)
Température minimale de l'eau chaude	60 °C (140 °F)
Température maximale de l'eau chaude	80 °C (176 °F)

Conditions exigées pour l'évacuation	
Capacité de débit	100 l/min, 26,4 gal/min
Position (sol, mur)	les deux
Dimensions du raccord d'évacuation	Ø40 mm (1 9/16") (dimensions intérieures) Ø46 mm (1 13/16") (dimensions extérieures)
La baignoire doit être raccordée à l'évacuation. Un support de siphon anti-refoulement doit être utilisé si nécessaire.	
Effectuer les raccordements conformément aux réglementations locales.	

Exigences physico-chimiques	
Plage de pH	pH 7,5 - pH 9
Conductivité (mini)	Plus de 50 µS/cm
Chlore (max.)	Inférieur à 50 mg/l
Dureté	Inférieure à 20°dH
Alcalinité	60-200 mg/l HCO ₃

Caractéristiques électriques : UE et Amérique du Nord	
Tension	230 V (EU) 120 V (Amérique du Nord)
Fréquence	50 Hz (EU) 60 Hz (Amérique du Nord)
Consommation électrique (max.)	800 VA
Nombre de phases	Monophasé, c.a.
Mise à la terre	Oui
Équipotentialité	Oui
Cycle nominal de levages max./Haut-Bas	1 min MARCHÉ, 9 min ARRÊT
Cycle nominal max. de l'Air Spa	15 min MARCHÉ, 15 min ARRÊT

Laissé volontairement vide

Laissé volontairement vide

Laissé volontairement vide

Laissé volontairement vide

At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are designed to promote a safe and dignified experience through patient handling, medical beds, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo

CE
2797