




AtmosAir Velaris

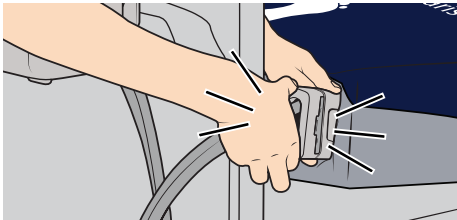

Pro aktivní (alternující) terapii připojte konektor sady trubic pumpy a ujistěte se, že na obou stranách zaklapl na místo (dvojitě cvaknutí).

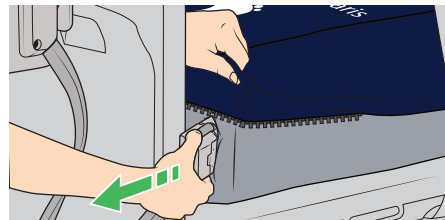

Pro reaktivní terapii odpojte konektor sady trubic pumpy.

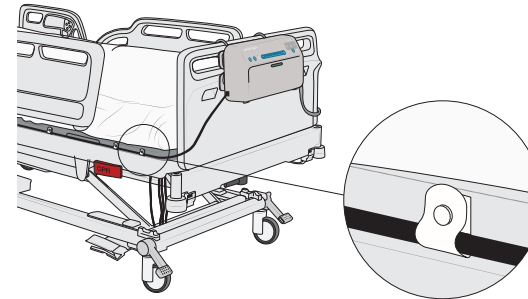

Napájecí kabel protáhněte poutky pro vedení kabelu po levé straně spodního potahu matrace. Kabel zajistěte šesti pojistnými sponami poutek.


Aktivní terapie

1



Na pumpě stiskněte tlačítko Spustit/ Pohotovostní režim a vyčkejte 10 sekund, po jejichž uplynutí se spustí aktivní (alternující) terapie.

2

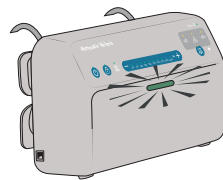

Indikátor opakování se rozsvítí a je zelený.

3




Nastavte hmotnost pacienta/ klienta – nastavení provedte stisknutím tlačítek - nebo +.

4



Stiskněte tlačítko Spustit/Pohotovostní režim na 2 sekundy pro ukončení terapie.

5

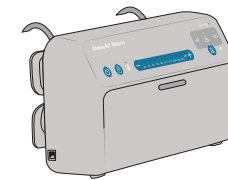

Indikátor opakování zhasne. Aby došlo k vyrovnání vzduchových cel matrace atmosféře, vyčkejte 3 minuty, než odpojíte konektor sady trubic pumpy.