




AtmosAir Velaris

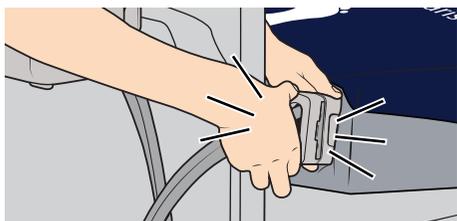

Für die aktive (Wechseldruck-) Therapie schließen Sie den Schlauchsystemanschluss des Kompressors an. Achten Sie darauf, dass er auf beiden Seiten einrastet (zweimaliges Klicken).

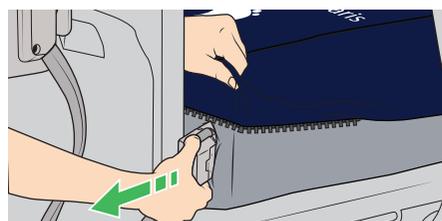

Bei reaktiver Therapie den Schlauchsystemanschluss des Kompressors entfernen.

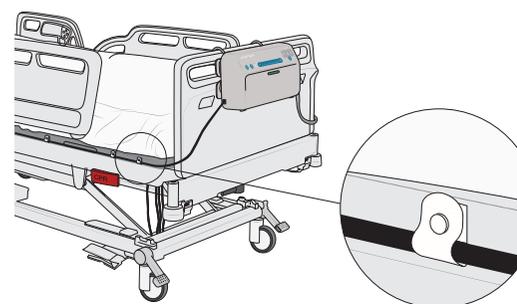

Legen Sie das Netzkabel in die Kabelführungsschlaufen auf der linken Seite des unteren Matratzenbezugs. Das Kabel mithilfe der sechs Kabelschlaufen und zugehöriger Sicherungsclips sichern.

Aktive Therapie

1



Drücken Sie die Betrieb/Standby-Taste am Kompressor und warten Sie 10 Sekunden. Die aktive (Wechseldruck-) Therapie beginnt.

2



Die Kontrollleuchte ist aktiv und grün.

3



Drücken Sie - oder +, um das Patientengewicht einzustellen.

4



Drücken Sie die Betrieb/Standby-Taste für 2 Sekunden. Die Therapie wird angehalten.

5



Die Kontrollleuchte erlischt.

Um den Druckausgleich zwischen den Luftzellen der Matratze und der Umgebung zu ermöglichen, warten Sie 3 Minuten, bevor Sie den Schlauchsystemanschluss des Kompressors trennen.