




AtmosAir Velaris

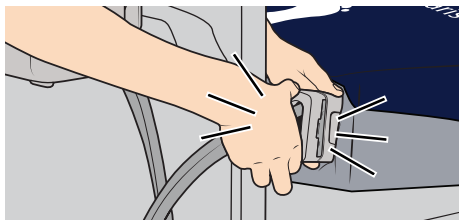

アクティブ（交互圧力）セラピーの場合は、ポンプチューブセットコネクタを接続し、両側の所定の位置にカチッと音がして接続できたことを確認します（ツメが二か所あります）。

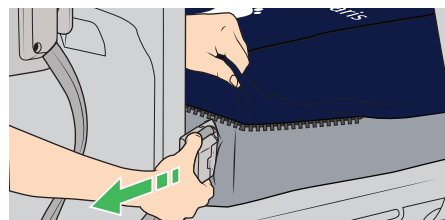

リアクティブセラピーの場合は、ポンプチューブセットコネクタを外します。

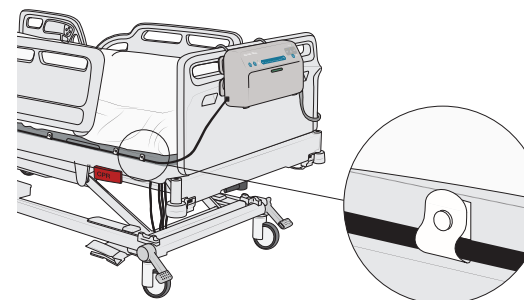

電源ケーブルをマットレスカバー下部の左側にあるケーブルループに接続します。ロックングクリップ付ケーブルループ（6 個）でケーブルを固定します。


アクティブ（交互）セラピー

1



ポンプの運転/スタンバイボタンを 10 秒間押し、アクティブ（交互）セラピーが開始します。

2

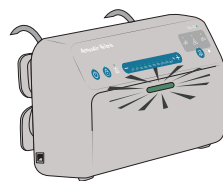

リピーターライトが緑色に点灯します。

3




患者様の体重を、- または + を押して設定します。

4



運転/スタンバイボタンを 2 秒間押し、セラピーが停止します。

5

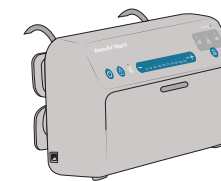

リピーターライトが消灯します。
マットレスのエアセルを大気圧と同じにするため、ポンプチューブセットコネクタを取り外す前に、3分間そのまま放置してください。