




AtmosAir Velaris

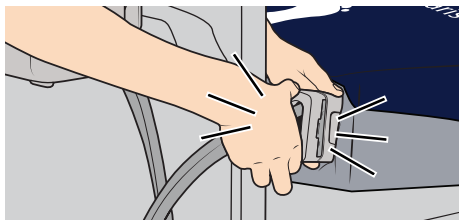

Para terapia ativa (alternada), ligue o conector do conjunto de tubos da bomba, certificando-se de que encaixa em ambos os lados (clique duplo).

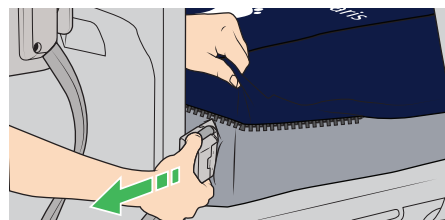

Para terapia reativa, desligue o conector do conjunto de tubos da bomba.

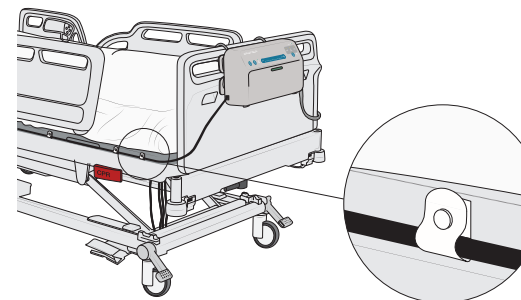

Coloque o cabo de alimentação nas presilhas de passagem para cabos no lado esquerdo da cobertura inferior do colchão. Fixe o cabo utilizando as seis presilhas para cabos com cliques de bloqueio.


Terapia ativa

1



Prima o botão Ligado/
Em espera na bomba
durante 10 segundos
- a terapia ativa
(alternada) inicia-se.

2

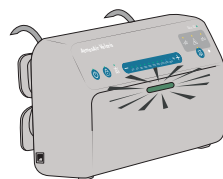

A luz repetidora está
acesa e verde.

3




Marque o peso do paciente,
prima - ou + para marcar o
peso.

4



Prima o botão Ligado/
Em espera durante
2 segundos - a terapia
para.

5

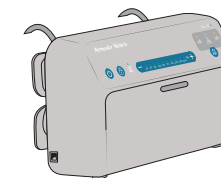

A luz repetidora apaga-se.
Para permitir que as células de ar do
colchão equilibrem com a atmosfera, deixe
3 minutos antes de desligar o conector do
conjunto de tubos da bomba.