


AtmosAir Velaris

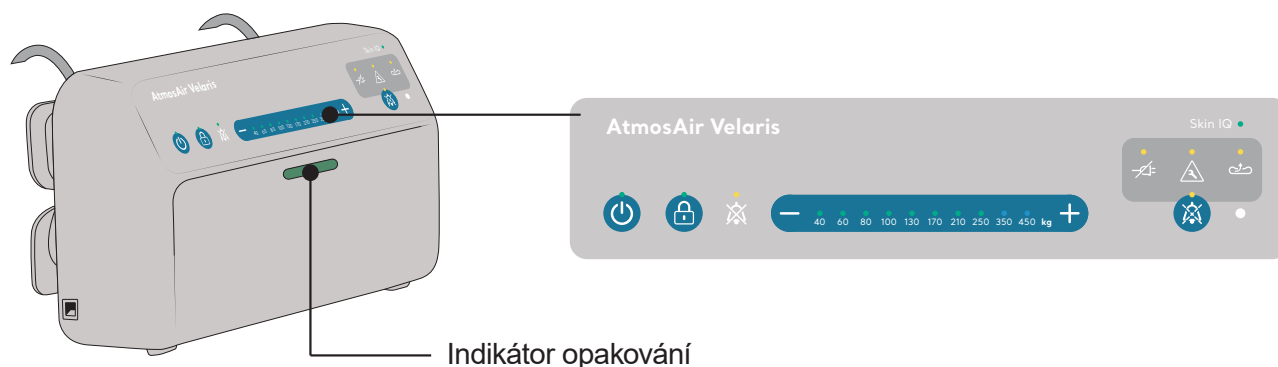

Indikátor a tlačítko Spustit/Pohotovostní režim

Tlačítko Spustit/Pohotovostní režim přepíná pumpu mezi režimem spuštění a pohotovostním režimem.

V režimu spuštění indikátor svítí.

Pro přepnutí do pohotovostního režimu stiskněte a přidržte tlačítko dvě sekundy. Indikátor zhasne.



Indikátor a tlačítko zámku

Chcete-li ovládací panel uzamknout, stiskněte a po dobu 2 sekund přidržte tlačítko zámku. Po uzamčení se indikátor rozsvítí.

Chcete-li ovládací panel odemknout, stiskněte tlačítko a přidržte po dobu 2 sekund. Po odemknutí indikátor zhasne.



Indikátor vypnutého zvuku

Indikátor vypnutého zvuku se rozsvítí, jakmile jsou trvale zakázána zvuková upozornění a alarmy.



Indikátor a tlačítka pro výběr hmotnosti

Výchozí hmotnost je nastavena na 100 kg (220 lb) a rovněž svítí příslušný světelný indikátor.

- Stiskněte tlačítko - pro snížení hmotnosti pacienta/klienta.
- Stiskněte tlačítko + pro zvýšení hmotnosti pacienta/klienta.



Tlačítko a indikátor přerušení zvukového alarmu

Stisknutím tlačítka přerušení zvukového alarmu ztišíte zvukový alarm na 15 minut, indikátor se rozsvítí.

Pro zrušení stiskněte tlačítko znovu.



Indikátor výpadku napájení

Při zjištění výpadku napájení se rozsvítí indikátor výpadku napájení a zazní zvukový alarm.

Během výpadku napájení není možná aktivní (alternující) terapie.



Indikátor systémové chyby

Pokud je v průběhu vestavěného vlastního testu (BIST) nebo během terapie zjištěna vnitřní chyba pumpy, rozsvítí se indikátor systémové chyby a zazní zvukový alarm.



Indikátor nízkého tlaku

V případě, že matrace nedosáhne cílového tlaku, rozsvítí se indikátor nízkého tlaku a zazní zvukový alarm.

Skin IQ

Indikátor Skin IQ

Indikátor Skin IQ se rozsvítí po připojení přehozy Skin IQ do zásuvky.

