

AtmosAir Velaris



運転/スタンバイボタンとライト

運転/スタンバイボタンは、ポンプを運転モードとスタンバイモードの間で切り替えます。

運転モードでは、ライトが点灯します。

スタンバイモードでは、ボタンを 2 秒間押し続けます。ライトが消灯します。



ロックボタンとライト


コントロールパネルをロックするには、ロックボタンを 2 秒間押し続けます。ロックされるとライトが点灯します。

すべてのコントロールパネルのボタンをロック解除するには、ロックボタンを 2 秒間押し続けます。ロックが解除されると、ライトは消灯します。



音声オフライト

音声通知とアラームが永続的に無効になると、音声オフライトが点灯する。

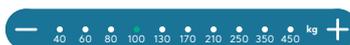

体重選択ボタンとライト

デフォルトの重量は 100 kg (220 lb) に設定されています。

- - ボタンを押して、表示重量を減らします。
- + ボタンを押して、表示重量を増やします。



音声アラームの一時停止ボタンとライト

音声アラーム一時停止ボタンを押して、アラーム音を 15 分間消音します。ライトが点灯します。

ボタンをもう一度押すと、アラーム一時停止がキャンセルされます。



電力障害ライト

電力障害が検出されると、電力障害ライトが点灯し、アラームが鳴ります。

アクティブ (交互) セラピーは、電力障害状態では使用不可になります。



システム障害ライト

内蔵セルフテスト (BIST) の間、または治療中にポンプの内部障害が検出されると、システム障害ライトが点灯して、アラームが鳴ります。



低圧アラーム

マットレスが目標圧力に達しない場合、低圧ライトが点灯してアラームが鳴ります。



Skin-IQ ライト

Skin-IQ ライトは、Skin-IQ ベッドカバーが Skin IQ 電源出口ポートに接続されると点灯します。