


AtmosAir Velaris

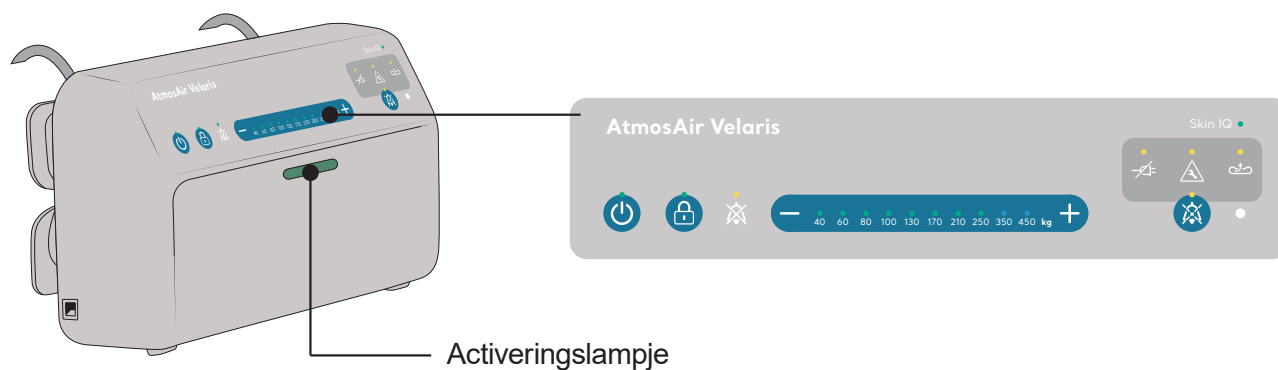

Aan-/Stand-byknop en lampje

De knop Aan-/Stand-by schakelt de pomp tussen de standen aan en stand-by. In de Aan-stand brandt het lampje.

Houd de knop twee seconden ingedrukt om de stand-bystand te activeren. Het lampje gaat uit.



Vergrendelknop en lampje

Om het bedieningspaneel te vergrendelen, houdt u de knop Vergrendelen 2 seconden ingedrukt. Wanneer de vergrendeling is ingeschakeld, gaat het lampje branden.

Om alle knoppen van het bedieningspaneel te ontgrendelen, houdt u de knop Vergrendelen twee seconden ingedrukt. Wanneer de vergrendeling is uitgeschakeld, gaat het lampje uit.



Audio uit-lampje

Het Audio uit-lampje gaat branden wanneer de hoorbare meldingen en alarmeren permanent zijn uitgeschakeld.



Gewichtsselectieknoppen en lampje

Het lampje brandt bij het standaardgewicht, dat is ingesteld op 100 kg (220 lb).

- Druk op de knop - om het gewicht van de zorgvrager te verlagen.
- Druk op de knop + om het gewicht van de zorgvrager te verhogen.



Audio alarm pauze-knop en lampje

Druk op de Audio alarm pauze-knop om het hoorbare alarm gedurende 15 minuten uit te schakelen; het lampje gaat branden.

Druk opnieuw op de knop om het pauzeren van het alarm te annuleren.



Stroomuitvallampje

Als er een stroomstoring wordt gedetecteerd, gaat het stroomuitvallampje branden en klinkt er een alarm.

Actieve (alternerende) therapie is niet mogelijk tijdens stroomstoringen.



Systeemfoutlampje

Als er tijdens de ingebouwde zelftest of tijdens de therapie een interne fout van de pomp wordt gedetecteerd, gaat het systeemfoutlampje branden en klinkt er een alarm.



Lage druk-lampje

Als de matras de gewenste druk niet bereikt, gaat het Lage druk-lampje branden en klinkt er een alarm.

Skin IQ

Skin IQ-lampje

De Skin IQ-lampjes gaan branden wanneer een Skin IQ-hoes wordt aangesloten op de voedingsuitgang van de Skin IQ.

